



SKIN & CARE®

DENMARK



Hammertå

Støttepude til tåens underside



- ✓ Hammertæer, der har brug for ekstra støtte
- ✓ Blød, ergonomisk støtte, der aflaster, beskytter og smertelindrer
- ✓ Lang holdbarhed

VENSTRE, LARGE



1 pude med positioneringsanordning

Hammertåpude

Støtte til hammertæer

Hypoallergenisk / Vaskbar / Genanvendelig

Puden afhjælper og aflaster hammertæer. Den hjælper med at udrette den berørte tå. Den begrænser trykket. Beskytter mod gnidning. Gør det nemmere at gå. Blød, støddæmpende, lindrer smerterne.



Vælg mellem:
højre / **venstre** fod - medium / **large**

SE BRUGSANVISNING OG ADVARSLER INDE I PAKNINGEN



Brugsanvisning

Før den 2. eller 3. tå ind i ringen, og placér puden under tæerne. Puden skal ligge fast på en lige linje. Den skal forblive i denne stilling, så længe der anvendes fodtøj.

Egenskaber

Benped Elasoft® formpuder adskiller sig ved deres enestående elastomerstruktur af gele med 90% minera-lolie, der er særlig blød, elastisk og modstandsdygtig overfor deformation ved brug.

Advarsler

Formpuden bør vaskes med **koldt sæbevand** efter hver anvendelse.

Puden anbringes på foden, mens den er tør, og tages af, når man hviler.

Den må ikke anvendes på åbne sår. **Sukkersygepatienter** skal spørge deres fodlæge eller praktiserende læge til råds.

Til udvortes brug. Opbevares på et køligt, tørt sted. Skal opbevares udenfor børns rækkevidde.

cod. BEN0855/DK / rev.00 del 04/12/17 REF BEN8012

Originalt produkt:

Sixtem Life Srl - Via Emilio Boni, 19 - 59100 Prato [PO] - IT - www.sixtemlife.it

Eneforhandler: PharmaVest A/S, Virklundvej 5, DK-8600 Silkeborg, Denmark, www.pharmavest.dk