



SKIN CARE®

DENMARK




Tådelere til storetå

Deler storetåen fra de øvrige tæer



- ✓ Storetå der lapper ind over de andre tæer
- ✓ Blød, elastisk form-pude, der beskytter og lindrer smerterne
- ✓ Lang holdbarhed

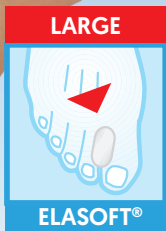

2 Elastiske tådelere til storetåen

Tådeler til storetå

Tådeler til storetå, der lapper ind over de andre tæer Hypoallergenisk / Vaskbar / Genanvendelig

Hjælper til med at placere storetåen lige. Begrænser trykket. Mindsker området mellem tæerne mod gnidning. Forebygger irritationer og hård hud mellem tæerne. Blød og støddæmpende, lindrer smerterne.



Vælg den mest passende størrelse:
medium / **large**

SE BRUGSANVISNING OG ADVARSLER INDE I PAKNINGEN



Brugsanvisning

Anbring tådeleren mellem storetåen og den næste tå.
Tådeleren skal blive i denne stilling, så længe der anvendes fodtøj.

Egenskaber

Beped Elasoft® formpuder adskiller sig ved deres enestående elastomerstruktur af gele med 90% minera-lolie, der er særlig blød, elastisk og modstandsdygtig overfor deformation ved brug.

Advarsler

Formpuden bør vaskes med **koldt sæbevand** efter hver anvendelse.
Puden anbringes på foden, mens den er tør, og tages af, når man hviler.
Den må ikke anvendes på åbne sår. **Sukkersygepatienter** skal spørge deres fodlæge eller praktiserende læge til råds.
Til udvortes brug. Opbevares på et køligt, tørt sted.
Skal opbevares udenfor børns rækkevidde.

cod. BEN0862/DK / rev.00 del 04/12/17 REF BEN8019

Originalt produkt:

Sixtem Life Srl - Via Emilio Boni, 19 - 59100 Prato (PO) - IT - www.sixtemlife.it

Eneforhandler: PharmaVest A/S, Virklundvej 5, DK-8600 Silkeborg, Denmark, www.pharmavest.dk