



SKIN CARE®

DENMARK



Tådelers

Deler tærerne



- ✓ Hård hud mellem tærerne
- ✓ Blød, ergonomisk og elastisk formpude, der beskytter og lindrer smerterne
- ✓ Lang holdbarhed

SMALL



ELASOFT®

2 Elastiske tådelere

Tådelers

Tåbeskyttelse - Deler tærne Hypoallergenisk / Vaskbar / Genanvendelig

Holder fodens mindre tæer på afstand af hinanden, så de ikke presses sammen. Mindsker trykket. Beskytter området mellem tærne mod gnidning. Forebygger irritationer, hudafskalning og hård hud mellem tærne. Fremmer naturlig gendannelse af sund, elastisk hud. Blød og støddæmpende, lindrer smerterne.



Vælg den mest passende størrelse:
small / medium / large



SE BRUGSANVISNING OG ADVARSLER INDE I PAKNINGEN



Brugsanvisning

Anbring tådeleren mellem de berørte tæer. Tådeleren skal blive i denne stilling, så længe der anvendes fodtøj.

Egenskaber

Benped Elasoft® formpuder adskiller sig ved deres enestående elastomerstruktur af gele med 90% minera-lolie, der er særlig blød, elastisk og modstandsdygtig overfor deformation ved brug.

Advarsler

Formpuden bør vaskes med **koldt sæbevand** efter hver anvendelse. Pudens anbringes på foden, mens den er tør, og tages af, når man hviler. Den må ikke anvendes på åbne sår. **Sukkersygepatienter** skal spørge deres fodlæge eller praktiserende læge til råds. Til udvortes brug. Opbevares på et køligt, tørt sted. Skal opbevares udenfor børns rækkevidde.

cod. BEN0863/DK / rev.00 del 04/12/17 REF BEN8020

Originalt produkt:

Sixtem Life Srl - Via Emilio Boni, 19 - 59100 Prato (PO) - IT - www.sixtemlife.it

Eneforhandler: PharmaVest A/S, Virklundvej 5, DK-8600 Silkeborg, Denmark, www.pharmavest.dk