

FC2

Kvinde kondom - Femidom

Fri for latex

En ny mulighed for kvinder

Et præventionsmiddel som giver effektiv beskyttelse imod seksuelt overførte sygdomme som HIV og AIDS.

Illustrationerne viser en guide til hvordan man påfører Femidomet.

Det kan indsættes når som helst inden samlejet.



- Find en behagelig stilling: lig ned, sid på hug eller hav et ben oppe på en stol. Tag kondomet ud af indpakningen - vær ekstra påpasselig hvis du har smykker på.
- Klem den nederste halvdel af den indre ring mellem din tommelfinger, pegefinger og langefinger. Dette giver et sikkert greb og letter indsætningen.
- Spred med den anden hånd kønslæberne, mens du indfører den sammenklemte ring og skubber den så langt op du kan.
- Sæt så din finger ind i indersiden af hylsteret, indtil du kan føle bunden af den indre ring, og skub ringen op i skeden
- Den inderste ring skal lige passere kønsbenet. Den ydre ring og en lille del af hylsteret vil blive uden for skeden.

Brug et nyt Femidom hver gang du har sex.

Hvordan fjernes Femidomet?

Da Femidom klæber til indersiden af skeden, behøver din partner ikke trække sig tilbage lige efter, at han har fået udløsning.

Når du fjerner Femidom skal du klemme den ydre ring sammen for at beholde sæden inden i. Træk så ganske let Femidom ud. Smid aldrig Femidom i toilettet. Hvis du har lyst til at have samleje igen, skal du bruge et nyt Femidom.

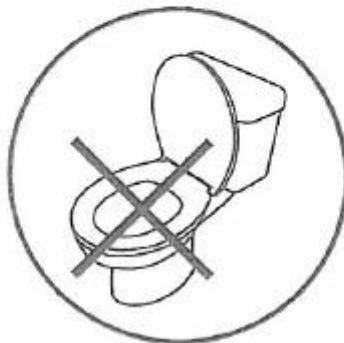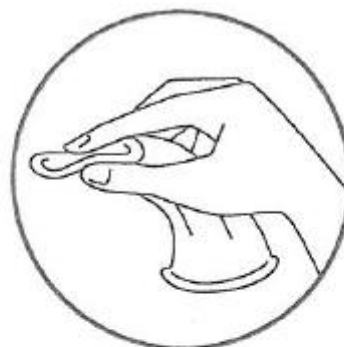

The Female Health Company (UK) Plc,
London, W3 0BZ, UK
European Patent No. 1 605 876 (GB)