

NY



CE



ANABOX[®] 7 DAGE COMPACT

Hver dag den rigtige medicin på
det rigtige tidspunkt.

Doseringsæsken til din medicin

- » kan stables
- » sikker opbevaring
- » Made in Germany

LOT



anmed GmbH

Gartenstraße 13 • D-09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: +49(0)3733 596300 • Fax: +49(0)3733 596301
E-Mail: info@anmed.de
www.anabox.de



OBS! Brugsanvisningen på indersiden skal overholdes!



Rengøring & påfyldning

1. Udtag dagsdoseringsboksene fra magasinet (billede 5*), skub låget op (billede 1*).
2. Fjern derefter låget med en let drejebævgelse (billede 2*).
3. Nu kan doseringsboksunderdelene og låget rengøres. Vær i den forbindelse opmærksom på oplysningerne i brugsanvisningen.
4. Tør enkeltdele omhyggeligt, inden du påfylder dagsdoseringsboksene med medicin passende til den pågældende dag og indtagelsestidspunkterne (billede 1*).
5. Klik derefter låget på underdelen i den rigtige position (billede 3*). Sørg i den forbindelse for, at indtagelsesrummet for „morgen“ altid er det største og bliver justeret til venstre (billede 1*).
6. Nu sidder låget sikkert og kan forskydes svarende til den ønskede udtagelse af medicinen.

Udtagelse af medicin fra dagsdoseringsboksen:

1. Indtagelsesdagen finder man på siden af doseringsboksens underdel og indtagelsestidspunkterne på låget af dagsdoseringsboksen.
2. Det større rum til medicinen om morgenen er altid i venstre side (billede 1*).
3. For udtagelsen af medicinen i løbet af dagen skal du bare skubbe låget til højre (billede 1*), indtil det pågældende rum er åbent. Efterfølgende skal du skubbe låget til venstre til udgangspositionen igen for at lukke dagsdoseringsboksen.
4. For at åbne rummet til natmedicinen om natten i højre side af doseringsboksen skal du skubbe låget til venstre (billede 4*). Dette lukker du igen ved at bevæge låget til højre til udgangspositionen.

Udtagelse af dagsdoseringsboksene fra magasinet:

1. Du kan nemt udtage dagsdoseringsboksen på forsiden af magasinet (billede 5*) og med et let tryk skubbe den tilbage.
2. For at skifte en ugedag skal du skubbe de øvrige dagsdoseringsbokse fjern bagfra. Isæt derefter den tømte dagsdoseringsboks i den bagerste åbning. (billede 6*)

* billeder se forside

ANABOX[®]

7 DAGE COMPACT

  BRUGSANVISNING

Medicinprodukt af klasse I
Version 03 / 2017

CE

Doseringsæske til 7 dage. 7 enkelte æsker inddelt i 4 rum.

Opbevar altid doseringsæsken utilgængeligt for børn!

Læs venligst vores tips og oplysninger inden brug!

- Inden doseringsæsken tages i brug første gang anbefales det, at alle komponenter rengøres med lunken vand og et mildt rengørings-/opvaskemiddel, som er tilladt til brug i private hjem. Doseringsæsken tåler vask i opvaskemaskinen (normaltemperatur 50°C).
- Ved genopfyldning eller ved ændring af dosering anbefales det, at doseringsæsken rengøres!
- Vær opmærksom på den korrekte ugedag på doseringsæsken før indtagelse af medicinen!
- Vær også opmærksom på særlige opbevaringsbetingelser for den doserede medicinen jf. beskrivelsen på den pågældende præparats emballage. Ved spørgsmål herom bedes henvendelse ske til dit apotek eller præparatets producent.
- Anvendelsen af medicinboksen af personer med et psykisk handicap bør ske under overvågning af fagpersonale.
- Bortskaffelse af emballagen kan ske via dagrenovationen!
- Producenten af ANABOX[®] hæfter på ingen måde for forkert anvendelse, opbevaring eller indtagelse af medicinen!

DK

