

Leukomed® Control**Bakterie- og vandafvisende filmforbinding med en gennemsigtig såpude****Beskrivelse**

Leukomed® Control er en steril, bakterie-, virus- og vandtæt, transparent filmforbinding til behandling af postoperative sår og andre akutte sår. Produktet består af en semi-permeabel polyuretanfilm med en hvidvelling selvklebende kant og en absorberende såpude af hydropolymer. Den transparente forbinding gør det muligt at kontrollere såret visuelt uden at fjerne forbindingen. Dermed fremmes sårhelingen uforstyrret. Da sårpuden af hydropolymer absorberer eksudat og understøtter optimal sårheling via delvis hydrering, er Leukomed® Control egnet til tørre og let til moderat væskeunde sår. Den hudvenlige, vandtætte og selvklebende kant garanterer sikker fiksering. Filmforbindingens høje permeabilitet forhindrer opbygning af såfvæske så macearation af huden undgås. Leukomed® Control beskytter såret mod friktion og danner en barriere mod bakterier, vira og eksterne kontaminanter.

Indikationer

Sårtyper: Leukomed® Control er velegnet til akutte sår som f.eks. operationssår, donorsteder efter hudtransplantation, tørste- og andregraftforbindinger, flænger og hudafskrabninger.
Ekssudatniveau: Leukomed® Control kan bruges til tørre og let til moderat væskeunde sår.

Kontraindikationer

- Leukomed® Control er ikke velegnet til kirurgisk transplantation, til at standse kraftig blødning, til tredjegradsforbindinger eller til brug i dybe kaviteter.
- Produktet er ikke egnet til brug under en kompressionsbandage eller under strålebehandling.

Forholdsregler og sikkerhedsinformation

- Leukomed® Control er kun beregnet til engangsbrug. Anvend ikke produktet, hvis emballagen allerede er åben eller beskadiget, da filmforbindingens sterilitet kun kan garanteres, når emballagen er ubrøjet og ubeskadiget før anvendelse.
- Leukomed® Control må kun anvendes på inficerede sår efter rådførelse med en sundhedsfaglig person.
- Produktet må ikke anvendes på patienter, som er overfølsomme over for glycerin eller hydrogel. Hvis patienten ikke tåler forbindingen, skal den fjernes, og såret skal renses forsigtigt med vand eller sterilt saltvand.
- Forbindingen kan lugtes med sterilt saltvand for at gøre det lettere at fjerne den.
- Hvis der sidder rester af hydrogel tilbage i såret, når forbindingen er fjernet, kan det fjernes ved at skylle med sterilt saltvand eller vand.
- Som et led i kroppens naturlige helingsproces fjernes ikke-levedygtigt væv fra såret, hvilket til at begynde med kan få såret til at se større ud. Hvis såret fortsat bliver større efter de første forbindingsskift, skal du rådføre dig med en sundhedsfaglig person.
- Da Leukomed® Control skaber et miljø, der fremmer dannelse af nye blodkar, kan det vejlgighedsvis forekomme, at blod fra de gamle, nye blodkar farver sårvævet. I tilfælde af kraftig blødning kan forbindingen anvendes sammen med en alginat-sårbandage.
- Hold såret under nøje observation. Leukomed® Control må blive sidende i op til 7 dage, alt afhængigt af sårets tilstand. Den samlede brugstid (dvs. den periode, hvor hver forbinding udskiftes med en ny) er 30 dage.
- Produktet må ikke anvendes efter den angivne udløbsdato.
- Der findes ikke data, som understøtter brug af topiske præparater sammen med Leukomed® Control.
- Kun til udvortes brug.

Brugervejledning**Klargøring**

- Rens såret i henhold til proceduren for sårbehandling.
- Vælg en forbindingss størrelse, som gør, at sårpuden af hydropolymer rigeligt overlapper den hud, der omgiver selve såret.
- Undlad at klippe forbindingen til, da den i så fald ikke forbliver vandtæt.





Påføring

- Tag den sterile filmforbinding ud af emballagen.
- Fjern den gennemsigtige bærefilm på undersiden, så forbindingens klebende side er blødt.
- Hold fat om påføringsfligene i højre og venstre side, og påfør forbindingen med gelpuden ned mod såret.
- Træk påføringsfligene af. Gå derefter forsigtigt forbindingen ud, så kanterne kleber ordentligt fast uden at krølle.
- Fjern forsigtigt den overste bærefilm ved at tage fat ved de røde striber.
- Kontrollér såret ofte. Løft ikke forbindingen, når du kontrollerer såret.
- Skift forbindingen så ofte, som sårets tilstand kræver.
- Leukomed® Control må blive sidende i op til 7 dage, alt afhængigt af patientens tilstand og ekssudatniveauet.

Fjernelse

- Fjern forsigtigt Leukomed® Control fra såret ved at strække filmkanten, og smid derefter forbindingen væk.
- Skyf såret med et egnet sårensingsmiddel, før du kontrollerer såret og påfører en ny forbinding.
- Kontrollér såret grundigt, når du skifter forbindingen. Rådfør dig med en sundhedsfaglig person, hvis et eller flere af de følgende symptomer opstår: tegn på infektion (øget smerte, øget rødmen, aløb fra såret); kraftig blødning; ændring i sårets farve og/eller lugt; irritation (øget rødmen og/eller betændelse); overfølsomhed (allergisk reaktion); mangelde tegn på heling.
- Sørg for at fjerne Leukomed® Control før strålebehandling.
- Filmforbindingen må ikke genbruges eller resteriseres, da der er risiko for kryskontaminering.

Anvend ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget. Beskyt produktet mod fugt, og opbevar det på et tørt sted ved en temperatur på under 25°C.

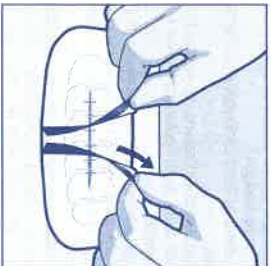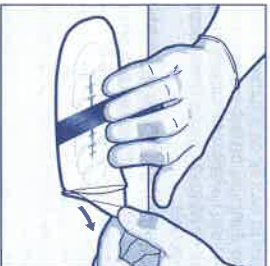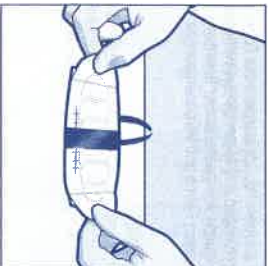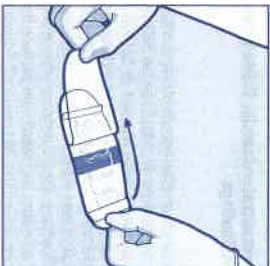

STERILE R

CE 0124



Sterilized using irradiation



Do not re-use



Do not resterilize



Keep dry from sunlight



Do not heat above 25°C/77°F.



Caution!



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Do not use if pouch is damaged.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

No usar si el envase presenta daños.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Bij beschadigde verpakking niet gebruiken.

Não utilize se a embalagem estiver danificada.

Använd inte om förpackningen är skadad.

Må ikke bruges hvis forpakningen er skadet.

Må ikke anvendes, hvis emballage er ødelagt.

Et saan käyttöä, jos pakkaus on vahingoittunut.

® = registered trademark

Made and sterilized in UK

Manufactured for:

BSN medical GmbH

Quickbornstrasse 24

20253 Hamburg · Germany

JBR07621.01

BSN medical