

quick
test

Urinvejsinfektionstest Selvtest

Quicktest Urinvejsinfektionstest er en enkel urintest, som kontrollerer leukocytter, nitritter og blod i urinen. Disse tre faktorer bruges til at diagnosticere en urinvejsinfektion. Testen fortæller resultatet med det samme og for at aflæse dette, udføres en sammenligning af den fuldførte testen med farvediagrammet inkluderet i pakken. Urinvejsinfektion er en sygdom, som rammer millioner af mennesker hvert år. Urinvejsinfektion består af nyrer, urinledere, urinblære og urinrør. Nyrerne fjerner overflødig væske og affaldsprodukter fra blodet, og det frigøres under urinering. Urin lagres i urinblæren og tømmes gennem urinrøret.

I gennemsnit passerer ca 0,8 til 2,6 liter urin per dag gennem urinvejssystemet. Mængden varierer afhængigt af, hvor meget væske, der indtages. Mængden af urin, som produceres om natten, er omtrent halvdelen af det, som produceres i løbet af dagen. Når du er rask, er urinen sterilt: den indeholder vand, salt og affaldsprodukter, men den er helt fri for bakterier og virus. I de fleste tilfælde opstår en urinvejsinfektion i urinrøret. En urinvejsinfektion, der kun berører sig i urinrøret, kaldes urinrørsbetændelse. Infektionen kan sprede sig til urinblæren og kaldes så blærebetændelse. Hvis infektionen ikke behandles, kan den sprede sig til nyrerne, som kaldes nyrebækkenbetændelse (pyelonefrit). Urinvejssystemets anatomi beskytter sædvanligvis bakterier mod at sprede sig til nyrerne, mens urinen passerer ud gennem urinrøret. Hos mænd producerer prostataen et sekret, som hæmmer bakteriel vækst. Hos begge køn er immunforsvaret afgørende for at hindre at en infektion opstår. Til trods for disse beskyttelsesmekanismer opstår infektioner ind imellem. E. coli, en type bakterier som sædvanligvis findes i tyktarmen, udgør ca 80% af urinvejsinfektioner hos voksne.

Indhold: 1stk Urinvejsinfektionstest 1 stk Brugsanvisning

1. Læs brugsanvisningen, før testen udføres.
2. Anvend ikke testen efter bedst før dato.
3. Anvend ikke testen, hvis pakningen er åbnet.
4. Åbn testen, når den har nået stuetemperatur, og du er klar til at udføre testen.
5. Proven skal udføres i et lyst rum.
6. Anvend/udfør testen umiddelbart efter, at pakningen er åbnet.
7. Rør ikke reaktionsområdet, dette kan påvirke resultatet og kan være sundhedsskadeligt.
8. Brug en engangsbeholder.
9. Pakken indeholder en lille pose med Silica tørringsmiddel, denne skal ikke åbnes.
10. Må ikke fryses.
11. Efter udført test skal alt smides ud i en separat pose, og derefter sorteres som restaffald.
13. Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn og dyr.
14. Dette er en in-vitro selvtest, den kun er til udvortes brug. Må ikke indføres i kroppen.

quick
test

Opbevaring:

Opbevares i stuetemperatur mellem +15C til +30C (59°F to 86°F). Opbevar ikke testen i køleskabet eller fryseren. Udsæt ikke testen for fugt, varme eller sollys før anvendelse. Anvend testen umiddelbart efter, at pakningen er åbnet.

Forberedelser til urinprøve:

Vask underlivet med vand.

Urin i en ren beholder, for eksempel en plastikkop. Beholderen må ikke indeholde rester fra f.eks. vaskemidler eller lignende. Denne urinoopsamlingsmetode sikrer, at urinen ikke bliver kontamineret. Udfør testen direkte.

Sådan gør du:

1. Kontroller, at testen ikke har passeret bedst før dato.
2. Klanger urin (urin i en ren beholder)
3. Tag teststrimlen ud af pakningen, gør dig bekendt med reaktionsområdet. Leukocytter, blod og nitritter. Lys rosa er for Leukocytter, hvid er for Nitritter og mørkegrøn er for blod. Gør dig også bekendt med farvekortet.
4. Dyp teststrimlen med reaktionsområdet ned i urinen i 1 sekund.
5. Tag teststrimlen op og slå forsigtigt strimlen mod kanten af beholderen for at den overfløede urin løber af. Placer så teststrimlen horisontalt med reaktionsområdet.
6. Vent 30-60 sekunder for at reaktionen skal vise sig.
7. Aflæs resultatet ved at sammenligne med det medfølgende farvekort. For at undgå, at farverne på reaktionsområderne skal flyde sammen, skal testen holdes vandret.
8. Identificer den farve, som bedst matcher ved at sammenligne teststrimlen med farvekortet. Hvis der kun er farveændringer i siderne af reaktionsområderne, så anbefales det at foretage en ny test. Testen bør ikke aflæses efter 60 sekunder.

Begrænsninger af testen:

Substanser som forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. nogle stoffer eller noget medicin, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen. Det anbefales derfor at foretage en ny test efter afsluttet mediciner.

Leukocytter:

Testresultatet indikerer ikke antallet af leukocytter som ved en mikroskopisk kontrol. Den indikerer kun, hvis der findes leukocytter. Høj luftfugtighed og temperatur kan give et positivt resultat. Positive resultater kan også forekomme, hvis urinen kontamineres.

Nitritter:

Uanset mængden af rosa skal teststrimlen anses som positiv, men hvis det er rosa prikker eller kun rosa på kanterne af teststrimlen, bør testen ikke anses for positiv. Farveudviklingen har intet med mængden af bakterier i urinen at gøre. Testen viser udelukkende, om bakterierne producerer nitritter. Nogle gange kan det være bakterier, som ikke producerer nitritter. Derfor kan et negativt resultat ikke udelukke urinvejsinfektion.

Blod:

Et falskt positivt resultat kan forekomme nogen gange, hvis der er bakterier i urinen. Der findes forskellige stoffer, som også kan give et falskt positivt resultat. Hvis en kvinde laver testen, når hun er menstruerende, er der risiko for et positivt resultat.

quick
test

Vend for at tjekke dine resultater.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har symptomer på urinvejsinfektion

REF	Product reference	2	Single use
IWD	Yes. In-vitro diagnostic use.		Do not reuse. Discard pouch if the pouch is damaged.
ST	See 'Testing' use.		Store at 15-30°C. Number of tests in the pack.
	Caution. Read insert before use.		Manufacturer.
	Lot Number (batch).		Expiry date.
	Manufacturer telephone number.		Manufacturer fax number.

ATLAS MEDICAL
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WJ, UK
Tel: +44 (0) 1223 858 910, Fax: +44 (0) 1223 858 924



0459

Atlas Medical

ATLAS HOME URINARY TRACT INFECTION TEST
For in-vitro diagnostic and self-testing use
Store at room temperature (15-30°C)

IWD REF 770021001
ST 2

Leukocyter	Nitrit	Blod	Resultat
Positiv	Positiv	Positiv	Du har en urinvejsinfektion. Der er bakterier i urinen. Blod i urinen kan skyldes infektion. Kontakt læge snarest.
		Negativ	Du har en urinvejsinfektion. Der er bakterier i urinen. Kontakt læge snarest.
	Negativ	Positiv	Du har en urinvejsinfektion. Du kan have bakterier, som ikke producerer nitrit. Hvis der er blod i urinen, kan det indikere en infektion. Kontakt snarest en læge.
		Negativ	Du har en urinvejsinfektion. Du kan have bakterier, som ikke producerer nitrit. Kontakt snarest en læge.

Leukocyter	Nitrit	Blod	Resultat
Negativ	Positiv	Positiv	Dette resultat er højlest usandsynligt. Vi anbefaler, at testen udføres på ny med en ny test. Hvis samme resultater fremkommer, har du sandsynligvis en urinvejsinfektion, fordi der er bakterier i urinen. Forekomsten af blod i urinen betyder sædvanligvis, at det er en kraftig infektion.
		Negativ	Dette resultat er højlest usandsynligt. Vi anbefaler, at testen udføres på ny med en ny test. Hvis de samme resultater fremkommer, har du sandsynligvis en urinvejsinfektion, fordi der er bakterier i urinen. Kontakt lægen snarest.
	Negativ	Positiv	Du har ikke en urinvejsinfektion. Forekomsten af blod i urinen kan skyldes andre tilstande, f.eks. nyresten, overdreven motion, prostata-, nyre- eller blodsygdomme.
		Negativ	Ingen urinvejsinfektion