

Diabetes Selvtest

Denne Diabetes-test er beregnet til hjemmebrug. Testen anvendes for at kontrollere niveauet for glukose og ketoner i urinen. Disse faktorer anvendes til at diagnosticere diabetes. Resultatet vises ved at sammenligne teststrimlen med farvekortet, som er vedlagt separat. Hver farve indikerer koncentrationen af glukose og ketoner i urinen. Det er vigtigt, at teststrimlen placeres som illustreret på farvekortet.

Bemærk - Læs brugsanvisningen nøje før brug.

Pakningen indeholder:

- 1 stk Diabetes-test
- Manual på dansk
- Tørningsmiddel (Anvendes ikke)

Advarselsforskrifter og vigtig information

Læs brugsanvisningen nøje, før testen udføres.

Brug ikke testen efter udløbsdatoen. Hvis pakningen er åbnet, skal testen ikke tages i brug. Dette er en in-vitro selvtest, den er udelukkende til udvortes brug. Må ikke indtages.

Resultatet kan kun aflæses, når instruktionerne er blevet fulgt nøjagtigt.

Følg alle instruktioner angående håndtering. Opbevares mellem 15°C og 30°C. Bører ikke testområdet.

Opbevares tørt. Må ikke fryses eller udsættes for direkte sollys. Skal ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på aluminiumsbeholderen.

Testen må ikke bruges, hvis aluminiumsbeholderen er åbnet. Quicktest-diabeteset må ikke genanvendes. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. Yder-emballage sorteres som karton/pap. Øvrigt skal sorteres som restaffald.

REF	Product Reference	Single use.
IVD	For In-vitro diagnostic use.	Do not re-use.
ST	For Self-Testing use.	Do not use if the pouch is damaged.
!	Caution.	Store at 15 - 30°C.
!	Read product insert before use.	Number of tests in the pack.
LOT	Lot number.	Manufacturer.
!	Manufacturer telephone number.	Expiry date.
!		Manufacturer fax number.



ATLAS MEDICAL
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WY,
UK
Tel: +44 (0) 1223 858 910, Fax: +44 (0) 1223 858 524



Sådan gør du:

1. Tag teststrimlen ud af aluminiumsbeholderen, lad tørningsmidlet blive tilbage.
2. Uriner i en ren beholder (for eksempel en plastikop). Dyp den absorberende del i beholderen i 1 sekund.
3. Læg teststrimlen på en plan overflade og vent 30-60 sekunder.
4. Aflæs resultatet ved sammenligne farverne på det medfølgende farvekort. Husk at fortsætte og have testen liggende plant, selv når du sammenligner farverne på farvekortet.
5. Sammenlign farverne på teststrimlen med farvekortet. Hvis der er en farveændring på testområdet, som kun vises langs kanterne af feltet indikerer det, at der ikke har været en reaktion. Testen er derfor ikke pålidelig, og vi anbefaler, at testen foretages på ny med en ny strimmel. Resultatet bør aflæses efter 60 sekunder.

Begrænsninger ved testen:

Stoffer, der forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. visse medikamenter, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen.

Spørgsmål og svar:

Hvornår er det bedst at tage testen?

Denne test kan udføres når som helst i løbet af dagen. Det kan være en god idé at tage testen, før du spiser og derefter teste igen 2 timer efter, at du har spist.

Hvis jeg dyppe teststrimlen mere end 1 sekund, er testen så pålidelig?

Reaktionen viser sig, så snart teststrimlen kommer i kontakt med urin. Hvis teststrimlen forbliver i urinen i 2-3 sekunder, vil det ikke påvirke resultatet, men hvis testen er i urinen mere end 5 sekunder er resultatet ikke pålidelig, og der anbefales en ny test.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har symptomer på diabetes.



ATLAS HOME URINARY TRACT INFECTION

TEST

For in-vitro diagnostic use only. Do not use for in-vitro diagnostic use.

Store at room temperature (15-30°C)

IVD

ST

2

10001001

Vend for at tjekke dine resultater.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har symptomer på diabetes

Quicktest tilbyder helbredstests, der opdater forskellige sygdomstilstande. Læs mere på www.quicktest.dk

Glukose	Ketoner	Resultat
Negativ	Negativ	Du har ikke diabetes
Spør	Negativ	Gentag testen. Opsøg læge, hvis resultatet efter bliver det samme. Du kan være ved at udvikle diabetes.
+	Negativ	Du har muligvis diabetes, opsøg læge.
++	Negativ	
+++	Negativ	
++++	Negativ	
Negativ	Spør	
Spør	Spør	Gentag testen. Opsøg læge, hvis resultatet efter bliver det samme. Du kan være ved at udvikle diabetes.
+	Spør	Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes ketoacidose (syreforgiftning). Søg lægevagt.
++	Spør	
+++	Spør	
++++	Spør	Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarre, opkast eller vægttab.
Negativ	+	
Spør	+	
+	+	Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk ketoacidose. Søg lægevagt.
++	+	
+++	+	
++++	+	Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarre, opkast eller vægttab.
Negativ	++	
Spør	++	Gentag testen. Opsøg læge, hvis det efter bliver samme resultat. Du kan være ved at udvikle diabetes.

Glukose	Ketoner	Resultat
+	++	Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk ketoacidose (syreforgiftning). Søg lægevagt.
++	++	
+++	++	
++++	++	
Negativ	+++	
Spør	+++	Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarre, opkast eller vægttab.
+	+++	Gentag testen. Opsøg læge, hvis det efter bliver samme resultat. Du kan være ved at udvikle diabetes.
++	++++	Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk ketoacidose. Søg lægevagt.
+++	++++	
++++	++++	