


Testdig Multi THC Hashtest - MTH

THC – 20, 50, 100 og 200ng/ml


1. Fjern hashtesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. Fjern bundcoveret. (test-stripsene vil nu komme til syne)

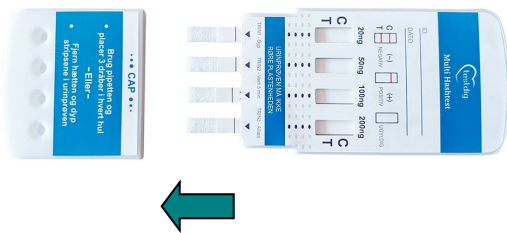


3. Dyp hashtesten i urinprøven i 5 sekunder. **Dyp stripsene ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.**



4. Fjern hashtesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.

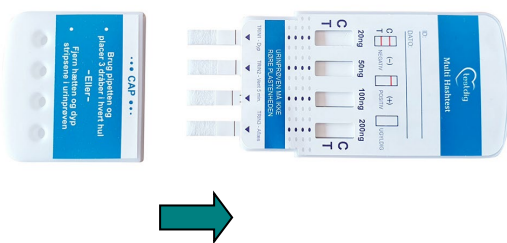

Test for niveau af hash: Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

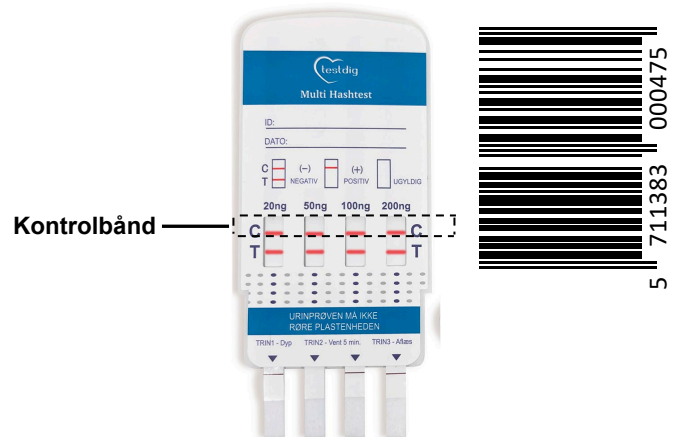

Aflæsning af narkotesten


Negativt Resultat (ingen THC)

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- En i **KONTROL(C)**-området
- En i det specifikke **TEST-område (T)**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et negativt resultat. (ingen THC)

Eksempel på aflæsning:

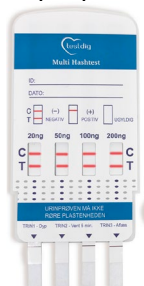


20 ng: Negativ
50 ng: Negativ
100 ng: Negativ
200 ng: Negativ

Positivt Resultat

I **KONTROL(C)**-området skal der være en farvet streg. Når der **ikke** fremkommer nogen streg i et specifikt testområde (T), er testen positiv for det pågældende stof. Dvs. at der er THC til stede over den pågældende mængde.

Eksempel på aflæsning:

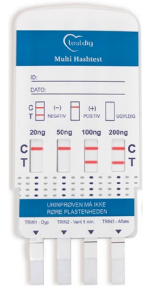


20 ng: Positiv
50 ng: Positiv
100 ng: Negativ
200 ng: Negativ

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for **KONTROL(C)**-området: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. **Gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:

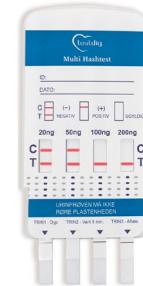

20 ng: Ugyldig
50 ng: Ugyldig
100 ng: Ugyldig
200 ng: Ugyldig

Ordforklaring: THC: Hash

Se bagside for yderlige information.

Testdig Multi THC Hashtest - MTH

THC – 20, 50, 100 og 200ng/ml

Tilslaget brug

Testdig Multi THC screeningstest til at analysere for stoffer i urinen ved nedenstående grænseværdier. Anvendes til in vitro brug. Kromatografisk immunanalyse med tværgående flow for kvalitativ sporing af nedenstående stoffer og dets metabolitter.

THC (20ng/ml): Hash, **THC (50ng/ml):** Hash **THC (100ng/ml):** Hash, **THC (200ng/ml):** Hash,

Denne test giver kun et foreløbigt testresultat. Brug en anden mere specifik kvantitativ analytisk metode til at få bekræftet resultatet. Gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er den foretrukne metode til at få bekræftet et resultat. Anvend klinisk og professionel vurdering til ethvert testresultat, især når der er opnået et foreløbigt positivt resultat.

Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes, må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation. Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere (max. 48 timer).

Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk

Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

Sporingstid:

Typisk 2-4 dage. Kroniske misbrugere i op til 60 dage på THC.




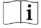



Se yderligere om detektions- / sporingstider på [testdig.dk](http://www.testdig.dk). Klik på Narkotest i menuen til venstre.

Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C.
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Udvidet vedledning kan hentes direkte her: www.testdig.info - <https://testdig.info/brugervejledninger/>

Symbolliste:

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
	Læs vejledning før brug
	Antal i pakke
	Udløbsdato
	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M Bioresearch & Technology Co.,Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;
Email: info@mdss.com

