

URINVEJSINFEKTIONSTEST

DK

QuickTest
Urinvejsinfektionstest
Urinvejsinfektionstest,
til påvisning
af nitrit i urinen

N

QuickTest
urinvejsinfeksjonstest
Urinvejsinfeksjonstest
til påvisning
av nitritt i urinen

QuickTest Urinvejsinfektionstest Urinvejsinfektionstest, til påvisning af nitrit i urinen.



Udstyr til selvtestning

PRINCIP

Ved denne test anvendes en plastik strimmel, hvorpå der befinder sig et nitrit-reagensområde.
Testen kan indikere en urinvejsinfektion.

FORHOLDSREGLER

- Læs denne vejledning grundigt, før du udfører testen.
- Testen må ikke bruges efter udløbsdatoen.
 - Opbevares tørt ved 15-30°C.
 - Må ikke udsættes for direkte sollys.
 - Brug ikke testen, hvis folieposen er beskadiget.
 - Opbevares utilgængeligt for børn.
 - Til in vitro-diagnostisk brug. Ikke til indvortes brug.
 - Folieposen må først åbnes, når du er parat til at udføre testen.
 - Rør ikke reagensfeltet med fingrene.
 - Farveblinde kan ikke aflæse testen korrekt.

INDEHOLDER

Tre folieposer med hver 1 teststrimmel.
Et urinbæger.
Denne vejledning.

NØDVENDIGE MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER

Et ur.
Papir/køkkenrulle.

SÅDAN GØR DU

Opsaml morgenurinen, eller urin der har været i blæren mindst 4 timer, i en ren beholder. Hvis testen ikke kan gennemføres inden for en time efter urinprøven er taget, skal prøven omgående stilles i køleskab og opnå stuetemperatur igen før gennemførelse af testen.

Vigtigt: Urinprøven må kun anvendes én gang!

Tag teststrimlen ud af emballagen.

Nedsæk hele teststrimmels reagensområde i urinen, og tag den op med det samme igen, for at undgå frigivelse af reagenserne.

Stryk teststrimlen på kanten af urinbeholderen for at fjerne overflødig urin.

Strimlen holdes vandret med det samme, og teststrimlen lægges på et stykke papir/køkkenrulle, for at opsuge overskydende urin.

Resultatet aflæses efter 1 minut. For at opnå korrekte resultater er det ekstremt vigtigt at overholde test tiden. Teststrimlen kan smides ud efter aflæsning.

AFLÆSNING AF RESULTATET

Resultatet aflæses ved at sammenligne farven på teststrimlen med de farver, der er trykt på folieposen. Testresultatet kan farvemæssigt også ligge mellem de farvetoner, der er vist på folieposen. Formålet med de farvefelter, der er afbildet i denne brugsanvisning, er at illustrere testresultaterne. Farvefelterne hér er imidlertid ikke egnede til at foretage en farvesammenligning. Ved testresultater, der afviger fra normalværdierne, er lægebehandling nødvendig.

Normale testresultater udelukker dog ikke helt en urinvejsinfektion. Ved smerter eller anden begrundet mistanke om en sygdom, bør lægen kontaktes.

Nitrit i urinen er et tegn på en urinvejsinfektion.

Test	Normal	Afvigende værdier (Kontakt læge)
Nitrit	Negativ	Positiv (enhver rosafarvning)

QuickTest urinvejsinfeksjonstest Urinvejsinfeksjonstest til påvisning av nitritt i urinen



Til selvtest

VIRKEMÅTE

Som teststrimmel til urinalyse brukes en fast plaststrimmel med et nitritt-reagensområde.
Urinreagensteststrimmelen kan påvise en urinvejsinfeksjon.

FORHOLDSREGLER

- Les denne veiledningen grundig før du utfører testen.
- Testen må ikke brukes etter utløpsdatoen.
 - Oppbevares tørt ved 15-30°C.
 - Må ikke utsettes for direkte sollys.
 - Bruk ikke testen hvis folieposen er skadet.
 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 - Til in vitro-diagnostisk bruk. Ikke til innvortes bruk.
 - Folieposen må ikke åpnes før du er klar til å ta testen.
 - Hold ikke i reagensfeltet.
 - Fargeblinde personer kan ikke tolke testresultatene riktig.

INNEHOLDER

Tre folieposer med én teststrimmel hver.
Et urinbeger.
Denne veiledningen.

NØDVENDIGE HJELPEMIDLER SOM IKKE FØLGER MED

Et ur.
Papir/tørkerull.

SLIK GJØR DU

Samle opp morgenurinen eller urin som har vært i blæren i minst fire timer, i en ren beholder. Hvis testen ikke kan gjennomføres innen en time etter at urinprøven er avgitt, skal prøven straks settes kaldt og bringes til romtemperatur igjen før testen gjennomføres.

Viktig: Urinprøven må bare brukes én gang!

Ta teststrimmelen ut av emballasjen.

Senk hele teststrimmels reagensområde ned i urinen, og ta den opp med én gang for å unngå at reagensene frigis.

Stryk teststrimlen mot kanten av urinbeholderen for å fjerne overflødig urin.

Hold strimmelen vannrett og legg den på et tørkepapir for å suge opp overflødig urin.

Les av etter ett minutt. For å få optimale resultater er det meget viktig at testtiden overholdes. Teststrimmelen kan kastes når resultatet er avlest.

LESE AV RESULTATET

Resultatet finner du ved å sammenligne med fargefeltene som er trykt på folieposen. Testresultatene kan også ligge mellom de fargetonene som er vist på folieposen. Fargefeltene som er gjengitt i denne bruksanvisningen, er bare ment som et eksempel på hvordan testresultatene kan se ut, og egner seg ikke til fargesammenligning. Hvis testresultatene avviker fra normalverdiene, må du kontakte lege. Normale testresultater utelukker imidlertid ikke helt en sykdom. Ved smerter eller annen begrunnet mistanke om sykdom bør lege kontaktes.

Nitritt i urinen er et tegn på urinvejsinfeksjon.

Test	Normal	Avvikende verdier (Konsulter lege)
Nitritt	Negativ	Positiv (alle nyanser av rosa)

BEGRENSNINGER

Der forekommer normalt ikke nitrit i urin.
Ved urinvejsinfektion vil testen i de fleste tilfælde falde positivt ud og vise tydelige tegn på infektion, afhængig af, hvor lang tid urinen har opholdt sig blæren inden tømning.
Ved nitrit testen ligger andelen af konstaterede positive tilfælde mellem 40 % (i tilfælde med kort ophold i blæren) og op til ca. 80 % (i tilfælde med et ophold på 4 timer).
BEMÆRK: En svag farve konstateres bedre, hvis der er en hvid baggrund.
Ethvert rosa farvetrin skal fortolkes som et positivt testresultat, der tyder på en urinvejsinfektion. Der forekommer af og til infektioner af urinvejene som følge af organismer, der ikke producerer reduktase (enzym som omdanner nitrat til nitrit). Vær opmærksom på, at en negativ nitrit-test derfor IKKE helt udelukker, at der kan være tale om en urinvejsinfektion.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvad er det QuickTest Urinvejsinfektionstest måler?
Testen måler, om der er nitrit i urinen. De mest almindelige urinvejsinfektioner skyldes bakterier, der producerer et enzym (reduktase) der omdanner den nitrat, der altid findes i urinen, til nitrit. Nitrat er et stof, der dannes ved nedbrydningen af nogle af de mest almindelige fødevarer og derefter udskilles gennem nyrerne.

Hvorfor skal jeg bruge morgenurin?
For at være sikker på at eventuelle bakterier har haft tid til at omdanne nitrat til nitrit, skal urinen der testes helst have været i blæren i mindst 4 timer. Så med mindre du kan "holde dig" i mindst 4 timer, er det bedst at bruge morgenurin.

Er det alle bakterier, der danner nitrit?
Nej det er ikke alle bakterier, der danner nitrit. Men langt de fleste urinvejsinfektioner skyldes nitritdannende bakterier. Man kan altså godt have en urinvejsinfektion selv om testen er negativ, men der er kun nitrit i urinen, hvis der er bakterier tilstede.

Hvor sikker er testen?
Det er svært at sætte tal på, men det er samme type test, du får taget hos lægen. Hos lægen er der dog mulighed for at lave flere undersøgelser, hvorfor lægen kan stille en korrekt diagnose.

Hvis farvereaktionen er mørkere, betyder det at infektionen er kraftigere?
Nej det gør det ikke. En mørk farve betyder, at der er meget nitrit i urinen, men man kan ikke udlede noget om, hvor kraftig infektionen er. Selvfølgelig er det sådan, at hvis der er mange bakterier, vil de danne meget nitrit, men det er ikke den eneste årsag til en kraftig farvereaktion. Farvereaktionen afhænger blandt andet også af, hvor længe urinen har været i blæren og hvor meget man har drukket.

Hvis der ikke er nogen farvereaktion, er det så helt sikkert at jeg ikke har en urinvejsinfektion?
Nej, det er det ikke. En infektion kan også skyldes ikke nitrit-dannende bakterier.

BEGRENSNINGER

Det skal normalt ikke være nitrit i urin. Nitrittestområdet vil i enkelte tilfeller falde positivt ud og vise tydelige tegn på infektion, afhængig af hvor lang tid i forveien urinprøvene og dermed prøvetakingen ble utført i forhold til tømningen av blæren. Ved nitrit-testen ligger andelen av konstaterede positive tilfeller mellom 40 % i tilfeller med kort opphold i blæren og opptil ca. 80 % i tilfeller med et opphold på fire timer. MERK: Det er lettere å se en svak fargeforandring hvis du har en hvit bakgrunn.
Det er ingen sammenheng mellom styrken på rosa-/rødfargen og antall bakterier. All rosa-/rødfarge skal tolkes som et positivt nitrit-testresultat som tyder på forekomst av 105 eller flere organismer/ml. Det forekommer av og til urinveisinfeksjoner som følge av organismer som ikke inneholder reduktase, som omdanner nitrat til nitritt. Merk at en negativ nitrittest IKKE helt utelukker at det kan være snakk om en urinveisinfeksjon.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er det QuickTest urinveisinfeksjonstest måler?
Testen måler om det er nitritt i urinen. De vanligste urinveisinfeksjonene skyldes bakterier som inneholder et enzym (reduktase) som omdanner nitraten som alltid finnes i urinen, til nitritt. Nitrat er et stoff som dannes ved nedbrytning av de vanligste næringsmidlene og deretter skilles ut gjennom nyrerne.

Hvorfor må jeg bruke morgenurin?
For å være sikker på at eventuelle bakterier har hatt tid til å omdanne nitrat til nitritt, skal urinen som testes, ha vært i blæren i minst fire timer. Så med mindre du kan "holde deg" i minst fire timer, er det best å bruke morgenurin.

Danner alle bakterier nitritt?
Nei, ikke alle bakterier danner nitritt. Men de alle fleste urinveisinfeksjoner skyldes nitrittdannende bakterier. Man kan altså godt ha en urinveisinfeksjon selv om testen er negativ, men det er bare nitritt i urinen hvis det er bakterier til stede.

Hvor sikker er testen?
Det er vanskelig å tallfeste, men dette er samme type test som du får tatt hos legen. Legen kan imidlertid gjøre flere undersøkelser, slik at det kan stilles riktig diagnose.

Hvis fargereaksjonen er mørkere, betyr det at infeksjonen er kraftigere?
Nei, det gjør det ikke. En mørk farge betyr at det er mye nitritt i urinen, men man kan ikke trekke noen slutning om hvor kraftig infeksjonen er. Selvsagt vil flere bakterier danne mer nitritt, men det er ikke den eneste årsaken til en kraftig fargereaksjon. Fargereaksjonen avhenger blant annet også av hvor lenge urinen har vært i blæren, og hvor mye man har drukket.

Hvis det ikke er noen fargereaksjon, er det da helt sikkert at jeg ikke har en urinveisinfeksjon?
Nei, det er det ikke. En infeksjon kan også skyldes ikke-nitrittdannende bakterier.



Antal test pr. pakke
Tester per pakke



Lotnummer
Eränumero



Udløbsdato
Utløpsdato



Kun til in vitro-diagnostik
Bare til in vitro-diagnostikk



Producent
Produsent



Opbevares ved stuetemperatur 15°-30°C
Oppbevares ved romtemperatur 15°-30°C



Læs instruktionerne omhyggeligt,
før testen anvendes
OBS! Les instruksjonene før bruk



Til engangsbrug
Til engangsbruk

REF

TUP 1N-006H01N



Identifikation af bemyndiget organ
Identifikasjon av underrettet organ



MediGroup ApS
Kajerødgade 38
DK-3460 Birkerød
Tlf. 45 76 54 25
info@medigroup.dk