

# Opraclean®

## Brugsanvisning

### Sammensætning:

100 cm<sup>2</sup> imprægneret gazebind til tamponade indeholder: iodoform: 23 mg

100 cm<sup>2</sup> imprægneret tubegaze indeholder: iodoform: 28 mg

100 cm<sup>2</sup> imprægneret forbindsgaze indeholder: iodoform: 57 mg

Andre hjælpestoffer: bomuld, paraffinum liquidum

### Tilsigtet anvendelse:

Opraclean® forbindsstoffer (gazebind til tamponade med iodoform, tubegaze med iodoform, forbindsgaze med iodoform) anvendes til antiseptisk tamponade og dræn efter kirurgisk behandling af infektionen.

### Indikationer:

Opraclean® forbindsstoffer (gazebind til tamponade med iodoform, tubegaze med iodoform, forbindsgaze med iodoform) anvendes til kirurgisk infektionsbehandling af

- abscesser
- fistelrelaterede abscesser
- ulcera
- sårkaviteter og kropshulrum

### Kontraindikationer:

- overfølsomhed over for jod
- overfølsomhed over for et eller flere af hjælpestofferne i produktet
- overaktiv skjoldbruskkirtel
- graviditet
- tvungende indikation under amningen, spædbørn, nyfødte og små børn samt thyreoideadysfunktion, især ved gentagne anvendelser og anvendelser på store områder.

### Bivirkninger:

Allergiske reaktioner er mulige (se kontraindikationer). I enkelte tilfælde kan der ved store sår opstå forvirring, hallucinationer, bevidstløshed, opkast, feber eller hurtige hjerteslag med hjerterytmeforstyrrelser.

### Interaktioner:

Der skal tages højde for mulige interaktioner mellem Opraclean® forbindsstoffer og enzymatiske sårbehandlingsmidler.

### Dosering og anvendelsesmåde:

For så vidt andet ikke er ordineret, må Opraclean® forbindsstoffer med iodoform kun anvendes, udskiftes eller fjernes af lægen. Lægen fastlægger den mængde, der skal anvendes. Dog må den anvendte samlede mængde på 2 g iodoform pr. forbindsskift og pr. dag ikke overskrides. Primærpakningen (= aluminiumpose) åbnes på det markerede sted med en saks. Produktet er beregnet til engangsbrug. Opraclean® forbindsstoffer kan kombineres med produkterne Vliwaktiv® absorberende kompresser med aktivt kul, Vliwasorb® superabsorberende sårforbinding og Vliwazell® universalkompresser med høj absorptionsevne.

### Behandlingsvarighed:

Lægen fastlægger behandlingsvarigheden af Opraclean® forbindsstoffer. Den enkelte forbinding må generelt ikke sidde længere end 24 timer på sårområdet. Skift af Opraclean® forbindsstoffer er afhængig af indikation og sårets tilstand. Ved kontinuerlig anvendelse må bæretiden ikke overskride 30 dage.

### Sikkerhedsforholdsregler:

Såfremt emballagen allerede er åbnet eller beskadiget, må produktet ikke anvendes.

Især ved anvendelse på store områder må der ikke anlægges en okklusionsforbinding.

Hvis der anvendes større mængder (f.eks. i bughuler) kan det som følge af slægtskabet mellem iodoform og kloroform forekomme, at patienten får bedøvelseslignende symptomer. I et sådant tilfælde skal Opraclean® forbindsstoffer fjernes omgående. I tilfælde af allergiske reaktioner og førnævnte bivirkninger skal forbindsstoffet fjernes omgående.

Ved forekomst af bivirkninger skal lægen opsøges. De ovenfor nævnte bivirkninger forsvinder som regel i løbet af 3-8 uger efter afsluttet behandling og skal eventuelt behandles symptomatisk af lægen.

Produkterne skal opbevares utilgængeligt for børn! Når aluminiumsposen først er åbnet, skal Opraclean® forbindsstofferne opbruges med det samme. Opraclean® forbindsstoffer er ikke sterile og må ikke steriliseres.

### Bemærk:

Som følge af iodoforms evne til omkrystallisering kan der i enkelte tilfælde under opbevaringen (efter ca. 1-2 år) dannes små skinnende krystaller