

 Brugsanvisning. Venligst læs omhyggeligt før brug.



# Sikkerhed for tandprotesen med **Protefix®**

## **Protefix® Aktiv Rensetabletter**

**Protefix® Aktiv Rensetabletter har en antibakteriel effekt, fjerner plak og op til 99,99% af bakterier.**

\* (iflg. DIN EN 13727)

Omhyggelig mundhygiejne er nødvendig for at fjerne madrester, der lægger sig på tandprotesen på samme måde som på naturlige tænder. Hvis madrester kommer under tandprotesen, kan de give anledning til smertefulde inflammationer, da den naturlige mundflora forstyrres, mens tandprotesen bæres, og det er umuligt for mundhulen at rense sig helt. Så i dette tilfælde skal De ikke kun stole på Deres tandbørste, men snarere på en god rensetablet. **Protefix® Aktiv Rensetabletter** er særlig effektiv i dette tilfælde, da tablettens både har en fremragende rengøringsevne og en stærk deodoriserende virkning. På grund af sin sammensætning har **Protefix® Aktiv Rensetabletter** tilstrækkelig aktiv ilt til at rengøre protesen uafhængigt, grundigt og hurtigt, uden at angribe protese materialet.

### **Dosering og anvendelsesmåde:**

Opløs en **Protefix® Aktiv Rensetablet** i et glas med lunkent vand (100 ml, ca. 35 °C) og læg tandprotesen eller tandbøjlen i glasset. Tandprotesen eller tandbøjlen skal være helt dækket af opløsningen. Ren og frisk på 3 minutter, desinficeret på 10 minutter. Protesen kan også renses natten over. Tag tandprotesen op af vandet og skyld grundigt under rindende vand før De atter placere den i munden.

**⚠ Advarsel:** Tabletter eller opløsning må ikke tages i munden, drikkes, eller bruges som mundskyld. Rør ikke ved mund eller øjne efter håndtering af tabletter eller opløsning.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Vask hænder grundigt efter brug.

Opbevares utilgængeligt for børn og andre, som er i fare for at sluge tabletterne eller opløsningen ved et uheld. Opbevares køligt og tørt. Opbevares ved temperatur under 30 °C.

### **Førstehjælps forholdregler:**


**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

**I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:** Ring omgående til GIFTLINJEN (Telefon 82 12 12 12) eller en læge. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Vask påvirket hud grundigt.

**Ingredienser:** Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

Denne indlægsseddel blev senest opdateret i november 2020.

Medicinsk udstyr

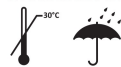

**CE**  
0483



 **Fabrikant:**

bmp production gmbh  
Neuhofen Weiche 48  
19370 Parchim  
Tyskland

**Distributor:**



**Queisser**  
PHARMA

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg, Germany  
www.protefix.dk

**Distributør i Danmark:**

MaxiPharma A/S  
Søren Nymarks Vej 25  
DK-8270 Højbjerg  
www.maxipharma.dk  
V. Nr. 223991

90729715 DK

Leiðbeiningar. Lesið  
vandlega fyrir notkun.



## Öryggi fyrir gervitennur **Protefix®**

### **Protefix® Active Cleanser**

**Protefix® Active Cleanser** hefur bakteríuhamlandi virkni, fjarlægir óhreinindi og 99,99% af bacteríum.

\*(samkvæmt DIN EN 13727)

Vönduð munnhreinsun er mikilvæg til að fjarlægja matarafgangna sem festast á gervitennur eins og á náttúrulegar tennur. Ef matarleifar komast undir gervitennur, getur það valdið þjáningu og bólgum í munnholi. Náttúruleg munnflóra nær ekki að hreinsa fullkomlega munnholið þar sem gervigómur er í notkun. Í þessum tilfellum skal ekki treysta aðeins á tannbusta heldur líka nota góðar hreinsitöflur. **Protefix® Active Cleanser** eru sérstaklega áhrifaríkar í þessum tilfellum, þær hafa mjög góða virkni í hreinsun og frískandi eiginleika. Með efnablöndunni í **Protefix® Active Cleanser** er nægilegt virkt súrefni til að hreinsa gervitennurnar sjálfstætt, vandlega og hratt, án þess að skaða efni gervitannanna.

#### **Skammtar og notkunarmáti:**

Leysið upp eina **Protefix® Active Cleanser** hreinsitöflu í glasi af volgu vatni (100 ml, umþb. 35°C) og setjið gervitennunna eða tannpartinn strax ofan í ílát. Gervitennunna/tannparturinn ætti að vera alveg þakinn af hreinsilaunsninni. Hreinsast og frískast á 3 mínútum. Sótthreinsast á 10 mínútum. Hreinsast einnig í vökva yfir nótt. Skolið vel undir rennandi vatni áður en sett er í munn.

#### **⚠ Athugið eftirfarandi mkilvæg ráð:**

Ekki setja töflur í munn.

Ekki drekka hreinsilausnina.

Forðist snerting við augu.

Veldur alvarlegri ertingu í augum.

Þvoðu hendur vandlega eftir meðhöndlun

Geymið þar sem börn og einstaklingar geta ekki gleypt töflu eða hreinsilausn fyrir slysn.

Geymið á köldum og þurrum stað.

Geymið við hitastig undir 30°C.

#### **Skyndihjálp**

Augu: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur.

Fjarlægðu línur sem auðvelt er að losa. Haltu áfram að skola. Ef erting í augum er viðvarandi; hafðu samband við lækni.


VIÐ INNTÖKU: Hafið samband við lækni. Skolið munninn. Ekki framkalla uppköst. Ef erting í húð kemur fram: Leitaðu lækni. Þvoðu erta húð vandlega.

#### **Innihaldslýsing:**

Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

Dagsetning endurskoðunar texta: 11/2020

Lækningatæki

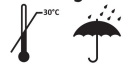

CE  
0483



Fabrikant:

bmp production gmbh  
Neuhofen Weiche 48  
19370 Parchim  
Tyskland

Distributor:



Queisser  
PHARMA

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg, Germany  
www.protefix.dk

Distributør i Danmark:

MaxiPharma A/S  
Søren Nymarks Vej 25  
DK-8270 Højbjerg  
www.maxipharma.dk  
V. Nr. 223991

90729715.DK