



C DK: 80 25 16 27

GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

Trade marks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor

180.0

KIINNITYS: paina

päät alas ja hiero

kevyesti teipin

PÅFØRING: Tryl

enderne ned og

gnid forsigtigt for at sætte dem

3 kiinnittämise

65_ 8.0 0.

Alkuperäinen vaaleanruskea, läpinäkyvä & mentoli

ASETUS: poista suoja ja

aseta teippi nenälle.

Kuinka Breathe Right -teippi toimii?

Lääkkeettömät Breathe Right -nenäteipit on kliinisesti testattu avaavan nenän tiehyet välittömästi, niin että voit hengittää helpommin. Breathe Right -nenäteipeissä

käytetään joustavaa jousenmuotoista teippiä, joka kohottaa ja aukaisee nenän tiehyitä hellävaraisesti mahdollistaen

. Breathe Right -nenäteippejä voi käyttää päivällä tai yöllä allergiasta tai vilustumisesta johtuvaan tukkoisuuteen.

Original Hudfarvet, Transparent & Menthol.

Korrekt placering giver dig den bedste effekt.

Hvordan virker Breathe Right?

Det er klinisk bevist at Breathe Right næsestrips straks åbner næsen så du lettere kan trække vejret. Breathe Right næsestrips bruger fleksible fjederlignende bånd for at løfte og forsigtigt åbne næsen så luften bedre kan passere.

Breathe Right næsestrips kan

bruges dag og nat for at afhjælpe tilstoppet næse pga.

allergi eller forkølelse.

PLACERING: Fjern

klæbestrimlen og sæt

strippen på næsen.

paremman ilmavirtauksen.

RENSNING: Vask og tør

sen og fjern snavs o fedt. (Brug et

ved fedtet hud

Laastarin asettaminen oikeaan kohtaan varmistaa, että saat

8.0

PUHDISTUS: pese ja

kuivaa nenä poistaakse Lian ja rasvan nenälläs

selle iholle, käytä

5.0

Paras menetelmä teipin irrottamiseen:

välltääksesi ihon ärsyyntyminen tai vaurioituminen.

raaputa toistamiseen vapauttaaksesi uudelleen.

Den bedste måde at fjerne strippen:

For bedste resultat med mentolstrips:

vand for at modvirke hudreaktioner eller sår.

Fjern Breathe Right næsestrips med varmt vand mens du vasker dit ansigt

derefter strippen langsomt fra begge sider. Fjern strippen omhyggeligt med

Breathe Right mentol/ mentolholdige strips er overtrukket med kapsler, der

<mark>indeholder mentol, euka</mark>lyptus og kamfer. Sæt på næsen. Gnid på overfladen

for at frigive de lindrende mentolholdige dampe - gnid igen for at aktivere igen.

må kun bruges én gang. Opbevares utilgængeligt for børn. Ikke til børn under 5 år.

Bivirkninger: Overfølsomhedsreaktioner inkl. udslæt, kløe og hævelse. Reaktioner

Søvnapnø: Breathe Right næsestrips er ikke beregnet til behandling af søvnapnø.

Forsigtig: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes på sår, solskoldninger eller irriteret hud. Må ikke anvendes i mere end 12 timer pr. dag. Engangsbrug – hver strip

> på applikationsstedet (f. eks. rødmen, irritation, smerter eller afskalning). Overfølsomhed over for latex eller Breathe Right næsestrips.

Forsiglig: Emballagen indeholder naturgummilatex, som kan forårsage

CE

Stop anvendelsen, hvis der opstår udslæt eller hudirritation.

Personer med symptomer på søvnapnø bør søge læge.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

allergiske reaktioner.

L705003/04 31044697

DK-2605 Brøndby

FI-02231 Espoo

5.0

eller når du tager brusebad. Fjern altid strippen langsomt. Løsn enderne og løft

Parhaat tulokset mentoliteipeillä:

allergisia reaktioita.

L705003/04 31044697

DK-2605 Brøndby

FI-02231 Espoo

poista Breathe Right -nenäteippi pestessäsi kasvot lämpimällä vedellä

nosta varovasti kummaltakin puolelta. Poista teippi huolellisesti vedellä

tai olessasi suihkussa. Irrota teippi aina hitaasti. Irrota teipin päät ja

Breathe Right Menthol -nenäteipit on päällystetty mentolia,

eukalyptusta ja kamferia sisältävillä kapseleilla. Aseta nenälle.

Raaputa pintaa vapauttaaksesi helpottavat mentolipitoiset höyryt-

Huom.: Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä haavaumille, auringon polttamalle tai ärsyyntyneelle iholle. Ei saa käyttää yli 12 tuntia vuorokaudessa. Kertakäyttöinen. Ei lasten ulottuville. Ei alle 5-vuotiaille lapsille.

Haittavaikutukset: Yliherkkyysreaktiot kuten ihottuma, kutiaminen ja turpoaminen. Käyttökohdan reaktiot (esim. punotus, ärsyyntyminen, kipu tai hitseily). Ytiherkkyys luonnonkumille tai Breathe Right-nenäteipeille. Jos esiintyy ihottumaa tai ihon ärsyyntymistä, lopeta Breathe Right-nenäteipin käyttö.

Uniapnea: Breathe Right-nenäteipit eivät ole tarkoitettu uniapnean hoitoon. Henkilöiden, joilla esiintyy uniapnean oireita, tulee kysyä neuvoa lääkäriltään.

Huom.: tämän tuotteen pakkaus sisältää luonnonkumia, joka voi aiheuttaa

FI: 0800 77 40 80 Jälleenmyyjä: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

■ scanda.consumer-relations@gsk.com

Trade marks owned or licensed by GSK, @2018 GSK or licensor

GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

5.0

3.0

0

5

5.0

30.0

Order – AWF	AWF: 30226 - OTDC: 500552				
Reference	BREATHE RIGHT NASAL STRIP CLEAR 1X30 FI_942417_PIL				
Format	180 x 235 mm				
Pharma code	65				
Colour	Cyan - Magenta - Yellow - Black - P 282 C				
Font	Arial - Helvetica Neue LT Pro - Helvetica - OCRB - Uni Sans				
Font min. size	6 pts				
Reference MKT					
Production site	Famar Greece 48km – GR				
Reference SITE	31044697				
Pre-press	SGS US - se, se - DO-18-E1678 - 17.09.2018 - F39				
WARNING: Wrong display / print > switch overprint ON					

L705D002 02





Approvals

Version:			

Name	ID	Туре	Reason for Signature	Date