

Metalline®

da I Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:

Metalline® produkter er lavet af fleece og viskose med pådampet aluminium på den side, der vender mod såret. Der opstår derved et glat sårkontaktlag, som minimerer risikoen for, at forbindsstykket klæber fast på såret. Vha. et atraumatisk forbindsskift påvirkes helingsforløbet positivt. Aluminiumsoverfladens porøsitet har en gunstig effekt på hurtig opsugning af sårekssudat i Metalline® produktet. Til store sårflader fås ligeledes store stykker Metalline® produkter til at lægge over eller under såret.

De sterile Metalline® produkter er emballeret enkeltvis og steriliseret ved stråling. Metalline® produkter er beregnet til engangsbrug og må ikke resteriliseres. Produktet er sterilt, så længe emballagen er uåbnet og ubeskadiget. De usterile

produkter skal steriliseres før brug (Metalline® kompresser, på rulle: EN ISO 11135, EN ISO 11137;

Metalline® klæde:

EN ISO 11135, EN ISO 11137, EN ISO 17665).

Produktsammensætning:

Kompres, klæde, lagen: Viskose, acrylat bindemiddel, aluminium

Forbindsstykke: Viskose, acrylat bindemiddel, aluminium, polyester

Indikationer:

Metalline® kompresser er egnet til dækning af enhver form for sår. Anbefales især til forbrændinger, ætsninger, operationssår og Første Hjælp.

Metalline® forbindsstykke er egnet til at behandle store sårflader, læsioner, også i akutte situationer.

Metalline® lagen skal anvendes som underlag ved åben behandling af forbrændinger, ætsninger og skrabsår med store overflader.

Metalline® klædet skal anvendes som underlag eller afdækning af store sårflader efter sterilisering af de påkrævede områder.

Kontraindikationer:

Kendt overfølsomhed over for produktet eller dets indholdsstoffer.

Bivirkninger:

I sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer eller allergier.

Anvendelse:

Rengør såret som sædvanlig, inden der lægges en ny forbindelse (f.eks. med steril saltvandsopløsning, Ringers væske) og

dup sårkanterne tørre.

Metalline® kompresser:

1. Ikke-sterile Metalline® kompresser skal steriliseres før brug.

2. Læg Metalline® kompressen på med aluminiumssiden mod såret.

3. Sårforbinding skal fikseres med et egnet materiale (fikseringsplaster, f.eks. Curafix® H, elastisk fikseringsbind, f.eks.

Mollelast®).

Metalline® forbindsstykke:

1. Forbindsstykket foldes ud, og der tages fat om båndene.
2. Læg aluminiumssiden på såret og bind en knude med båndene.

Metalline® klæde:

1. Skær det stykke af rullen, som du har brug for og sterilisér det før brug.
2. Læg et materiale med stor sugsevne, f.eks. Disposima®, på madrassen. Læg Metalline® klædet over (med aluminiumssiden mod såret) og læg patienten på sengen, der er tildækket med Metalline®.

Metalline® lagen:

1. Fold lagenet forsigtigt ud og læg det på madrassen (med aluminiumssiden mod såret).
2. Læg patienten på sengen, der er tildækket med Metalline®.

Udskift forbindningen eller underlaget:

Intervallerne for udskiftning af Metalline® kompres, Metalline® forbindsstykke, Metalline® lagen eller Metalline® klæde

afgøres af den behandlende læge på basis af sårets tilstand (ekssudationsgrad osv.).

Bemærk:

Der foreligger ingen erfaringer om anvendelse i forbindelse med en radiologisk undersøgelse (MR-scanning).

Ved elektroniske målinger skal man undgå, at produkterne får kontakt med elektroder eller ledende ge