

Repadina® plus

vagitorier


DANSK

INDIKATIONER

Repadina® Plus medvirker til genopbygning af atrofisk og dystrofisk vaginalslimhinde. Anvendes mod vaginal tørhed, blandt andet som følge af nedsat eller ophørt østrogenproduktion. Fremmer helingen efter fødsel, efter gynækologiske indgreb, ved skader som følge af kemoterapi og strålebehandling.

ANVENDELSE

Vagitoriet udtages ved at trække de to sider på blisterpakningen fra hinanden, hvorefter det indføres forsigtigt i skeden. Vask hænder før og efter brug af det medicinske udstyr.

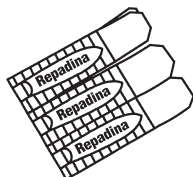

DOSERING

Brug en vagitorie om dagen, fortrinsvis om aftenen inden sengetid, eller i henhold til ordineringen. Behandlingens varighed afhænger af, hvordan symptomerne udvikler sig. Repadina® Plus vagitorier kan anvendes i lange perioder hvis det er nødvendigt for at forbedre disse.

INHOLDSTOFFER

Hyaluronsyre 10 mg, semisyntetiske glycerider, sød mandelolie, pentaerytrityl-tetra-di-tert-butylhydroxy-hydrocinnamat.

PAKNING

Repadina® Plus fås i form af vagitorier til indføring i skeden. Pakken indeholder 10 vagitorier à 2 g.


NORSK

INDIKASJONER

Repadina® Plus medvirker til gjenoppbygging av atrofisk og dystrofisk vaginalslimhinne. Brukes mot vaginal tørrhet, blant annet som følge av nedsatt eller opphørt østrogenproduksjon. Fremmer tilheling etter fødsel, etter gynekologisk kirurgi, ved skader som følge av kjemoterapi og strålebehandling.

ANVENDELSE

Vagitorien tas ut ved å trekke de to flikene på blisterpakningen fra hverandre, og føres deretter forsiktig inn i skjeden. Vask hendene før og etter bruk av det medisinske udstyret.

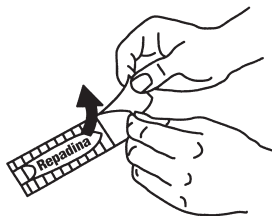

DOSERING

Bruk én vagitorie daglig, helst om kvelden før leggetid, eller i henhold til foreskrivelsen. Behandlingens varighet avhenger av hvordan symptomene utvikler seg. Repadina® Plus vagitorier kan brukes selv i lange perioder, om det er nødvendig for å forbedre symptomene.

INNOLDSTOFFER

Hyaluronsyre 10 mg, semisyntetiske glycerider, søt mandelolje, pentaerytrityl-tetra-di-tert-butylhydroksihydrocinnamat.

PAKNING

Repadina® Plus leveres som av vagitorier til innføring i skjeden. Pakken inneholder 10 vagitorier à 2 g.

BRUG IKKE REPADINA® PLUS

Må ikke anvendes i tilfælde af individuel overfølsomhed over for et af produktets komponenter.

GRAVIDITET OG AMNING:

I sådanne tilfælde er det nødvendigt at kontakte lægen.

TRAFIK OG ARBEJDS SIKKERHED

Der er ingen særlige forholdsregler.

BRUG AF ANDRE PRODUKTER

Det er ukendt om der er interaktion med andre produkter, derfor anbefales det, at du spørger din læge før brugen af Repadina® Plus vagitorier, samtidig med at andet medicinsk udstyr eller lægemidler til vaginalt brug anvendes.

BIVIRKNINGER

Langvarig brug af produkter, som virker lokalt, kan medføre overfølsomhed. I sådanne tilfælde skal du afbryde behandlingen og kontakte lægen for at få den rette behandling. Hvis der opstår andre bivirkninger, skal du informere din læge eller dit apotek.

ADVARSEL

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjnene. Må ikke synkes.

HOLDBARHED, OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Udløbsdatoen henviser til produktet i en intakt og korrekt opbevaret pakke. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, eller hvis pakken er åben eller beskadiget. Bør opbevares ved temperatur mellem 4 °C - 25 °C, og ikke i direkte sollys eller tæt ved andre varmekilder. Medicinsk udstyr bør ikke bortskaffes via spillevand eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket hvordan ikke anvendt medicinsk udstyr afskaffes. Dette vil hjælpe med at beskytte miljøet.

MEDICINSK UDSTYR  **0373**

KONTRAINDIKASJON

Skal ikke brukes i tilfelle individuell hypersensitivitet overfor én av innholdsstoffene i produktet.

GRAVIDITET OG AMNING

I slike omstendigheter er det nødvendig å ta kontakt med legen.

TRAFIKK OG ARBEIDSSIKKERHET

Det er ingen spesielle forholdsregler.

INTERAKSJONER MED ANDRE PRODUKTER

Interaksjoner med andre produkter er ikke kjent. Det anbefales derfor å konsultere med lege før man anvender Repadina Plus vagitorier ved samtidig bruk av annet medisinsk utstyr eller legemidler for vaginalt bruk.

BIVIRKNINGER

Særlig langvarig bruk av produkter som virker lokalt, kan gi overfølsomhetsreaksjoner. Om det skjer, må behandlingen stoppes. Kontakt lege for å få nødvendig behandling. Hvis andre bivirkninger oppstår, kontakt lege eller apotek.

FORSIKTIGHETSREGLER

Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øynene. Må ikke svelges.

HOLDBARHET, OPPBEVARING OG AVFALLSSORTERING

Utløbsdatoen henviser til produktet i en intakt og riktig oppbevart pakning. Skal ikke brukes etter utløbsdatoen eller hvis pakningen er åpen eller skadet. Bør oppbevares ved temperatur mellom 4 °C - 25 °C og ikke i direkte sollys eller nær andre varmekilder. Medisinsk utstyr skal ikke kastes via utslagsvasken eller som husholdningsavfall. Spør ditt apotek hvordan man trygt kan kaste medisinsk utstyr som ikke benyttes. Dette bidrar til å beskytte miljøet.

MEDISINSK UTSTYR  **0373**



Fabrikant: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 - 40010 Sala Bolognese (BO) - ITALY

Distributør for Danmark:
AZANTA DANMARK A/S

Gearhalsevej 1, ground floor, 2500 Valby, Denmark

Distributør for Norge:
AZANTA AS

Postboks 39, 0617 Oslo, Norge