

# VAXOL®

## Ørespray / Öronspray / Korvasuihke

**DK**

Vaxol® er en nem og effektiv metode til at blødgøre og fjerne ørevoks, helt naturligt. Begrænser behovet for og gør eventuel øreskyllning lettere.

Det er klinisk bevist, at olivenolie fugter tør hud og derved reducerer kløe og irritation.

Vaxol® kan anvendes af voksne og børn over 1 år.

Vaxol® har et enkelt og patenteret doseringssystem, der gør det let at dosere den korrekte dosis ind i øregangen. Vaxol® skal anvendes, når du sidder eller står.

Læs denne brugsanvisning før brug.

### FØR BRUG AF EN NY FLASKE VAXOL® SPRAY

Inden en flaske Vaxol® tages i brug, bør flasken varmes i hånden og omrystes. Spray derefter 3-4 gange ud i luften, indtil du får en jævn spraystråle (se billede B). Vaxol® er nu klar til brug.

### BRUGSANVISNING

- Vaxol® er mest effektiv, når flasken er varmet i hånden og omrystet før brug.
- Anvendes 1-2 gange om ugen for at forebygge vokspropper, eller som anvist af lægen / sygeplejersken.
- Hvis medicinsk øreskyllning er nødvendigt (voksprop), spray 1-2 doser Vaxol® to gange dagligt i 4-5 dage før besøg hos lægen. Hvis lægen har anvist anden dosering, følges denne.
- Ved kløe og irritation i tørre øregange spray 1-2 gange om ugen. Hvis lægen har anvist anden dosering, følges denne.
- Træk forsigtigt det ydre øre opad og bagud (se billede A).
- Hold flasken lodret med dysen placeret i øregangen. Tryk spraypumpen i bund 1-2 gange (se billede B).

**NO**

Vaxol® er en enkel, effektiv og naturlig måte for å mykgjøre og fjerne ørevoks. Den reduserer behovet for øreskylling, og kan også gjøre øreskylling lettere når det er nødvendig. Det er klinisk bevist at olivenolje gir fuktighet til tørr hud og dermed minsker kløe og irritasjon.

Vaxol® kan benyttes av voksne og barn over 1 år.

Vaxol® har et enkelt og patentert doseringssystem som gjør det lett å dosere den riktige mengden inn i det ytre øret. Vaxol® kan benyttes sittende eller stående.

Les bipakkseddel før bruk.

### FØR DU BRUKER EN NY FLASKE VAXOL® ØRESPRAY

Før du tar i bruk Vaxol® ørespray anbefales det at flasken varmes i hånden og ristes godt. Spray 3-4 ganger ut i luften til du får et jevnt trykk (figur B). Vaxol® er nå klar til bruk.

### BRUKSANVISNING

- Vaxol® har best effekt når den er blitt varmet i hånden og ristet godt.
- Brukes 1 - 2 ganger i uken for å forebygge vokspropp eller bruk Vaxol® som anvist av din lege/sykepleier.
- Hvis medisinsk øreskylling er nødvendig (vokspropp), spray 1-2 doser Vaxol® 2 ganger daglig i 4-5 dager, eller som ordinert før besøk hos lege/sykepleier.
- Ved kløe og irritasjon i tørre øreganger spray 1-2 ganger i uken, eller som ordinert av lege/sykepleier.
- Dra forsiktig den øvre delen av det ytre øret opp og bakover (se figur A).
- Hold flasken loddrett med doseringspipen plassert i øregangen. Trykk pumpen ned 1-2 ganger (se figur B).
- Masser forsiktig ved åpning til ytre øregang/tragus (se figur A).
- Gjenta prosedyren i det andre øret ved behov.
- Ikke skyll øret etter sprayning.
- Det hvite spraymunnstykket kan ved behov taes av og skylles i varmt vann etter bruk. Sett deretter tilbake munnstykket på flasken.

- Massér forsigtigt på åbningen til øregangen (se billede A).
- Gentag, efter behov, samme procedure i det andet øre.
- Skyl ikke øret efter sprayning.
- Det hvite sprayhoved kan ved behov aftages og skylles i varmt vand efter brug. Sæt derefter sprayhovedet tilbage på flasken.

### YDERLIGERE INFORMATION

- Patienter med perforeret trommehinde eller ørepine bør kun bruge Vaxol® efter aftale med læge.
- Vaxol® bør kun anvendes til børn under 1 år efter aftale med læge.
- Olivenolie er et naturligt produkt med meget udbredt brug. Der er ikke rapporteret om bivirkninger ved brug af Vaxol® eller interaktioner med andre produkter. Dog bør produktet ikke anvendes, hvis man har en kendt overfølsomhed eller allergi over for olivenolie.
- Der er ingen kendte skadelige bivirkninger ved at bruge Vaxol® i graviditeten og/eller ved amning. Det anbefales dog at informere lægen om, at du anvender Vaxol®.
- Der er ingen kendte bivirkninger ved at overdosere Vaxol®.
- Hvis der er mistanke om en allergisk reaktion, bør brugen af Vaxol® stoppes og lægen informeres.

### ADVARSLER

- Vaxol® er kun beregnet til personlig brug.
- Opbevar altid Vaxol® i lodret position ved normal stuetemperatur.
- Vaxol® er holdbar i 6 måneder efter sprayflasken er taget i brug.
- Spray ikke i nærheden af åben ild.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Produktet er kun til brug i øregangen. Spray ikke i nærheden af øjne, næse eller mund.

### YTTERLIGERE INFORMASJON

- Pasienter med perforert trommehinne eller smerter i ørene bør kun bruke Vaxol® etter råd fra lege.
- Vaxol® skal ikke benyttes av barn under 1 år uten samråd fra lege.
- Olivenolje er et naturlig produkt med meget utbredt bruk. Det er ikke rapportert om bivirkninger ved bruk av Vaxol® eller om interaksjoner med andre produkter. Vaxol® skal ikke benyttes ved kjent overfølsomhet eller allergi overfor olivenolje.
- Det finnes ingen kjente skadelige bivirkninger ved bruk av Vaxol® under graviditet eller amming. Det anbefales at du informerer din lege om at du benytter Vaxol®.
- Det finnes ingen kjente bivirkninger ved overdosering av Vaxol®.
- Ved mistanke om en allergisk reaksjon, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes umiddelbart.

### ADVARSLER

- Vaxol® er anbefalt for personlig bruk.
- Oppbevar alltid Vaxol® i loddrett posisjon i normal romtemperatur.
- Vaxol® er holdbar i 6 måneder etter at sprayflasken er åpnet.
- Spray ikke i nærheten av åpen ild
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet er kun til bruk i øregangen. Spray ikke i nærheten av øyne, nese eller munn.

