

Inter Line Import Export ApS

Brugsanvisning for Kinesiologitape version 2, november 2025

Benyt Kinesiologitape, blandt andet for at:

- Forbedre lymfesystemet /tonnagen
- Optimere cirkulationen i vævet
- Afspænde muskler
- Forbedre aktivering af muskler
- Stabilisere led
- Lindre smerter
- Benytte den mindste form for bandage
- Støtte led og ligamenter
- Forebygge, behandle og genoptræne skader

Når kinesiologitapen bruges til at behandle beskadigede muskler, lægges den, uden at tapen strækkes. Derimod strækkes huden/ muskler/led på området, inden påsætning af tapen, hvor man ønsker at behandlingen skal virke. På denne måde "rynker" huden efter monteringen af tapen, hvilket betyder at blod- og lymfegennemstrømningen speedes op under huden, på det valgte område.

Hvis formålet er at støtte beskadigede led og ledbånd, strækkes tapen i stedet, inden den påføres på huden. På den måde hjælper tapen kroppen med at korrigere led og ledbånd.

Behandlingsresultatet afhænger af korrekt monteringen af tapen.

Anvendelse:

1. Brug vand eller alkohol til at rense huden på det område, der skal behandles
2. Tapen skal monteres på tør og ren hud for at kunne hæfte bedst muligt. Fjern håret, på området for optapningen.
3. Sørg for at tapen lægges glat og uden folder
4. Tapen bør monteres ca. 15 til 30 min. før fysisk aktivitet
5. Test tapen, når den er lagt, om den har den ønskede effekt. Læg en ny hvis der er nogen former for komplikationer
6. Følg monteringsvejledningen i forhold til område og ønsket behandling
7. Produktet er kun til korttids brug
8. Produktet kan kun strækkes i længderetningen
9. Dette produkt er kategoriseret som medicinsk udstyr, klasse 1.
10. Dette produkt kan ikke bruges i et sterilt kirurgisk operationsmiljø.

VIGTIGT!

Hvis der er sket en alvorlig hændelse i forbindelse med enheden, så rapportér venligst til producenten og den kompetente myndighed i dit område, hvor brugeren og/eller patienten er bosat. Søg straks læge.

1. Brug ikke tapen på irriteret, inficeret eller rødmende hud, på sår eller inficerede sår
2. I tilfælde af kendte allergier, test et stykke tape før brug. Påfør et lille stykke af det, på huden, i nogle timer
3. I tilfælde af irritation og rødme, stop da med at bruge tapen
4. Kontakt din læge først, hvis du er i tvivl om brugen af tapen, eller følgevirkninger af denne
5. Opbevares utilgængeligt for børn
6. Hvis du er gravid, skal du kontakte din læge, før du bruger tapen
7. Påfør tapen med det rette stræk, for at undgå ubehag
8. Påfør ikke cirkulært for at undgå en tourniquet-effekt
9. Anbefales ikke til brug i ansigtet
10. Kan benyttes over alt på kroppen
11. Vær opmærksom på at sart og tynd hud kan lade sig irritere ved brug/ved lang tids brug/ved påførsel med højt stræk
12. Overhold nøje brugsanvisningen
13. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen
14. Brug ikke et beskadiget produkt.

Opbevaring:

Produktet skal generelt opbevares på et rent, køligt, tørt og ventileret sted (rumtemperatur: 5 °C ~ 35 °C, luftfugtighed: 35 % ~ 75 %)

Holdbarhed:

Mindst 2 år. Se salgspakke for produktionsdato for produktet.

Leveres i 4 farver:

Blå, sort, beige og pink

Mål:

5cm x 10 meter

Tapemateriale:

Bomuld 93,5%

Polyurethan 6,5%

Klæbemateriale:

Akryl copolymer



Inter Line Import Export ApS,
Stillingvej 107 8471 Sabro Danmark