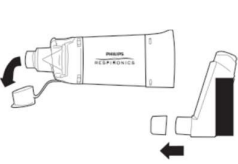
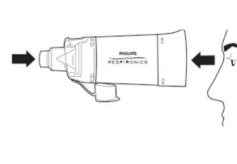
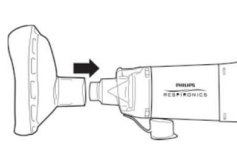
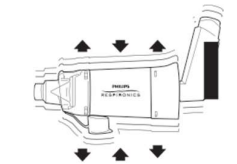

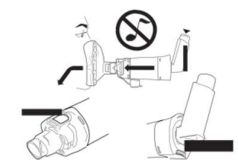


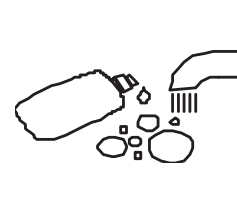
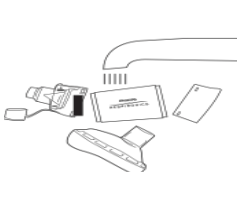
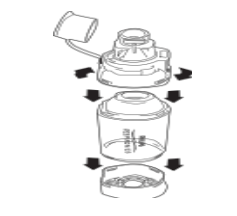



<p>OptiChamber Diamond OptiChamber Diamond antistatisk kammer med ventil</p> 					
<p>Brugsanvisning</p> <p>Kun til brug på en enkelt patient.</p> <p>Denne anordning kan tages i brug umiddelbart efter udpakning. Læs både disse anvisninger og anvisningerne for inhalatoren (pMDI, Pressurized Metered Dose Inhaler) inden brug. Følg altid din læges anvisninger.</p>	<p>Fjern hætteerne både på inhalatoren og mundstykket</p>	<p>Efterse anordningen for beskadigelse og manglende dele før brug. Fjern fremmedlegemer eller snavs fra anordningen og den valgfrie maske. Brug ikke anordningen, hvis der er beskadigede eller manglende dele. Henvend dig til Philips Respironics kundeservice, hvis du har nogen spørgsmål eller har behov for at udskifte OptiChamber Diamond.</p>	<p>Når du bruger OptiChamber Diamond med en LiteTouch maske, så placer masken på mundstykkets ende og drej forsigtigt, indtil den sidder godt fast.</p>	<p>Sæt inhalatoren godt ind i den fleksible åbning på endehætten (adapteren), og ryst hele samlingen iht. inhalatorens anvisning.</p>	<p>Put læberne omkring mundstykket, og hold dem tæt. Udlos inhalatoren, og begynd langsomt at trække vejret 5-6 gange. Træk vejret langsomt ind, hvis inhaleringsflow-alarmer høres for optimal deponering.</p> <p>Hvis du bruger maske, så hold masken tæt og fast op imod ansigtet, så den er tæt. Hvis yderligere doser er blevet ordineret af din læge, så tag ovenstående procedure efter behov. (6A) Dæk ikke udåndningsventilen, mens du bruger anordningen. (6B) Bloker ikke for inhaleringsflowalarmer under brug. (6C)</p>
					
<p>Rengøringsvejledning</p> <p>Det anbefales, at OptiChamber Diamond VHC'en og den evt. anvendte maske vaskes en gang om ugen. Forsigtig: Pas på ikke at fjerne eller beskadige ventilerne fra OptiChamber Diamond VHC under rengøringen. Må kun gøres ren iht. anvisningerne. Må ikke steriliseres eller koges.</p>	<p>Tag den beskyttende hætte af. (A) Fjern endehætten. (B) Hvis du bruger en maske, så fjern masken.</p>	<p>Drej på mundstykket for at skille den ad.</p>	<p>Anordningen: Delene bevæges kraftigt omkring i varmt sæbevand tilsat flydende vaskemiddel i et minut. Lad delene ligge i blød i mindst 10 minutter. Masken: Bevæges kraftigt omkring i varmt sæbevand i 2 minutter, eller sættes i blød i 10 minutter.</p>	<p>Skyl anordningen og masken med rent, rindende varmt vand, og ryst fugtigheden ud af anordningen. Lad alle dele lufttørre grundigt, før du samler dem igen.</p>	<p>Samles ved at placere mundstykket over kammeret og låses ved at dreje det. Sæt endehætten på kammeret.</p> <p>Hvis du bruger en maske, så sæt den på mundstykket igen.</p>
<p>Forsigtig:</p> <p>Brug kun OptiChamberen til det formål, den er beregnet til iht. brugsanvisningen. Følg de givne rengøringsanvisninger. OptiChamberen og masken må ikke vaskes i en opvaskemaskine. Brug ikke metoder eller materialer, som ikke er anbefalet, til at rengøre OptiChamberen eller masken. Følg lægens anvisninger. Efterlad ikke OptiChamberen eller masken uden opsyn, hvor der er børn til stede. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal bruge denne OptiChamber, så henvend dig til din læge.</p>	<p>Indikationer for brug:</p> <p>OptiChamber Diamond med ventil er beregnet til brug for patienter, med behov for aerosol medicin i samråd med en læge. Anordningen er beregnet til administrering af aerosoliseret medicin. Den er beregnet til brug i hjemmet og på hospitaler og klinikker.</p>	<p>Vigtigt:</p> <p>Gem disse anvisninger og opbevar dem på et sikkert sted. Følg de anvisninger, som fabrikanten har vedlagt inhalatoren. Denne anordning og den valgfrie maske indeholder ingen naturlig latexgummi. Opbevar OptiChamberen og den valgfrie maske på et passende rent sted, såsom i en ren plastikpose.</p>	