

## Hvordan aflæses resultaterne

Tilstedeværelsen eller fraværet af agglutiner viser din blodtype.


Agglutiner kan se forskellige ud fra felt til felt; se eksempler nedenfor.

De mulige kombinationer af agglutiner og de dertil hørende blodtyper ses i tabellen til højre.

Hvis testen viser meget svage agglutiner, bør blodtypebestemmelsen gentages.

Hvis du ser agglutiner i kontrol-feltet, er resultatet ugyldigt og testen skal gentages.

### Eksempler på agglutiner:

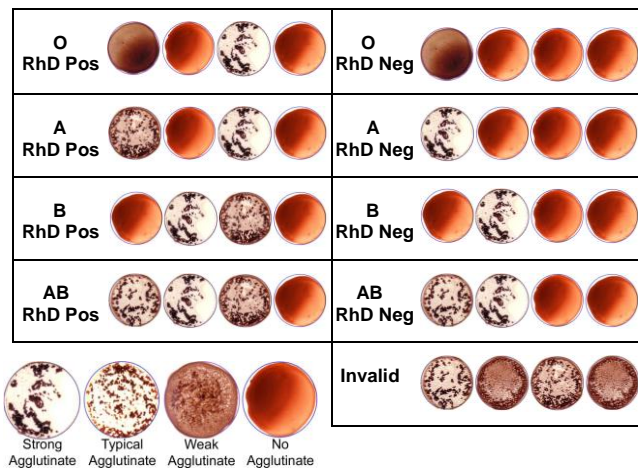

## Opbevaring og holdbarhed

Konvolutterne med EldonCards er lavet i et fugttæt aluminium/plastlaminat, der beskytter kortene mod fugt. EldonCards skal opbevares mellem 5 og 37 °C (41 og 99 °F). Når de holdes inde i dette temperaturområde, er kortene holdbare i 2 år. Udløbsdatoen (se "Symboler") er trykt på etiketten i formatet åååå-mm-dd. Brug kortene inden udløbsdatoen.

## Forholdsregler

- Bør ikke bruges af personer med hæmofili eller personer, som tager blodfortyndende medicin (anti-koagulanter), pga. risiko for blødning ved brug af autolancetten.
- Et lille antal personer har svage RhD antigener på blodcellerne, og agglutiner kan måske ikke ses. Kun specialiserede laboratorier kan med sikkerhed opdage sådanne svage RhD antigener.
- I sjældne tilfælde kan ikke-specifikke agglutiner udvikle sig ved tilstedeværelse af visse proteiner. I så fald er agglutiner også synlige i kontrolcirklen, hvilket betyder at resultatet er ugyldigt. En ny test skal udføres. Det er muligt, at din blodtype kun kan bestemmes i et specialiseret center. Agglutinationer i kontrolfeltet kan også skyldes fejl under udførelse af testen.
- Opbevares uden for børns rækkevidde.
- Når resultatet er kendt, læg alle brugte ting tilbage i den originale pose og bortskaf posen med almindeligt husholdningsaffald.

**EldonCards leveres i fugttætte konvolutter. Når du har åbnet denne, skal du bruge ELDONCARD samme dag.**

**Advarsel: Resultatet af denne test må aldrig bruges som grundlag for medicinsk behandling. Kontakt din læge, før du træffer nogle beslutninger.**

## Anvendte symboler:

Symbol	Meaning
	Lot nummer, Batch kode. Lotnummeret på EldonCards angiver produktionsugen. Det består af 5 cifre, ååuux, hvor åå er de to sidste cifre i årstallet (18 for 2018), uu er ugenummeret, og x er et internt nummer.
	Indholdet rækker til <n> tests.
	Kun til engangsbrug. Må ikke genanvendes.
	Dette cirkulære felt indeholder en indtørret formulering af blodtype antistof A.
	Dette cirkulære felt indeholder en indtørret formulering af blodtype antistof B.

Symbol	Meaning
	Læs brugsanvisningen (dette papir).
	Temperaturgrænser. EldonCards skal opbevares mellem 5 og 37 °C (41 og 99 °F).
	Udløbsmåned. Skrives som åååå-mm-dd, dvs. 2020-07-28 betyder "Bruges før 28. juli 2020")
	Spøringsnummer. Oplys dette nummer, sammen med foto af kort og lot nummer ved reklamation.
	"Fremstillingsdato". Datoen hvor EldonCards blev pakket i konvolutter.
	Fabrikant.
	Dette cirkulære felt indeholder en indtørret formulering af blodtype antistof D.



# ELDON™ HOME KIT HKA 2511

## Kend din blodtype

Brugsanvisning nr. 441-da (rev. 2019-07-03)

### Anvendelsesformål

ELDON HOME KIT 2511 er et selvtest kit for selvundersøgelse af deres blodtype inden for ABO- og RhD blodtypesystemerne på et ELDONCARD 2511 med en test pr. kort.

### Blodtypesystemerne

ABO systemet klassificerer blodet i 4 mulige blodtyper, A, B, AB og 0. RhD-blodtypen i det komplekse rhesussystem klassificerer blod som enten positivt (RhD pos) eller negativt (RhD neg). Hvis blod af en type blandes med blod af en anden type, vil det danne klumper eller klynger - de såkaldte agglutiner - undtagen blod af type 0 RhD neg, som normalt ikke agglutinerer med nogen anden blodtype. Ved at blande dit blod med specifikke monoklonale antistoffer på ELDONCARD kan du bestemme din blodtype.

Dine gener bestemmer din blodtype. En bestemmelse af blodtype med ELDONCARD er mulig fra en alder af ca. 12 måneder, og du vil beholde den samme blodtype resten af dit liv.

### Hvordan fungerer EldonCard?

De tørrede antistofreagenser ses i cirkler på ELDONCARD som pletter, der er farvet grønt for Anti-A, rødt for Anti-B, gul til Anti-D. En kontrolcirkel med en blå plet tjener til at verificere, at resultatet er gyldigt.

Prøven udføres ved at opløse det tørrede reagens i hver cirkel med en dråbe vand og blande det med blod. Det er vigtigt at få tilstrækkelig mængde blod og undgå overførsel af væske mellem de fire cirkler. Til dette formål bruger du 4 ELDON STICKS til at overføre blod til hver cirkel og omrøre væsken grundigt. Tilrædelsestrinene beskrevet nedenfor er også vigtige for at afslutte testen.

### Indholdet i ELDON HOME KIT 2511

Se etiketten uden på kittet.

### Materialer der kræves, men medfølger ikke


- Et glas med vand
- Et ur eller en timer

### Vigtig information


- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden testen udføres.
- Følg alle instruktioner omhyggeligt for at få et nøjagtigt svar. En videodemonstration er tilgængelig på [www.eldoncard.com](http://www.eldoncard.com).
- Denne test kan bruges til 1 (og kun 1) blodtypebestemmelse pr. ELDONCARD 2511.
- Denne test er til engangsbrug.
- Skal opbevares ved stuetemperatur (5 - 37 ° C), uden for børns rækkevidde.
- Bring ikke andre personer i kontakt med dit blod. Det kan være smittefarligt.
- Bør ikke bruges af personer med hæmofili eller personer, som tager blodfortyndende medicin (anti-koagulanter).
- Brug testen inden udløbsdatoen på emballagen.
- Hvis noget af indholdet mangler, er ødelagt eller åbnet, bør Kittet ikke bruges og du skal aflevere det i den forretning, hvor du købte det.
- Åben ikke konvolutten før du er parat til at udføre testen. Når den fugtbeskyttende foliekonvolut omkring ELDONCARD 2511 er åbnet, skal kortet bruges samme dag.
- Kontrollér, at farvede pletter af samme størrelse er til stede i hvert cirkulært felt.
- Husk altid at adskille EldonSticks, så de opdeles i fire individuelle EldonSticks.
- En ELDON STICK må kun bruges i én cirkel, brug en ny ELDON STICK til hver cirkel (reagensfelt).
- Vask og tør dine hænder omhyggeligt inden du foretager fingerstikket, som udføres i trin 6.
- Test ikke lancetten før brug. Nålen kan kun frigives én gang.
- Pas på at undgå enhver sammenblanding mellem cirkler (krydskontaminering).

# Hvordan testen med ELDON HOME KIT udføres

Åben konvolutten, saml materialer og læs instruktioner, inden du begynder.


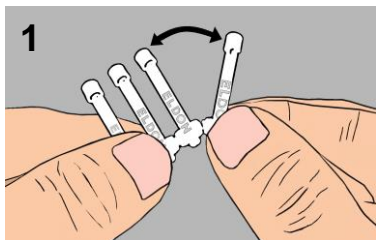


**Trin 1** Adskil EldonSticks i fire individuelle EldonSticks før brug (brug dem særskilt for hver cirkel). Skriv derefter personlige data på ELDONCARD. Kontrollér at der er farvet reagens i alle cirkler.


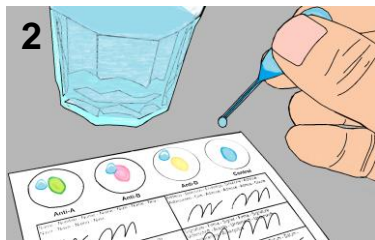


**Trin 4** Træk beskyttelsehætten ud af den automatiske sikkerhedslancet.


**Pas på ikke at aktivere lancetten; den kan kun bruges én gang.**

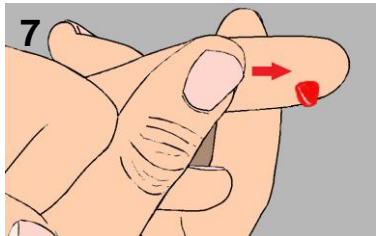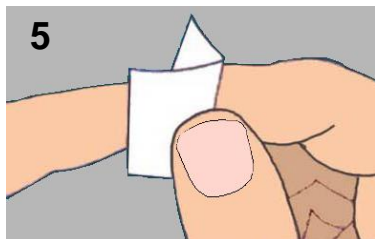

**Trin 7** Masser fingeren mod fingerspidsen for at øge blodgennemstrømningen. Oprethold trykket på fingerspidsen, så blod presses ud og begynder at strømme.

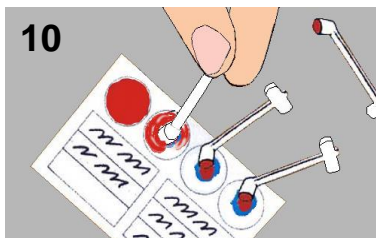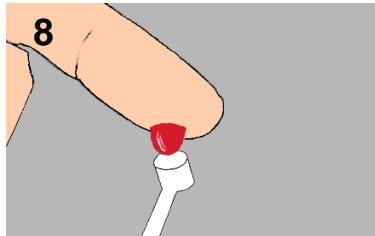

**Trin 10** Rør hver cirkel med den rigtige EldonStick i 10 sekunder. Spred blandingen af blod, vand og reagens omhyggeligt inden for hele reagenscirklen. **Pas på at undgå enhver sammenblanding mellem cirklerne på kortet.**

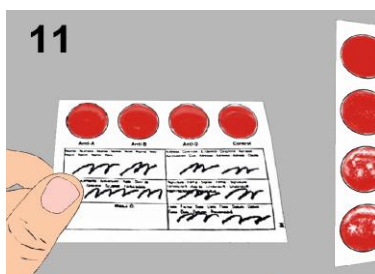

**10 sec + 10 sec**



**Trin 12** Aflæs resultatet; og helst inden tørring af kortet. Notér din blodtype på kortet.

Efter tørring skal du bruge en EldonFoil til at dække eller montere kortet (**aldrig før helt tørt**).


### Scan for at se hjemmeside med demonstrationsvideo\*

Scan QR koden eller gå til <https://www.eldoncard.com/How-to-use-video> for at se ELDON HOME KIT demonstrationsvideo (kun med engelsk tale).

\* Standardbesked- og dataakster kan gælde. Læs altid medfølgende brugsanvisning, inden du begynder at udføre testen.




**Trin 2** Påfør en lille dråbe vand i hver cirkel. Rør ikke de farvede reagenser. **Pas på at undgå enhver sammenblanding af reagens mellem cirkler**

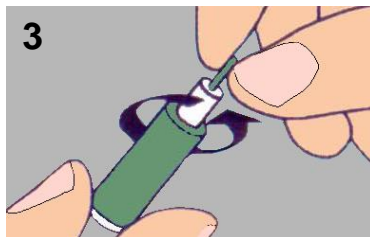

**Trin 3** Skru den grønne beskyttelseshætte af lancetten.

**Pas på ikke at aktivere lancetten; den kan kun bruges en gang. Må ikke benyttes, hvis beskyttelseshætten tidligere er blevet fjernet.**


**Trin 5** Afrens din finger med den sterile renseserviet (Alcohol Swab). Sving din arm for at øge blodgennemstrømningen til fingrene.

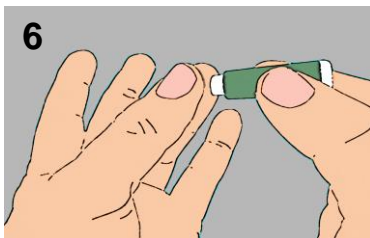

**Trin 6** Stræk den bløde hud ved siden af fingerspidsen og tryk den automatiske lancet fast mod punkturstedet for at aktivere enheden.

**Sikkerhedslancetten er til engangsbrug.**

**Trin 8** Gentag og fasthold trykket, indtil en dråbe med en diameter på 3 til 4 mm ses. Lad en stor bloddråbe falde på en EldonStick.

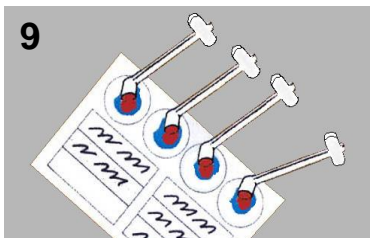

**Trin 9** Placer EldonStick med bloddråben i midten af den første reagenscirkel.

Tag en ny pind og gentag trin 7 og 8. Overfør en bloddråbe til hver af de resterende cirkler **ved hjælp af en ny EldonStick for hver cirkel.**



**10 sec + 10 sec + 10 sec = 40 sec**

**Trin 11** Vip kortet op i næsten opretstående position (ca. 45°) og vent 10 sekunder. Vip til den modsatte side af kortet til en vinkel af 45° og vent endnu en gang i 10 sekunder, mens blodet flyder ned over felterne. Vip kortet til 45° og vent 10 sekunder for hver af kortets sider (i alt skal vippes i mindst 40 sekunder som vist i figur 11).

Stop ikke, når du ser de første reaktioner; reaktionen i Anti-D er ofte langsommere end reaktionen i Anti-A og Anti-B.