


1. **Fjern** narkotesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. **Fjern** bundcoveret. (test-stripsene vil nu komme til syne)

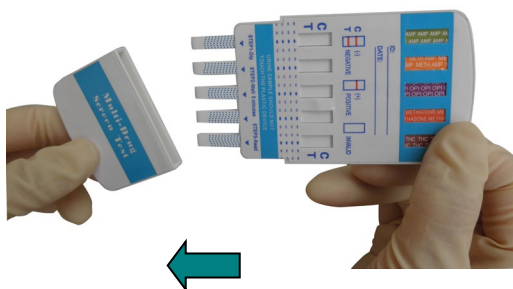

3. Dyp narkotesten i urinprøven i 5 sekunder. **Dyp stripsene ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.**



4. **Fjern** narkotesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.



Test for stoffer: Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.



Aflæsning af narkotesten


Negativt Resultat (ingen stoffer)

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- **En i KONTROL(C)-området**
- **En i det specifikke TEST-område**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de blot kan skimtes, er det et negativt resultat.

Eksempel på aflæsning:

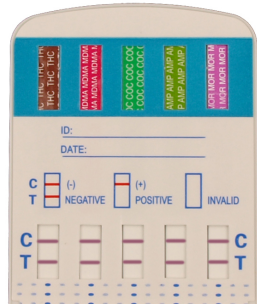


THC: Negativ
MDMA: Negativ
COC: Negativ
AMP: Negativ
MOR: Negativ

Positivt Resultat

I **KONTROL(C)-området** skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen positiv for det pågældende stof. Dvs. stoffet er til stede i prøven.

Eksempel på aflæsning:

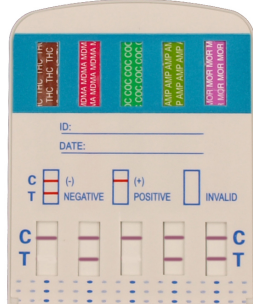


THC: Positiv
MDMA: Negativ
COC: Positiv
AMP: Negativ
MOR: Negativ

Ugyldigt Resultat

Ingen streger ud for **KONTROL(C)-området**: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. Følg vejledningen nøje og **gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:

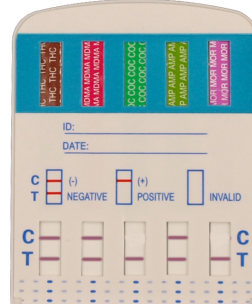

THC: Ugyldig
MDMA: Ugyldig
COC: Ugyldig
AMP: Ugyldig
MOR: Ugyldig

Ordforklaring:

THC: Hash, **COC:** Kokain, **AMP:** Amfetamin, **MOR:** Opiater, **METH.AMP:** Methamfetamin **BENZO:** Benzodiazepiner,

Se bagside for yderligere information.

Narkotest Information

Der er nogle ting du skal være opmærksom på, når du skal bruge en narkotest, og de er som følger:

Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation.
- Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere.

Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk

Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

Sporingstid:

Typisk 2-4 dage. Benzodiazepiner op til 14 dage. Kroniske misbrugere i op til 60 dage på THC.

Se yderligere om detektions -/ sporingstider på testdig.dk. Klik på Narkotest i menuen til venstre.

Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Symbolliste:

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
EXP:	Udløbsdato
LOT:	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd.
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China
Tel: 0086-10-84391888; Fax: 0086-10-84391888-117
Email: customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;
Email: info@mdss.com

