



1. **Fjern** hashtesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. **Fjern** bundcoveret. (test-stripsene vil nu komme til syne)

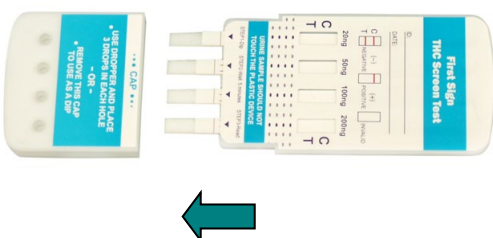


3. Dyp hashtesten i urinprøven i 5 sekunder. **Dyp stripsene ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.**



4. **Fjern** hashtesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.

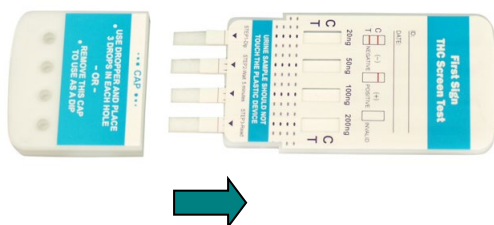

Test for niveau af hash: Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

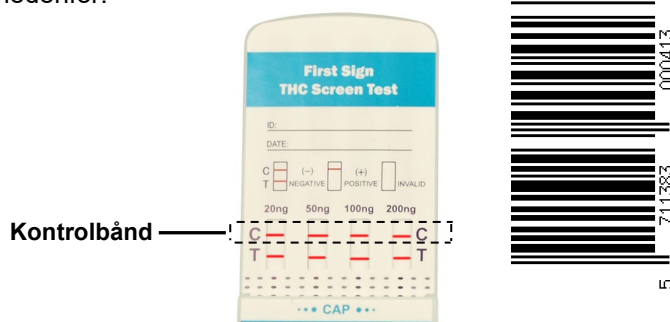

Aflæsning af narkotesten


Negativt Resultat (ingen THC)

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- En i **KONTROL(C)-området**
- En i det specifikke **TEST-område**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et negativt resultat. (ingen THC)

Eksempel på aflæsning:

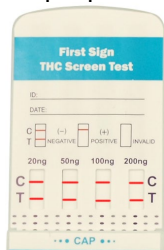


20 ng: Negativ
50 ng: Negativ
100 ng: Negativ
200 ng: Negativ

Positivt Resultat

I **KONTROL(C)-området** skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen positiv for det pågældende stof. Dvs. at der er THC tilstede over den pågældende mængde.

Eksempel på aflæsning:

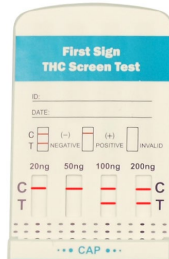


20 ng: Positiv
50 ng: Positiv
100 ng: Negativ
200 ng: Negativ

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for **KONTROL(C)-området**: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. **Gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:

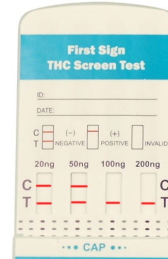

20 ng: Ugyldig
50 ng: Ugyldig
100 ng: Ugyldig
200 ng: Ugyldig

Ordforklaring: THC: Hash

Se bagside for yderlige information.

Narkotest Information

Start med at tage en Multi hashtest og registrer hvor mange grænseværdier, den giver udslag på. Test igen efter en uge og registrer om testen nu kun er positiv i 20, 50 og 100 ng/ml. Efter 2 uger testes igen, og resultatet skulle gerne være, at det nu kun er THC 20 og 50 ng/ml, som er positive.

Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation.
- Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere.

Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk

Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

Springstid:

Typisk 2-4 dage. Kroniske misbrugere i op til 60 dage på THC. THC udsondres ikke "lineært". Der kan forekommet udsving fra den ene dag til den anden.

Se yderligere om detektions -/ springstider på testdig.dk. Klik på Narkotest i menuen til venstre.

Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Symbolliste:

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
EXP:	Udløbsdato
LOT:	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M Bioresearch & Technology Co.,Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;
Email: info@mdss.com