

# Uro-Tainer®

## Solutio R Twin / Suby G Twin

### Opløsning til vedligeholdelse af uretrale og suprapubiske katetre

#### 1. Om Uro-Tainer® og anvendelse

Uro-Tainer® Twin er opløsninger til 2 på hinanden følgende skylninger af permanente uretrale og suprapubiske katetre. Det er sterilt, fri for endotoksiner, klart til brug medicinsk udstyr i en PVC-fri pose med følgende formål:

- Opløsning af bakterielle inkrustationer/forkalkninger i og på kateteret for at forlænge kateterlevetiden samt mindske ubehaget ved fjernelse af kateteret.

#### 2. Det skal du vide, før du bruger Uro-Tainer®

##### Brug ikke Uro-Tainer®

I tilfælde af overfølsomhed (allergi) over for et af indholdsstofferne i opløsningen (angivet i afsnit 6).

I tilfælde af blærebetændelse eller anden urogenital tilstand, som kan forårsage hæmaturi (blod i urinen).

Flere dage efter et kirurgisk indgreb i blæren eller i urinvejene.

Til patienter med rygmarvsskader på grund af risikoen for autonomisk dysreflexi.

##### Advarsler og forsigtighedsregler

- Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Uro-Tainer®.
- Opløsningen må under ingen omstændigheder injiceres eller gives som infusion.
- Lad opløsningen løbe ind ved hjælp af tyngdekraften, undgå alle former for pres.
- Anvend aseptisk teknik. Det anbefales at desinficere konnektoren på kateteret inden brug.
- Må kun anvendes, hvis posen og forseglingshætten er intakte, og opløsningen er klar.
- Det er et system til engangsbrug. Efter åbning skal det anvendes straks og derefter kasseres. Genanvendelse af sådant udstyr medfører en potentiel risiko for patienten eller brugeren. Det kan føre til kontaminering og/eller reduceret funktion af udstyret, hvilket kan medføre skade, sygdom eller død for patienten.
- Kasseret behørigt efter brug.
- Hvis væsken lækker fra urinrøret under skylningen, sidder katetret ikke rigtigt i blæren. Hvis det er tilfældet, skal katetret udskiftes med et nyt.
- Hvis væsken ikke løber, kan katetret være bøjet eller blokeret. Hvis det er tilfældet, skal katetret udskiftes med et nyt.

#### 3. Sådan bruger du Uro-Tainer®

- Uro-Tainer® er lukkede og sterile systemer, der skal tilsluttes til urinkatetret og betjenes i overensstemmelse med betjeningsinstruktionerne på den næste side.
- Uro-Tainer®-posen leveres steril og må ikke fjernes fra yderpakningen, før den skal anvendes.

- Hvis det ønskes, varm opløsningen op til legemstemperatur ved at nedsænke den indpakkede pose i varmt vand.
- Posen, der indeholder skyllevæsken, opsamler væsken efter skylningen af katetret. Skylning af katetret og opsamling af væsken efter skylning udføres alene ved hjælp af tyngdekraften ved at holde posen med opløsningen henholdsvis over og under blæreniveauet.
- Uro-Tainer® Suby G og Solutio R, der er baseret på sure opløsninger, skal administreres ind i selve kateteret og blive dér i 5 minutter for at udnytte den kemiske virkning fuldt ud. Denne proces anbefales 1 til 2 gange om dagen.
- Normalt er daglig anvendelse kun indiceret for postoperative patienter i en kort periode. I modsætning hertil har langtidskateteriserede patienter katetre i meget lange perioder. I dette tilfælde skylles katetret kun med Uro-Tainer® 2-3 gange om ugen.
- Der forventes ikke bivirkninger, hvis du anvender Uro-Tainer® hyppigere, end du burde.

#### 4. Bivirkninger

Citronsyre kan få nogle patienter til at opleve et let ubehag og også forbigående smerter, svien eller blæresammentrækninger (behov for at lade vandet). Sker det, anbefales det at anvende den mindre koncentrerede opløsning Suby G, udføre blæreskylningen mindre hyppigt eller udføre den skiftevis med instillering af NaCl 0,9 %, da sådanne virkninger ikke kendes i forbindelse med denne opløsning.

#### 5. Opbevaring

Uro-Tainer® skal opbevares utilgængeligt for børn.

Uro-Tainer® må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på den ydre plasticpose.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning.

Brug kun klare opløsninger i ikke beskadigede poser.

Efter åbning skal Uro-Tainer® anvendes straks og derefter kasseres.

#### 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

##### Uro-Tainer® indeholder

###### a) Uro-Tainer® Solutio R Twin

100 ml opløsning indeholder: citronmonohydratsyre 6,0 g, gluconolacton, let magnesiumkarbonat, natriumedetatdihydrat i vand til injektionsvæsker

###### b) Uro-Tainer® Suby G Twin

100 ml opløsning indeholder: citronsyremonohydrat 3,23 g, let magnesiumcarbonat, dinatriumedetatdihydrat i vand til injektionsvæsker

## Udseende og pakningsstørrelser


Opløsningen fremstår som en klar og farveløs væske.

Uro-Tainer® består af en blød PVC-fri (polyvinylchlorid) pose med en fleksibel sammensvejset, PVC-fri slange og en urologisk lukning. Det anvendte posemateriale er en farveløs og transparent, farmaceutisk film.


Uro-Tainer® Twin fås i pakkestørrelser på 2 x 30 ml.

Denne indlægsedel blev senest ændret i august 2015.


1. Åbn yderpakningen af plastik og tag Uro-Tainer® Twin ud.

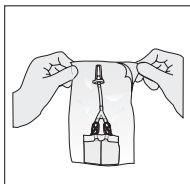


2. Luk begge slanger med de grønne og hvide klemmer.

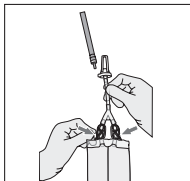


3. Fjern sikkerhedsanordningen.

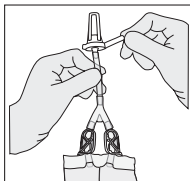


4. Drej og aftag låget uden at berøre den sterile konnektor. Åbn den hvide klemme og lad nogle dråber af opløsningen løbe ud af slangen for at fjerne eventuelle luftbobler. Luk klemmen igen.

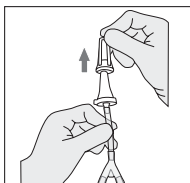


5. Sæt konnektoren i katetret.

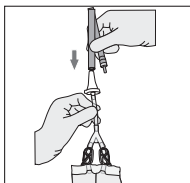


6. Hold Uro-Tainer® Twin over blæreniveau, og lad opløsningen fra det første kammer løbe ind i blæren. For at undgå potentielle skader på blæren må der ikke presses eller rystes.

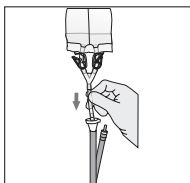


7. Luk den åbne slange med den hvide klemme.

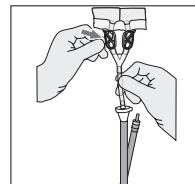


8. Efter 5 minutter åbnes den hvide klemme, posen holdes under blæreniveau, og opløsningen tømmes ud. Luk slangen med den hvide klemme.

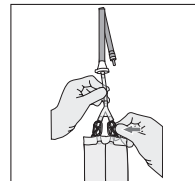


9. Gentag nu processen med opløsningen i det andet kammer. Hold Uro-Tainer® Twin over blæreniveau, og åbn den grønne klemme. Lad opløsningen løbe ind i blæren. Igen må der ikke presses eller rystes.

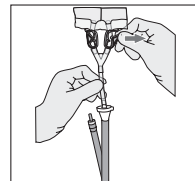

10. Luk den åbne slange med den grønne klemme.

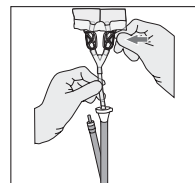

11. Efter 5 minutter åbnes den grønne klemme, posen holdes under blæreniveau, og opløsningen tømmes ud. Luk slangen med den grønne klemme. Kontrollér, at begge klemmer nu er lukket.

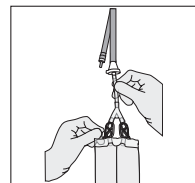

12. Tag konnektoren ud af katetret ved at dreje forsigtigt. Slut nu katetret til en steril urinpose. Kasserer efter behandling. Kun til engangsbrug.

