

COMPAT ELLA® UNIVERSAL SÆT, COMPAT ELLA® SPIKE SÆT, COMPAT ELLA® DUAL SPIKE SÆT

Compat Ella® ernærings sætterne er beregnet til administration af enteral sondeernæring, væske eller medicin og passer sammen med en Compat Ella® ernæringspumpen. Ernærings sætterne har en pumpekassette med den indbyggede, patenterede sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) for at garantere patientsikkerheden.

FUNKTIONER – KORT FORTALT

Alle Compat Ella® ernærings sæt er udstyret med ENPlus-kobling til ernæringsbeholdere, ENFit® 3-vejs medicinport samt ENFit® distal ende (til tilslutning på patientsiden).

INDBYGGET SIKKERHED

Alle Compat Ella® ernærings sæt er udstyret med den patenterede sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF er integreret i kassetten og aktiveres altid automatisk for at garantere patientsikkerheden.

MERE SIKRE TILSLUTNINGER

Alle Compat Ella® ernærings sæt er udstyret med ENFit-koblinger iht. ISO 80369-3. Koblingerne er udformet, så de er inkompatible med IV-systemer for at fremme patientsikkerheden.

FØDEVAREGODKENDT MATERIALE


Alle Compat Ella® ernærings sæt er DEHP-, BPA- og latexfri*.

Compat Ella® Universal Sæt

Udstyret med universalt skruelåg med luftfilter.

KOMPATIBILITET

- Ernæringsbeholdere: ENPlus, glas- og plastbeholdere med bred hals, glasflasker med kroneprop/kapsel
- Ernæringssonder: ENFit™
- Til medicintilførsel: ENFit™

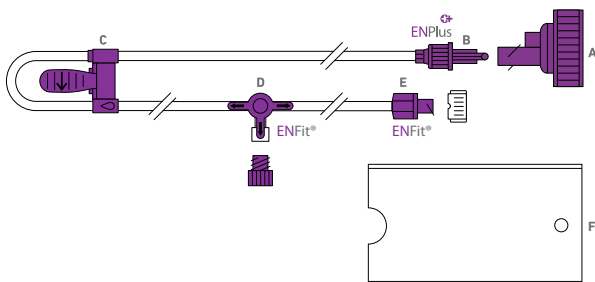


KOMPONENTER

- A** Skruelåg af universalt type med luftventil og ENPlus-port til brug med glas- og plastbeholdere med bred hals (DIN 168-1) eller glasflasker med kroneprop/kapsel (EN 14634 og EN 14635)
- B** ENPlus 'kun enteral' proksimal ende (ernæringskobling) med drejbar lås
- C** Compat Ella® pumpekassette med den indbyggede, patenterede sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D** 3-vejs medicinport med ENFit™-kobling og hætte
- E** ENFit™ distal ende (sondeforbindelsen på patientsiden)
- F** Holder til 500 ml-flaske, LDPE (Low Density Polyeten)

Compat Ella® Spike Sæt

KOMPATIBILITET

- Ernæringsbeholdere: ENPlus
- Ernæringssonder: ENFit™
- Til medicintilførsel: ENFit™

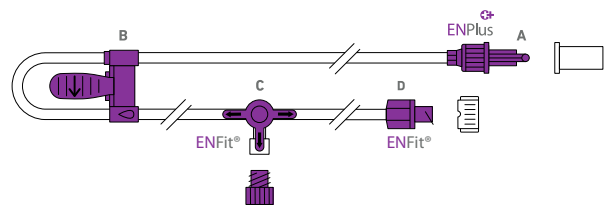

KOMPONENTER


- A** ENPlus 'kun enteral' proksimal ende (ernæringskobling) med drejbar lås og hætte
- B** Compat Ella® pumpekassette med integreret, patenteret sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- C** 3-vejs medicinport med ENFit™-kobling og hætte
- D** ENFit™ distal ende (sondeforbindelsen på patientsiden)

Compat Ella® Dual Spike Sæt

Beregnet til samtidig administration af enteral ernæring og/eller hydrering via to separate beholdere.

KOMPATIBILITET

- Ernæringsbeholdere: ENPlus
- Ernæringssonder: ENFit™
- Til medicintilførsel: ENFit™

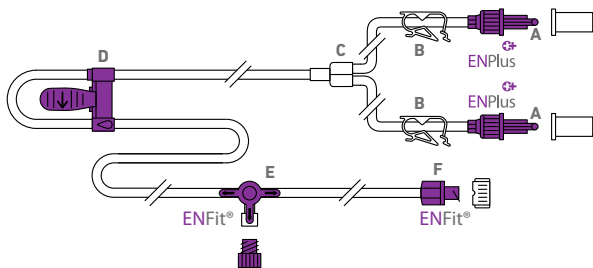

KOMPONENTER

- A** ENPlus 'kun enteral' proksimal ende (ernæringskobling) med drejbar lås og hætte
- B** Klemme til at lukke manuelt for væskestrømmen
- C** Y-ventil
- D** Compat Ella® pumpekassette med den integrerede, patenterede sikkerhedsfunktion AAFF (Auto-Anti-Free-Flow)
- E** 3-vejs medicinport med ENFit™-kobling og hætte
- F** ENFit™ distal ende (sondeforbindelsen på patientsiden)

SPECIFIKATIONER

Sterile: Steriliserede med etylenoxid.

Emballage: Individuelt emballeret i æsker med 30 stk.

Compat Ella® Universal Sæt (39,5 x 29,5 x 14 cm).

Compat Ella® Spike Sæt (29,5 x 26 x 19 cm).

Compat Ella® Dual Spike Sæt (29,5 x 26 x 19 cm).

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur. Beskyttes mod direkte sollys og fugt.

Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Udløbsdatoen står på emballagen.

Anvendelsestid: 24 timer. Engangsbrug.

Slangens længde: Afstanden fra ernæringskoblingen til sondekoblingen på patientsiden: 230 cm.

Afstand fra ernæringskoblingen til pumpen, alle sæt: 50 cm.

Afstand fra ernæringskoblingen til Y-ventilen Compat Ella® Dual Spike Sæt: 30 cm.

Sonnediameter: Nominel inderdiameter: 3,0 mm. Nominel yderdiameter: 4,15 mm.

CE-mærkning: Følger EU-direktivet om medicintechniske produkter 93/42/EEG. CE-certificering er udfærdiget af akkrediteret anmeldt organ: TÜV SÜD (CE0123).

Miljøaftryk: "Grüne Punkt"-symbolet viser, at Nestlé Health Science påtager sig sit producentansvar og bidrager til finansieringen af genindvindingen.

Materiale: Sonde: PVC og silikone. Alle materialer er DEHP-, BPA- og latexfri*. Yderligere information kan fås på anmodning.

BESTILLING

Hospitaller bestiller ernæringsprodukter fra Nestlé Health Science hos Nestlés Kundeservice på mail ordre@dk.nestle.com eller tlf. 35 46 03 20.

Patienter/borgere/plejehjem bestiller hos Simonsen & Weel (tlf. 46 55 75 40), MEDIQ Danmark A/S (tlf. 36 37 91 30) eller Abena (tlf. 74 31 14 10).

PRODUKT	VARENBR.	ANTAL PR. KASSE
Compat Ella® Universal Sæt	21 87 39	30 stk.
Compat Ella® Spike Sæt	21 87 40	30 stk.
Compat Ella® Dual Spike Sæt	21 87 41	30 stk.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte din repræsentant for Nestlé Health Science eller gå ind på www.compatella.com

*Delenes indhold overskrider ikke de maksimale koncentrationer på 0,1% total DEHP (DI- (2-ethyl-hexyl) phthalat). Der er ikke bevidst brugt latex eller BPA under fremstillingsprocessen.

® Registreret varemærke som ejes af Société des Produits Nestlé SA. Mere information om ENFit® kan fås på www.stayconnected.org.