

PIEGHE

80 mm 80 mm

DK **ORIFARM**

FlexiTherm Varmeplaster

Effektiv lindring af muskel- og ledsmerter samt menstruationssmerter.

Varmebehandling bruges til lindring af akutte smerter, ved kroniske lidelser, ryg- og lændesmerter, smerter relateret til iskiasknerven, muskelsmerter som skyldes krampe, og ved stive led og muskelsmerter ved gigtsygdomme.

Læs indlægssedlen grundigt for brug. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål.


Hvad er FlexiTherm varmeplaster og hvad anvendes det til
FlexiTherm er et selvopvarmende varmeplaster som sættes på huden lige der, hvor du har smerter. FlexiTherm kan anvendes ved smerter i f.eks. ryggen, lænden, nakken og skuldrene. Plasteret varmer gradvist op til en behagelig og effektiv temperatur på ca. 40° C. Det når sin maksimale temperatur efter ca. 30 minutter og virker i 8 timer. Du mærker straks en behagelig smertelindring og en dyb muskelafslappende effekt. Den vedvarende og konstante varme øger blodcirkulationen og løsner op for omme og spændte muskler. Varmen øger transporten af ilt i musklerne og giver en følelse af velvære. Varmen stimulerer også nerverne så opfattelsen af smerte sløres.

FlexiTherm varmeplaster indeholder naturlige stoffer (jern, kul, salt og vand) som ved kontakt med ilten i luften udvikler varme.

FlexiTherm varmeplaster er tyndt, let og usynligt under tøjet. Det sidder godt fast på huden, og tilpasser sig perfekt til kroppen og følger dens bevægelser, så du fortsat kan udføre dine sædvanlige aktiviteter. Varmeplasteret er lugtfrit, og nemt at sætte på og let at tage af.

FlexiTherm serien består også af FlexiTherm Varmeomslag.

Sådan anvender du FlexiTherm varmeplaster
Plasteret må først tages ud af emballagen lige før brug og det skal anbringes på huden umiddelbart efter at beskyttelsesfilmen er fjernet.
Sorg for at huden er tør og ren før brug.
Tag plasteret ud af plastikommen. Fjern beskyttelsesfilmen som dækker den klæbende side af plasteret og sæt plasteret direkte på det sted hvor du har ondt. For optimal effekt bør plasteret virke i 8 timer. Plasteret kan herefter let fjernes ved at trække det forsigtigt af huden. Plasteret må ikke sidde på huden i mere end 8 timer. Hvis du fortsat har smerter, kan et nyt plaster placeres på samme sted efter en pause på 24 timer. Plasteret må kun bruges på huden og er kun til engangsbrug.



Advarsler
Produktet er kun til udvortes brug.
Må kun bruges som beskrevet i denne indlægsseddel. Må ikke genopvarmes og må ikke opvarmes i mikrobølgeovn.
Du må ikke gøre plasteret vådt eller klippe i det. Anvend ikke plasteret hvis det er gået i stykker.

FlexiTherm varmeplaster må ikke anvendes:
- Til børn under 12 år eller af personer som ikke kan fjerne plasteret selv (ældre, handicappede, børn)
- Sammen med medicinske cremer, salver, plastre eller sammen med andre varmekilder
- Hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion overfor nonwoven
- Ved varmeoverfølsomhed
- Ved blå mærker eller hævelser i huden indenfor de sidste 48 timer
- Ved sår eller rifter på huden
- Ved eksem


Indholdsstoffer
Jernpulver, vand, aktivt kul, vandabsorberende polymer, natriumtripolyphosphat, natriumchlorid, natriumsulfid, vermiculit, træpulver.

Distributør
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S, Danmark
www.orifarm.com - info@orifarm.com

Producent
Zeta Ltd.
Via Riviera di Chiaia, 263
80121 Napoli, Italien

Produktet er fremstillet i Japan

Denne indlægsseddel er senest revideret: Juni 2019



SE **ORIFARM**

FlexiTherm Värmeplåster

Effektiv lindring vid muskel- och ledsmärter och menstruationssmärta.

Värmebehandling används vid lindring av akut smärta, kroniska smärttillstånd, smärta i rygg och ländrygg, ischias, muskelsmärta som orsakats av kramper samt vid lindring av ledstelhhet och muskel-smärter relaterade till reumatiska sjukdomar.

Läs bipacksedeln noga före användning. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har frågor.

Vad är FlexiTherm värmeplåster och vad används det till?
FlexiTherm är ett självuppvärmende värmeplåster som appliceras på huden där du har ont.


FlexiTherm värmeplåster kan användas vid lindring av exempelvis värk i rygg-, ländrygg, nacke och axlar. Plåstret värms gradvist upp till en behaglig och effektiv temperatur på ca. 40° C. Det når sin maximala temperatur efter ca. 30 minuter och verkar i 8 timmar. Du kommer snabbt att känna en behaglig smärtlindring och djupt muskelavslappande effekt. Den kontinuerligt och konstant avgivna värmen stimulerar blodflödet och mjukar upp ömma och spända muskler. Värmen ökar transporten av syre i musklerna och ger en behaglig smärtlindrande känsla. Värmen främjar stimulering av nerver vilken maskerar smärtupplevelsen.

FlexiTherm värmeplåster består av naturliga komponenter (jern, kol, salt och vatten) vilka producerar värme vid kontakt med syret i luften.

FlexiTherm värmeplåster är tunna, lätta och diskreta under kläderna. De fästas lätt på huden och anpassar sig till dina kropps rörelser så att du kan fortsätta med dina dagliga aktiviteter. Värmeplåstren är dotfria och lätta att sätta fast och ta av.

FlexiTherm serien består även av FlexiTherm värmeomslag.

Så här använder du FlexiTherm värmeplåster
Plåstret ska vara kvar i förpackningen tills det är dags att användas och ska appliceras på huden omedelbart efter att skyddsfilmen har avlägsnats.
Se till att huden är ren och torr före användning. Ta ut plåstret från förpackningen. Avlägsna skyddsfilmen som täcker den självhäftande delen av plåstret och fäst plåstret på det område där du har ont. För maximal effekt, låt plåstret verka i 8 timmar. Plåstret kan sedan avlägsnas genom att försiktigt dra av det från huden. Plåstret får inte vara kvar på huden i längre än 8 timmar. Om du fortfarande har värk kan ett nytt plåster appliceras på samma område med 24 timmars mellanrum.
Plåstren ska endast användas på huden och är för engangsbruk.




Varningar
Produkten är endast avsedd för utvärtes bruk. Används endast enligt bipacksedeln.

Plåstret får inte värmas upp på nytt eller värmas upp i mikrovågsugn. Värmeplåstret får inte bli blött eller klippas. Använd inte värmeplåstret om det är skadat.

FlexiTherm värmeplåster får inte användas:
- Av barn under 12 år eller personer som inte själva kan ta av plåstret (ældre, funktionshindrade samt barn)
- Tillsammans med andra medicinska krämer, salvor, plåster eller i kombination med andra värmebehandlingar
- Om du tidigare haft en allergisk reaktion mot nonwoven

Denna produktinformation ändrades senast: Juni 2019



ZETA GROUP srl

FIL FLEXITHERM VARMER PLASTER


Artwork: **bugirdino**

Codice Cartella: **B8809A**

Dimensioni Steso: **160x297mm**

Dimensioni Chiuso: **80x148,5mm**

PIEGA A CROCE

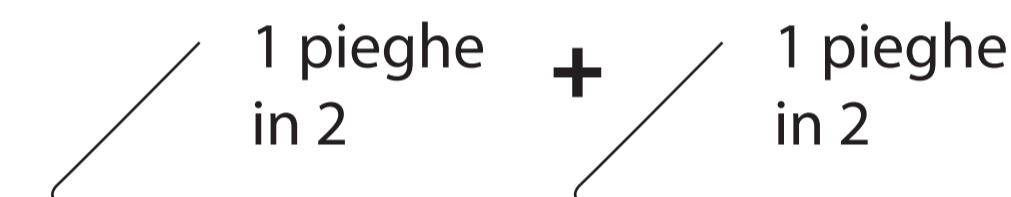

Materiale:

USOMANO 80gr

Riferimento Colore:

Nero

APPROVED

By *Renee Nielsen* at 2:39 pm, Feb 24, 2020

DA CORREGGERE

APPROVATO

Artwork in scala al 100%

Approvato da:

FRONTE

RETRO

148,5 mm

148,5 mm