



TravelJohn  
urinkolbe består  
af en genlukkelig  
pose med en

anatomisk udformet tragt, der  
passer til både kvinder, mænd  
og børn.

Posen kan indeholde 800 ml  
væske, der omdannes til gel af  
det absorberende pulver  
i posen, hvorved bakterier og  
lugt neutraliseres.

### **Instruktion:**

1. Vær sikker på at posen med  
det absorberende materiale  
ligger inde i TravelJohn kolben.
2. Pres den anatomisk udformet  
tragt ind mod kroppen – den  
høje ende skal vende fremad.
3. Uriner eller kast op direkte ned  
i posen.
4. Luk den genlukkelige åbning og  
vent til væsken er blevet  
omdannet til gelé.
5. Smid posen væk efter brug  
eller genbrug den til de 800 ml  
er fyldt op.

### **Vær opmærksom på:**

- Må ikke smides i toilettet.
- Børn skal være under opsyn af  
en voksen ved brug.
- Kun til flydende væsker.
- Det absorberende pulver må  
ikke synkes.
- Hvis pulveret kommer i kontakt  
med øjne: skyl straks med vand.