

Stop Hémo®

Sterilt blødningsstandsende vat

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Navn: Stop Hémo

Sammensætning: Fibre af calcium alginat (fra alger)

Form og præsentation:

4 cm vat (5 stk./æske)

Enkeltpakket poser

Egenskaber: Blødningsstandsende og sårhelende vat

2. INDIKATIONER

Blødningsstandsende:

- Næseblod (epistaxis)
- Lokal blødning (rifter, skrammer og punktursteder)
- Oral blødning
- Tandudtrækninger

Sårhelende:

- Lokale sår ≤ 8cm²
 - Kirurgiske sår
 - Traumatiske sår (skrammer, rifter, afskrabninger, åbne vabler, overfladeforbrændinger)

Stop Hémo er effektiv til patienter med blødningsforstyrrelser, uanset om de er medfødte eller pådragne (på grund af K-vitamin-antagonist- eller heparinbehandling).

Stop Hémo kan anvendes til børn, gravide kvinder og voksne.



3. KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendte til dato.

4. BIVIRKNINGER

Stop Hémo indeholder spormængder af kapillær aktivt stof og kan forårsage reaktioner hos nogle sensibiliserede personer.

5. FØRHOLDSREGLER

Stop Hémo kan kun fugtes med saltopløsning NaCl 0.9 %. Udvexlingen mellem Na ioner i NaCl opløsningen og calciumioner i Stop Hémo danner en gele og muliggør smertefri fjernelse af Stop Hémo. Brug aldrig sterilt vand. Tjek om posen er hel, inden produktet anvendes.

6. ADVARSLER

Brug altid hele Stop Hémo -tamponen (uden at skære i den eller trække den fra hinanden).

Stop Hémo bør ikke forblive på stedet mere end 24 timer. Engangsbrug. Må ikke genanvendes på grund af risikoen for mikrobiel forurening og tab af effektivitet.

7. INTERAKTIONER

Stop Hémo bør ikke bruges sammen med alkaliske opløsninger, såsom opløsninger af natrium hypochlorit, eller indeholdende klorhexidin, benzalkoniumklorid eller kobbersalte. Hvis sådanne produkter er anvendt på såret, skyl grundigt med en NaCl 0.9 % opløsning, inden Stop Hémo påsættes.

8. STERILISERING

Sterilt produkt, steriliseret af β stråling. Må ikke gensteriliseres.

9. OPBEVARING

Opbevares tørt og ved en temperatur på under 30°C og væk fra direkte sollys. Se altid udløbsdatoen.



Nordic Medcom er en svensk virksomhed der leverer NxStage hjemme-HD og CRRT system, dialyseprodukter til kronisk og akut dialyse, katetre til sygehuse i Norden og Baltikum.

Vi ha en veludbygget organisation for produktudvikling, markedsføring, kundesupport, teknisk service og hurtige leverancer - til vores kunder.

Nordic Medcom DK, Teglbackvej 16, 8361 Hasselager
Kundservice, tlf. 41 68 22 44
Mail: info@nordicmedcom.dk

www.nordicmedcom.dk