

• Lette ubehag i muskler og knogler grundet gentagne tilfælde af vævsacidose ved overbehandling af muskelbetændelse af mælkesyre
 • Processerne til genvinning af funktionen i muskeltæppe, som er påvirket af kontraktur, som følge af overbelastning, kontraktur pga
 smerter og nedsættelse af kraft som følge af symptomer på over-stress, idet de forbedrer reduktionen af den smertefulde symptomatologi og knytter en muskelaf-
 slappende virkning til det pågældende muskelområde.

FREMANGSMÅDE VED ANVENDELSE:

PLASTER UNIVERSAL

Kan anvendes i tilfælde af rygsmerter, nakkesmerter, iskiassnervesmerter, muskeloverbelastning (skulder, albue, knæ, læg, etc.).

PLASTER ANKEL

Kan anvendes i tilfælde af ankelsmerter og kontrakturer (forstærkninger, senbetændelse).
 • Sæt plasteret på anklen, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER ØVRE RYG

Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjle's led (cervicodyni).
 • Sæt plasteret på nakken, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER KNÆ

Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonagi).
 • Sæt plasteret på det bukkede knæ, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER ALBUE

Kan anvendes i tilfælde af albuesmerter og kontrakturer (senbetændelse, kontusioner).
 • Sæt plasteret på den bukkede albue, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER LÆND

Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjle's led (lændesmerter).
 • Sæt plasteret på lændområdet, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER SKULDER

Kan anvendes i tilfælde af skuldersmerter og kontrakturer.
 • Sæt plasteret på skulderen, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

FIT LADY

Kan anvendes i tilfælde af ubehag ved menstruation.
 • Fjern plasteret fra bunden af papiret.
 • Påfør de to runde plastre på ovarieområdet og det formede plaster til lændehvirvelområdet.
 • der svarer til L3-hvirvelen.
 • Vent ca. 2 minutter før bevægelse for at sikre, at plastrer klæber helt til huden
 • Plastrer sidder på i 5 dage
 • Hvis nødvendigt, gentag behandlingen den efterfølgende måned, på den samme måde
 Plastrer vil fortsætte med at virke, også selvom de bliver våde (fx i brusebadet).

ADVARSEL:

Plastrer må ikke bruges på sår eller på hud, der er skadet eller rød.

Produktet er ikke-sterile og indeholder ingen lægemidler.

Tag kontakt til din læge inden brug af plastrer, hvis du lider af særlige sygdomme angående kredsløb (især i forbindelse med mikrokredsløb) eller musklerne.

Anvend ikke plastrer, hvis det udviser synlige tegn på siltage eller fejl. Fjern straks plastrer, hvis der er tegn på overfølsomhed (eksempelvis kløe og rødme).

OPBEVARING:

Opbevares ved stuetemperatur. Indpakningen yder under alle omstændigheder den nødvendige beskyttelse, så produktet ikke forringes under den normale