

quick test

hCG-Strip Graviditetstest - selvtest som indikerer graviditet Ref. 3037BI


hCG Graviditetstest er en selvtest, som indikerer humant chorionic gonadotropin (hCG) hormon i urinen. På kun 5 minutter finder testen frem til hCG nivåer på 25 mIU/ml. Hvis værdien er under, vises der ingen streg i "test", men der vises en streg under Control.

Pakningen indeholder:

- Graviditetstest
- Urinkop (kan genbruges efter afvaskning i vand)
- Brugervejledning på dansk
- Tørrmiddel (anvendes ikke)

Vigtig information

Dette er en in-vitro selvtest, den er kun til ekstern brug. Må ikke indtages. Læs instruktionerne nøje før anvendelse. Resultatet kan kun aflæses, når instruktionerne følges nøjagtigt. Følg alle instruktionerne ved anvendelse. Opbevares mellem +4° C til +30° C. Må ikke fryses. Testen skal ikke bruges efter udløbsdato, som er afmærket med et timeglas på yderpakningen og aluminiumspakningen. hCG Graviditetstest kan ikke genbruges. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. Alt indhold skal kasseres efter brug.

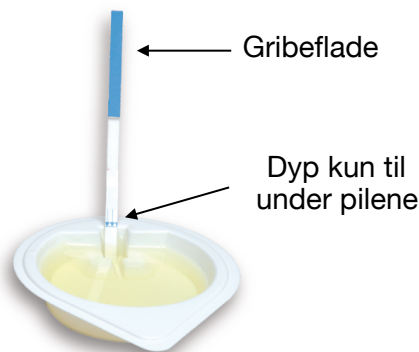

quick test

Sådan gør du:

1. Opsaml urin i den medfølgende urinbeholder.
2. Træk beskyttelsesposen op og tag teststrimlen ud fra posen.
3. Hold teststrimlen lodret ned i beholderen med urinen i 5 til 10 sekunder.
4. Placer teststrimlen plant.
5. Aflæs resultatet efter 5 minutter. (Fortolk ikke resultatet efter 10 min.)

Aflæs resultatet

Vent 5 minutter og aflæs resultatet. En streg vises i C (Control). Når denne linje vises, kan du aflæse resultatet.

1. Positivt resultat: Gravid

To farvede streger vises i testvinduet. En streg i T og en i C. Vær opmærksom på, at intensiteten af stregerne kan variere, og at stregen kan være rosa, lyserød eller lilla, uanset hvilket, betyder to streger, at du er gravid.




2. Negativt resultat: Ikke gravid

Der vises kun en farvet linje i C. Du er ikke gravid.



3. Mislykket resultat:

Hvis der ikke fremkommer en linje i C, (selv om der vises en linje i T) er testen mislykket og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan genbruges. Det anbefales, at en ny hCG Graviditetstest udføres.

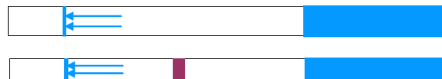

quick test

Spørgsmål og svar

Kan jeg udføre testen når som helst på dagen?

Ja, du kan udføre testen når som helst. Men hvis du mistænker, at du er i den tidlige graviditetsperiode (8-10 dage efter befrugtningen), bør du foretage testen med den første morgenurin.

Hvornår skal jeg tage en test?

Når din menstruation er forsinket en dag.

Hvad skal jeg gøre, hvis testen er positiv?

Kontakt din jordemor eller læge for at diskutere din graviditet. Mødreomsorg er vigtigt for både dig og dit barn.

Hvad skal jeg gøre, hvis testen er negativ?

Dette betyder, at dine hCG-værdier er under 25 mIU/ml, og du er ikke gravid. Du kan have taget fejl af, hvornår din menstruationstid blev afsluttet, dette kan ske, hvis du har uregelmæssige menstruationer. Hvis din menstruation ikke kommer indenfor en uge, bør en ny test foretages. Hvis denne også viser sig negativ, og din menstruation ikke er kommet, bør du kontakte jordemor eller læge.

Hvad sker der, hvis jeg ikke venter fulde 5 minutter, inden jeg aflæser testen?

Hvis du aflæser testen, inden der er gået 5 minutter, så har testen ikke fået tilstrækkeligt med arbejdstid, og testresultatet er muligvis ikke korrekt. Streger i kontrolvinduet vil vise, at testen er klar, og du kan aflæse resultatet. Hvis der er gået mere end 10 minutter siden den absorberende spids kom i kontakt med urinen, så er testen ikke pålidelig.

Hvor sikker er hCG Graviditetstest?

Følgte uafhængige undersøgelser er testen 99% sikker.

Fabriqué par :
VEDA.LAB
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau
Cerise - B.P. 181
61006 ALENCON Cedex - FRANCE



Informations médicales et pharmaceutiques au 02.33.27.56.25

	Read the instructions before use		For <i>in vitro</i> diagnostic use		Do not reuse
	Store between +4°C and +30°C		Batch number		Expiry date
	Manufacturer				