

quick test

L-Check- Strip Ægløsningstest

Selvtest, som opdager Luteiniserende Hormon (LH) i kvindens urin.


Ægløsning svarer til frigivelse af ægget fra æggestokken. Den stigende koncentration af det luteiniserende hormon (LH) viser, at ægløsning sandsynligvis forekommer inden for 24 til 40 timer. Denne periode er den mest gunstige at blive gravid i. L-CHECK-1 er en test for chromatografisk immunoassay til kvalitativ bestemmelse af LH i urin. På mindre end 10 minutter er det muligt at opdage LH-toppen før ægløsning og dermed bestemme dagene med optimal fertilitet.

Pakningen indeholder:

- L-Check Strip Ægløsningstest
- Urinkop (kan genbruges efter afvaskning i vand)
- Brugervejledning på dansk
- Tørremiddel (anvendes ikke)

Vigtig information

Dette er en in vitro selvtest, og kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug. Resultatet kan kun læses, når instruktionerne følger af vejledningen. Følg alle instruktioner vedrørende håndtering, blodvolumen og fortynding. Opbevares mellem +4 ° C og +30 ° C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys. Må ikke anvendes efter udløbsdato mærket med timeglas på ydre emballage og aluminiumspakken. Proven skal ikke anvendes, hvis aluminiumspakken er åbnet. Selvtesten kan ikke genbruges. Opbevar produktet uden for børns og dyrs rækkevidde. Yderemballagen sorteres som pap / bølgepap. Andet skal sorteres som restaffald.

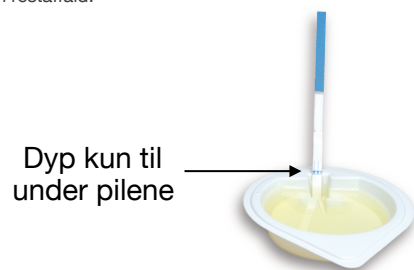

	Read the instructions before use		IVD For in vitro diagnostic use		Do not reuse
	Store between +4°C and +30°C		Batch number		Expiry date
	Manufacturer				


CE
0483

Manufactured by: VEDALAB
Rue de l'Expansion,
ZAT du Londeau, Cerisé, BP 181,
61006 ALENCON CEDEX (France)

quick test

Sådan gør du:

1. Opsaml urin i den medfølgende urinbeholder.
2. Træk beskyttelsesposen op og tag teststrimlen ud fra posen.
3. Hold teststrimlen lodret ned i beholderen med urin i 5 til 10 sekunder.
4. Placer teststrimlen fladt.
5. Aflæs resultatet efter 5 minutter. (Fortolk ikke resultatet efter 10 min.)

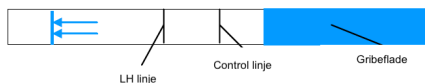

Aflæs resultatet

For at fortolke resultaterne, er det nødvendigt at sammenligne farverne på LH-linjen med farven på kontrollinjen.


1. Positivt resultat

Testen er positiv, hvis LH er mørkere end C (Control). Dette resultat betyder, at du har ægløsning, eller du vil få det indenfor 40 timer. Hvis du har samleje i denne periode, maksimerer du muligheden for at blive gravid.



2. Negativt resultat

Testen er negativ, hvis C (Control) er mørkere end LH. Dette betyder, at ægløsning ikke sker indenfor 40 timer. I dette tilfælde gentages en ny test dagen efter. Bemærk, at i nogle tilfælde vil der slet ikke fremkomme nogen linje under LH.

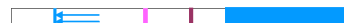

3. Mislykket resultat

Hvis der ikke fremkommer en linje i C, (selv om en linje vises i T), er testen mislykket og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten nu er opbrugt og kan ikke genbruges. Det anbefales, at en ny L-CHECK udføres.



quick test

Spørgsmål og svar

Hvordan fungerer L-CHECK?

Hos kvinder er den gennemsnitlige hormoncyklus 28 dage. FSH (follikelstimulerende hormon) udskillelse inducerer follikelmodning, og LH (luteiniserende hormon) udskillelse inducerer ægløsning. Under menstruationscyklussen udskilles kun en mindre mængde luteiniserende hormon (LH), men i midten af cyklussen øges LH-koncentrationen hurtigt. LH-højdepunktet er kun 12 til 18 timer før ægløsningen. Ægløsning modsvarer frigørelsen af ægget gennem æggestokken. Ægget kan befrugtes indenfor 12 til 24 timer efter frigørelsen. Denne periode er den mest gunstige tid at blive befrugtet på. Derfor er det højest sandsynligt, at ægget afgives indenfor 24 til 40 timer efter LH-højdepunktet. L-CHECK Test er en selvtest for påvisning af LH-højdepunktet i urinen.

Jeg har ikke viden om min cyklus, eller den varierer. Hvordan kan jeg vide hvilken dag, jeg skal begynde at teste?

Hvis du ikke kender din cyklus, anbefaler vi, at du venter til din næste menstruation er ovre, derefter kan du estimere, hvornår du bør have ægløsning og begynde at teste.

Hvornår er det bedst at udføre testen?

Du kan udføre testen når som helst på dagen. Urin, som er testet sent på eftermiddagen, indeholder mere LH. Tag testen på omtrent samme tidspunkt på døgnet. Undgå at teste med morgenurin.

Kan jeg få et fejlagtigt resultat?

Resultatet er rigtigt, hvis instruktionerne er blevet fulgt. Resultatet kan være fejlagtigt, hvis testen er fugtig, før testen udføres. Resultatet kan også være forkert, hvis testen bruges af nogen, som er gravid, er i overgangsalderen, eller som får hCG eller LH-baseret hormonbehandling. Hvis testen viser forkert, anbefales det altid at kontakte en læge eller gynækolog for videre efterforskning, da dette kan indikere visse helbredsproblemer.

Hvad skal jeg gøre, hvis testen er positiv?

Hvis testen er positiv, har du ægløsning eller vil få ægløsning indenfor 40 timer. Hvis du har samleje i denne periode, maksimerer du chancerne for at blive gravid.

Hvad skal jeg gøre, hvis testen er negativ?

Testen har ikke fundet dit LH-højdepunkt, noget som betyder, at din ægløsning ikke vil ske indenfor de næste 40 timer. En ny test bør foretages dagen efter.

Kan testen bruges som et alternativ til prævention?

Nej. Testen er ikke ment eller udviklet til dette.

Jeg tog netop en test, og den var positiv, hvornår er det lettest at blive gravid?

For at optimisere mulighederne for at blive gravid, bør du have samleje, den dag testen er positiv såvel som dagen efter.

Hvor pålidelig er L-CHECK?

Testen er meget pålidelig. Den har været brugt i over 10 år indenfor sundhedsvæsenet. Ifølge rapporter er testen 100% pålidelig.