


Testdig Multi Narkotest – MN10

THC/COC/AMP/MOR/METH.AMP/MDMA/BENZO/METHADONE/TRA/BUP


1. Fjern narkotesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. Fjern bundcoveret. (test-stripsene vil nu komme til syne)

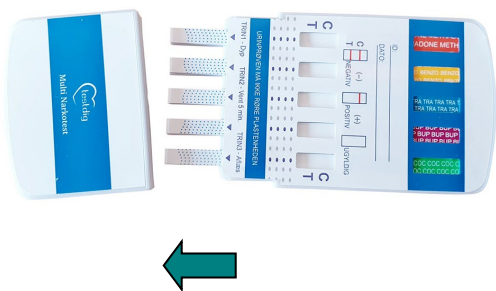

3. Dyp narkotesten i urinprøven i 5 sekunder. Dyp stripsene ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.



4. Fjern narkotesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.

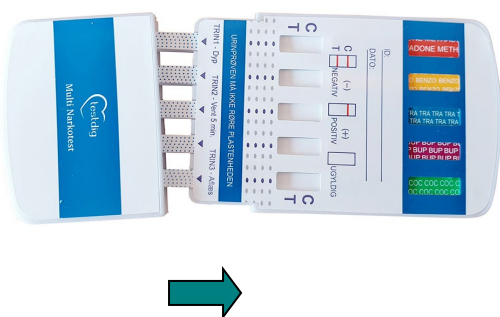

- Test for stoffer:** Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.



Aflæsning af narkotesten (Aflæs på begge sider af testen)


Negativt Resultat (ingen stoffer)

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- Én i **KONTROL(C)**-området
- Én i det specifikke **TEST-område (T)**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de blot kan skimtes, er det et negativt resultat.

Eksempel på aflæsning:

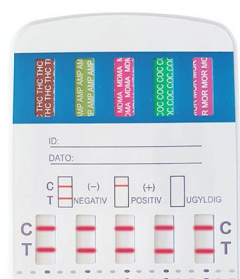


THC: Negativ
AMP: Negativ
MDMA: Negativ
COC: Negativ
MOR: Negativ

Positivt Resultat

I **KONTROL(C)**-området skal der være en farvet streg. Når der **ikke** fremkommer nogen streg i et specifikt testområde (T), er testen positiv for det pågældende stof. Dvs. stoffet er til stede i prøven.

Eksempel på aflæsning:

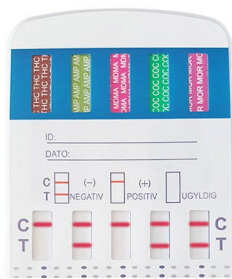

THC: Positiv
AMP: Negativ
MDMA: Positiv
COC: Negativ
MOR: Negativ

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for **KONTROL(C)**-området: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. Følg vejledningen nøje og **gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:



THC: Ugyldig
AMP: Ugyldig
MDMA: Ugyldig
COC: Ugyldig
MOR: Ugyldig

Ordforklaring:

THC: Hash, **COC:** Kokain, **AMP:** Amfetamin, **MOR:** Opiater, **METH.AMP:** Metamfetamin, **MDMA:** Ecstasy, **BENZO:** Benzodiazepiner, **METHADONE:** Metadon, **TRA:** Tramadol, **BUP:** Buprenorfin,

Se bagside for yderlige information.

Testdig Multi Narkotest – MN10

THC/COC/AMP/MOR/METH.AMP/MDMA/BENZO/METHADONE/TRA/BUP

Tilslaget brug

Testdig Narkotest screeningstest til at analysere for stoffer i urinen ved nedenstående grænseværdier. Anvendes til in vitro brug. Kromatografisk immunanalyse med tværgående flow for kvalitativ sporing af nedenstående stoffer og dets metabolitter.

THC (50ng/ml): Hash, **COC (300ng/ml):** Kokain, **AMP(1.000ng/ml):** Amfetamin, **MOR(300ng/ml):** Opiater, **METH.AMP(1.000ng/ml):** Metamfetamin(inkl. MDMA), **MDMA(500ng/ml):** Ecstasy; **BENZO(300ng/ml):** Benzodiazepiner, **METHADONE(300ng/ml):** Metadon, **TRA(50ng/ml):** Tramadol, **BUP(10ng/ml):** Buprenorfin,

Denne test giver kun et foreløbigt testresultat. Brug en anden mere specifik kvantitativ analytisk metode til at få bekræftet resultatet. Gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er den foretrukne metode til at få bekræftet et resultat. Anvend klinisk og professionel vurdering til ethvert testresultat, især når der er opnået et foreløbigt positivt resultat.

Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes, må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation. Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere (max. 48 timer).

Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk

Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

Sporingstid:

Typisk 2-4 dage. Benzodiazepiner op til 14 dage. Kroniske misbrugere i op til 60 dage på THC.




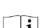
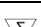
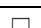
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
Se yderligere om detektions- / sporingstider på [testdig.dk](http://www.testdig.dk). Klik på Narkotest i menuen til venstre.

Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C.
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Udvidet vedledning kan hentes direkte her: www.testdig.info - <https://testdig.info/brugervejledninger/>

Symbolliste:

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
	Læs vejledning før brug
	Antal i pakke
	Udløbsdato
	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;
Email: info@mdss.com

