


# Testdig COT Nikotintest - COT

COT – 200 ng/ml


1. **Fjern** testen fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. **Fjern** bundcoveret. (test-stripsen vil nu komme til syne)

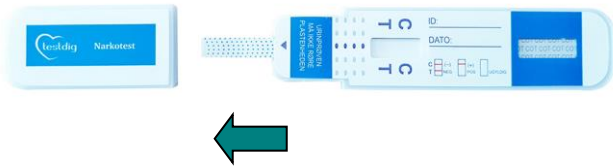


3. Dyp testen i urinprøven i 5 sekunder. **Dyp stripsen ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.**



4. **Fjern** testen fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.

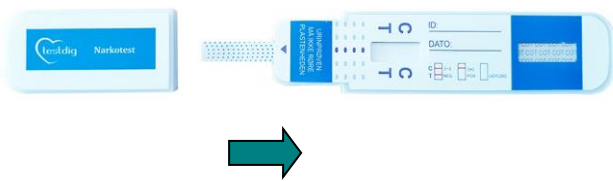

**Test for Nikotin:** Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

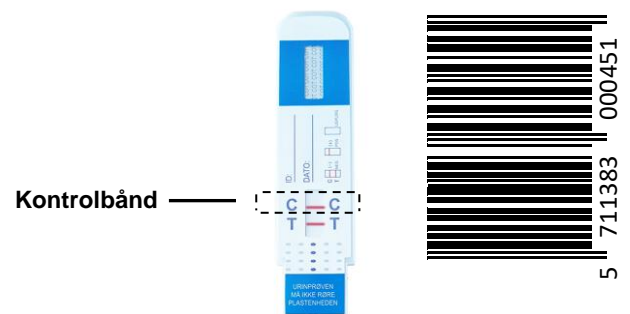

## Aflæsning af narkotesten

### Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- **En i KONTROL(C)-området**
- **En i det specifikke TEST-område (T)**

Tydigheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige (kan skimtes), er det et negativt resultat. Ingen Nikotin (Cotinine).

Eksempel på aflæsning:




COT: Negativ

### Positivt Resultat

I **KONTROL(C)-området** skal der være en farvet streg. Når der **ikke** fremkommer nogen streg i testområde (T), er testen positiv for Nikotin (Cotinine).

Eksempel på aflæsning:

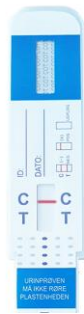

COT: Positiv

### Ugyldigt Resultat

**Ingen streg** ud for **KONTROL(C)-området**: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. Følg vejledningen nøje og **gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:



COT: Ugyldig

**Ordforklaring:** COT: Cotinine (nedbrudt nikotin)

Se bagside for yderlige information.

## Nikotintest Information

Der er nogle ting du skal være opmærksom på, når du skal bruge en nikotintest, og de er som følger:

### Inden prøven udføres:

- Tag testen på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes, må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

### Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation.
- Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere (max. 48 timer).

### Resultatet af prøven:

En nikotintest tester for det nedbrudte stof Cotinine (COT). En nikotintest vil kunne spore nikotin som er indtaget via snus, tyggegummi, tobak eller andre produkter som indeholder nikotin. Se mere information under narkotest på [www.testdig.dk](http://www.testdig.dk)

### Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor disse tests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

### Springstid:








Typisk op til 4 dage.

Se yderligere om detektions- / springstider på [testdig.dk](http://testdig.dk). Klik på Narkotest i menuen til venstre.

### **Forholdsregler:**

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C.
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

### **Symbolliste:**

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
	Læs vejledning før brug
	Antal i pakke
	Udløbsdato
	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M Bioresearch & Technology Co.,Ltd  
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang,Jinzhanxiang,  
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China  
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117  
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany  
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;  
Email: info@mdss.com

