

• Lette ubehag i muskler og knogler grundet gentagne tilfælde af vævsacidose ved overbehandling af muskelbetændelse af mælkesyre
 • Processerne til genvinning af funktionen i muskeltæppe, som er påvirket af kontraktur, som følge af overbelastning, kontraktur pga
 smerter og nedsættelse af kraft som følge af symptomer på over-stress, idet de forbedrer reduktionen af den smertefulde symptomatologi og knytter en muskelaf-
 slappende virkning til det pågældende muskelområde.

FREMANGSMÅDE VED ANVENDELSE:

PLASTER UNIVERSAL

Kan anvendes i tilfælde af rygsmerter, nakkesmerter, iskiassnervesmerter, muskeloverbelastning (skulder, albue, knæ, læg, etc.).

PLASTER ANKEL

Kan anvendes i tilfælde af ankelsmerter og kontrakturer (forstærkninger, senbetændelse).
 • Sæt plasteret på anklen, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER ØVRE RYG

Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjle's led (cervicodyni).
 • Sæt plasteret på nakken, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER KNÆ

Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonagi).
 • Sæt plasteret på det bukkede knæ, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER ALBUE

Kan anvendes i tilfælde af albuesmerter og kontrakturer (senbetændelse, kontusioner).
 • Sæt plasteret på den bukkede albue, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER LÆND

Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjle's led (lændesmerter).
 • Sæt plasteret på lændområdet, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

PLASTER SKULDER

Kan anvendes i tilfælde af skuldersmerter og kontrakturer.
 • Sæt plasteret på skulderen, på tør og ren hud uden hår
 • Vent i cirka 2 minutter, mens plasteret adhærer bedre på huden
 • Lad plasteret sidde i fem dage
 • Fortsæt behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret
 Plasteret virker også, selv om det er vådt (eksempelvis i brusebadet).

FIT LADY

Kan anvendes i tilfælde af ubehag ved menstruation.
 • Fjern plasteret fra bunden af papiret.
 • Påfør de to runde plastre på ovarieområdet og det formede plaster til lændehvirvelområdet.
 • der svarer til L3-hvirvelen.
 • Vent ca. 2 minutter før bevægelse for at sikre, at plastrerne klæber helt til huden
 • Plastrerne sidder på i 5 dage
 • Hvis nødvendigt, gentag behandlingen den efterfølgende måned, på den samme måde
 Plastrerne vil fortsætte med at virke, også selvom de bliver våde (fx i brusebadet).

ADVARSEL:

Plastrerne må ikke bruges på sår eller på hud, der er skadet eller rød.

Produktet er ikke-sterile og indeholder ingen lægemidler.

Tag kontakt til din læge inden brug af plastrerne, hvis du lider af særlige sygdomme angående kredsløbet (især i forbindelse med mikrokredsløbet) eller musklerne.

OPBEVARING:

Opbevares ved stuetemperatur. Indpakningen yder under alle omstændigheder den nødvendige beskyttelse, så produktet ikke forringes under den normale

