


# Vådliggeralarm


Swet-02h



# Specifikationer


Diameter på alarmerhed	5 cm.	
Ledningslængde inkl. klips	85 cm.	
Alarm volume	50 – 82 DB	
Indgangsspænding	5 V	
Maksimum driftstrøm	150 MA	
Batterikapacitet	500 mAh	
Batterispænding	3,7 V	
Opladningstid	Ca. 2 timer	

## Oversigt

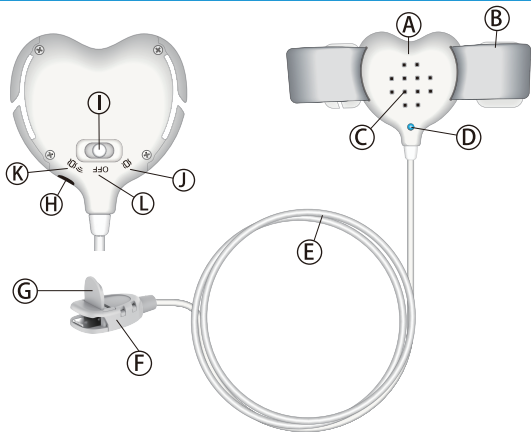


- A/ Hovedenhed**
- B/ Justerbart elastisk nylonbånd**
- C/ Højtaler**
- D/ LED lysindikator**
- E/ Ledning**
- F/ Sensorklips**
- G/ Lukkemekanisme**
- H/ Micro USB stik**
- I/ Tænd/sluk knap**
- J/ Vibration**
- K/ Vibration og lyd**
- L/ Slukket**


# Påsætning og brug

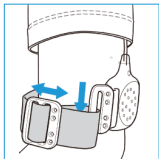

Åben elastikbåndet og tilpas længden på båndet ved hjælp af sliderfunktionen. Placer det herefter på brugerens arm eller ben. (vær opmærksom på, at alarmen skal placeres, med ledningen opad, så der ikke kommer knæk på ledningen.) Herefter kan ledningen føres igennem brugerens undertøj.

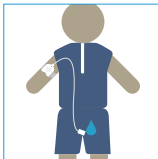

Klipsen åbnes helt ved at skubbe låsemekanismen op og frem. Herefter påsættes klipsen på ydersiden af underbukserne, på det sted hvor de bliver våde først.

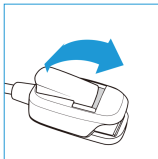

Klipsen lukkes ved at trykke låsemekanismen tilbage og ned. Tjek at klipsen sidder godt fast.


Vælg herefter hvilken indstilling alarmen skal benytte. Når alarmen aktiveres, skal klipsen fjernes, så brugeren kan komme ugeneret på toilettet og tisse færdig.

Husk altid at rengøre klipsen efter brug. Se mere i afsnittet rengøring og vedligeholdelse

## BEMÆRK

Det anbefales, at brugeren bærer bomuldsundertøj, da dette giver den bedste ledeevne til sensoren. Hvis brugeren eller omgivelserne er varme, anbefales det at placere klipsen mellem to stykker tøj, så klipsen ikke kan komme i direkte kontakt med huden.

## Indstillinger

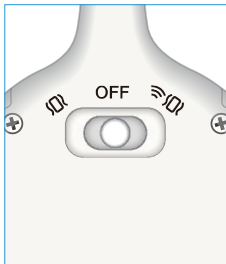

Alarms indstillinger er: vibration / slukket / vibration og lyd

For at indstille funktionen for alarmen flyttes den lille knap fra side til side.

- Når knappen er i midten, er alarmen slukket og giver ikke lyd/vibration
- Når knappen er til venstre, vil alarmen vibrere og indikatorlampen blinke blåt
- Når knappen er placeret til højre, vil alarmen vibrere og afgive lyd, samt indikatorlampen vil blinke blåt


## Yderligere information

Alarmen er afprøvet og godkendt ved gentagne tests og tilpasninger. Det kan tage et par dage for brugeren at finde ud af at reagere på lyden og vibrationen.

Når alarmen anvendes om natten, anbefaler vi, at en natlampe er tændt, så brugeren lettere vågner og let kan finde på toilettet.

Det er vigtigt at opmuntre og rose brugeren, igennem hele forløbet. I denne forbindelse kan vedlagte skema og klistermærker benyttes til at registrere fremskridt.

## Information

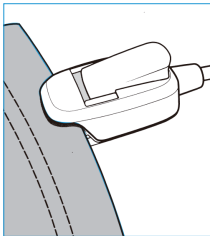

Vådliggeralarmen kan benyttes til: børn, unge, enuresis patienter, inkontinente patienter, fysisk udfordrede personer og andre der kan drage nytte af alarmen.

Det anbefales at udføre en produkttest inden alarmen tages i brug, da dette sikrer at alarmen virker korrekt.

### Testmetode:

Når alarmen er tændt og sat til enten vibration eller vibration/lyd, tages et stykke fugtigt stof eller papir og lægges imellem klipsen, som lukkes. Hvis alarmen vibrerer eller giver lyd, er det et tegn på, at alarmen virker som den skal.

## Reklamationsret

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder fra købsdatoen. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået i op til 24 måneder efter modtagelse af varen.

Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af alarm og klips.

## Opladning



- Når batteriniveauet er lavt, vil indikatoren blinke rødt.
- Når batteriet er helt tømt, vil alarmen slukke og derfor ikke virke.
- Sæt det medfølgende USB-stik i et stik eller en computer og sæt modsatte ende i alarmenheden.
- Når batterier er fuldt opladt, vil indikatoren lyse blå.

### BEMÆRK

Alarmen kan oplades uanset hvilket mode, den er indstillet på. Første gang alarmen oplades anbefales det, at den anvendes indtil batteriet er tømt, og derefter kan det oplades efter ønske. Alarmen bør ikke anvendes mens den oplades.

## Rengøring og vedligeholdelse

Klipsen med sensoren skal omgående rengøres efter hvert brug. Rengøring foretages med rent vand på en fnugfri klud eller en alkoholwap. Herefter aftørres sensoren med en tør fnugfri klud. Til slut blæses sensoren tør med luft, enten ved hjælp af en hårtørrer eller luftspray. Hverken alarm eller sensor må dyppes i vand.

Det er en god ide, at tjekke batteriet jævnligt. Det gøres ved at skruе bagbeklædningen af og sikre, at batteriet ikke lækker. Hvis alarmen ikke anvendes igennem længere tid, bør batteriet oplades ca. hver 2. måned for at forlænge batterilevetiden. Alarmen er personlig, så vi anbefaler ikke, at den anvendes af flere personer.

# Miljøhåndtering

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligskadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.