

Diabetes Selvtest

Denne Diabetes-test er beregnet til hjemmebrug. Testen anvendes for at kontrollere niveauet for glukose og ketoner i urinen. Disse faktorer anvendes til at diagnosticere diabetes. Resultatet vises ved at sammenligne teststrimlen med farvekortet, som er vedlagt separat. Hver farve indikerer koncentrationen af glukose og ketoner i urinen. Det er vigtigt, at teststrimlen placeres som illustreret på farvekortet.

Bemærk - Læs brugervejledningen nøje før brug.

Pakningen indeholder:

2 stk. Diabetestest strimmel og tørringsmiddel (Anvendes ikke)
1 Farvekort

1 Brugervejledning

Advarselsforeskrifter og vigtig information





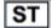









Læs brugsanvisningen nøje, før testen udføres.

Brug ikke testen efter udløbsdatoen. Hvis pakningen er åbnet, skal testen ikke tages i brug. Dette er en in-vitro selvtest, den er udelukkende til udvortes brug. Må ikke indtages.

Resultatet kan kun aflæses, når instruktionerne er blevet fulgt nøjagtigt.

Følg alle instruktioner angående håndtering. Opbevares mellem 15°C og 30°C. Berør ikke testområdet.

Opbevares tørt. Må ikke fryses eller udsættes for direkte sollys. Skal ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på aluminiumsemballagen. Testen må ikke bruges, hvis aluminiumsemballagen er åbnet. Quicktest diabetestest må ikke genanvendes. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. Yder-emballagen sorteres som karton/pap. Øvrigt affald skal sorteres som restaffald.

	Product Reference No.		Single use. Do not re-use.
	For in-vitro diagnostic use.		Do not use if the pouch is damaged.
	For Self-Testing use.		Store at 15 - 30°C.
	Caution.		Number of tests in the pack.
	Read product insert before use.		Manufacturer.
	Lot number. (batch)		Expiry date.
	Manufacturer telephone number.		Manufacturer fax number.

 **ATLAS MEDICAL**
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WX,
UK
Tel: ++44 (0) 1223 858 910, Fax: ++44 (0) 1223 858 524



Sådan gør du:

1. Tag teststrimlen ud af aluminiumsemballagen, lad tørringsmidlet blive tilbage.
2. Uriner i en ren beholder (for eksempel en plastik kop). Dyp den absorberende del i beholderen i 1 sekund.
3. Læg teststrimlen på en plan overflade og vent 30-60 sekunder.
4. Aflæs resultatet ved at sammenligne farverne på det medfølgende farvekort. Husk at fortsætte og have testen liggende plant, selv når du sammenligner farverne på farvekortet.
5. Sammenlign farverne på teststrimlen med farvekortet. Hvis der er en farveændring på testområdet, som kun vises langs kanterne af feltet indikerer det, at der ikke har været en reaktion. Testen er derfor ikke pålidelig, og vi anbefaler, at testen foretages på ny med en ny teststrimmel. Resultatet bør aflæses efter 60 sekunder.

Begrænsninger ved testen:

Stoffer, der forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. visse medikamenter, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen.

Spørgsmål og svar:

Hvornår er det bedst at tage testen?

Denne test kan udføres når som helst i løbet af dagen. Det kan være en god idé at tage testen, før du spiser og derefter teste igen 2 timer efter, at du har spist.

Hvis jeg dypper teststrimlen mere end 1 sekund, er testen så pålidelig?

Reaktionen viser sig, så snart teststrimlen kommer i kontakt med urin. Hvis teststrimlen forbliver i urinen i 2-3 sekunder, vil det ikke påvirke resultatet, men hvis testen er i urinen mere end 5 sekunder er resultatet ikke pålideligt, og der anbefales en ny test.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har symptomer på diabetes.



ATLAS HOME URINARY TRACT INFECTION TEST
For in-vitro diagnostic and self-testing use
Store at room temperature (15-30°C)



Vend for at tjekke dine resultater.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har symptomer på diabetes

Quicktest tilbyder helbredstests, der opdager forskellige sygdomstilstande. Læs mere på www.quicktest.dk

