

Mulighed 1



1. Producer din sædprøve i SwimCount™ Special Kondomet.



2. Overfør din sædprøve fra SwimCount™ Special Kondom ned i opsamlingsbægeret ved brug af pipetten. Den opsamlede sæd skal overføres indenfor 10 min. efter udløsning.



3. Når sædprøven er overført til opsamlingsbægeret, skal du lukke bægeret med skruelåget, så det er tæt.



4. Transporter sædprøven i opsamlingsbægeret, og hold det tæt på din krop mellem 20 ° C og 37 ° C. Sædprøven skal leveres til laboratoriet inden for 1 time* efter, at du har indsamlet din sædprøve eller som instrueret af din læge.

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere din sædprøve til laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) eller i reagensglasset (se mulighed 2)

* I henhold til WHO 5th ed. 2010


Mulighed 2



1. Producer din sædprøve i SwimCount™ Special Kondomet.



2. Overfør din sædprøve fra SwimCount™ Special Kondom ned i reagensglasset ved brug af pipetten. Den opsamlede sæd skal overføres indenfor 10 min. efter udløsning.

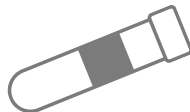

3. Når sædprøven er overført til reagensglasset, skal du lukke glasset med skruelåget, så det er tæt.



4. Transporter sædprøven i reagensglasset, og hold det tæt på din krop mellem 20 ° C og 37 ° C. Sædprøven skal leveres til laboratoriet inden for 1 time* efter, at du har indsamlet din sædprøve eller som instrueret af din læge

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere din sædprøve til laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) eller i reagensglasset (se mulighed 2)

* I henhold til WHO 5th ed. 2010

Mulighed 3



1. Producer sædprøven direkte i opsamlingsbægeret og luk derefter bægeret med skruelåget, så det er tæt.



2. Transporter sædprøven i opsamlingsbægeret, og hold det tæt på din krop mellem 20 ° C og 37 ° C. Sædprøven skal leveres til laboratoriet inden for 1 time * efter, at du har indsamlet din sædprøve eller som instrueret af din læge.

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere din sædprøve til laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) eller i reagensglasset (se mulighed 2)

* I henhold til WHO 5th ed. 2010