

NOSE CURE

TØR NÆSE

NÆSESPRAY MED TVÆRBUNDEN HYALURONSYRE, D-PANTHENOL, BIOTIN, VITAMIN A OG VITAMIN E

Læs venligst denne indlægsseddel, før du begynder at bruge produktet

1. Hvad NOSECURE TØR NÆSE næsespray er og hvad den anvendes til

NOSECURE TØR NÆSE næsespray er et medicinsk udstyr, der smører og vedligeholder fugtigheden og elasticiteten i næseslimhinden og hjælper med genopbygning af epitelet. Tværbunden hyaluronsyre (0,1%) og D-Panthenol (1%) sikrer større fugtighed og viskøs elasticitet af næseslimhinden. Biotin, A-vitamin og E-vitamin bidrager til den normale bevægelse af slimhinderne.

NOSECURE TØR NÆSE næsespray er beregnet til

- Tilfælde af tør/eller formindskelse af næseslimhinden forårsaget af særlige miljøforhold eller behandlinger (støv, slimhindeirriterende stoffer, for længe brug af næsespray mod tilstoppet næse, iltterapi osv.)
- At støtte behandlingen af sygdomme i næse- og bihuler (inflammation i næse og bihuler, høfeber, stoppet næse som følge af overforbrug af karsammentrækkende næsespray, hævet og betændt næseslimhinde karakteriseret ved atrofi af næseslimhinden osv.)
- Efter kirurgisk indgreb i næse og bihuler, at fremme genoprettelsen af den normale funktion af slimhinden.

2. Hvad du bør vide før du anvender NOSECURE TØR NÆSE næsespray

Anvend ikke dette produkt, hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne i produktet (anført i afsnit 6).

3. Sådan skal du bruge NOSECURE TØR NÆSE næsespray

- Fjern den beskyttende hætte. Placer din tommelfinger på bunden af flasken og din pege- og langfinger på pumpens "flapper" og pres dem ned. Slip derefter. Gentag denne handling indtil den første dosis er udløst. Bøj hovedet let fremover og pust langsomt ud. Før spidsen af flasken op i næseboret og udløs en dosering. Træk vejret ind samtidigt med at du med en finger på den anden hånd trykker ind på siden af det næsebor, der ikke skal modtage produktet.
- Anbefalet dosis: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt eller i henhold til lægens anbefaling.

4. Advarsler

- I tilfælde af bivirkninger stop behandlingen og kontakt en læge.
- Må ikke indtages gennem munden.
- Undgå kontakt med øjnene.
- Du skal sikre dig, at pakningen og/eller flasken er intakt før brug.
- Anvend ikke produktet efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen. Udløbsdatoen gælder for produkter, der er opbevaret korrekt.

5. Sådan opbevarer du NOSECURE TØR NÆSE næsespray

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Luk omhyggeligt flasken efter brug.
- Produktet bør opbevares ved stuetemperatur.

6. Yderligere information

In ingredienser: D-Panthenol, vitamin-E-acetat, vitamin-A-palmitat, biotin, hydrogeneret ricinusolie 40 OE, tværbunden hyaluronsyre, EDTA dinatriumsalt, natrium-N-hydroxymethylglycinat, kaliumsorbat, naturlige smagsstoffer, isotonisk opløsning pH 7,2.

Udseende

20 ml flaske

NOSECURE TØR NÆSE næsespray er et medicinsk udstyr i henhold til EU direktiv 93/42/EEC



DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA
via Laurentina Km. 26,700 - 00071
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com



Distributør:
Takeda Pharma A/S



Rev.02/2017_30FG063

Oncology & External Supply Small Molecule, Artwork

File name: 30FG063 LFT Nose Cure Tor 20 ml DNK		Proof number: 3 Name/Initials: LSSGS 6178283_0	
Marked: DNK		Revision number: 1	
Date: 26.10.2020		Printed colours:	
Format: 200x150 mm		Braille:	
Variable data:		Black <input type="checkbox"/>	
Sequence in Artwork:	Local language:	Variable data:	<input type="checkbox"/>
LOT	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
MAN	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
EXP	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
Code(s):		Non printed colours:	
GTIN: N/A		Die-line <input type="checkbox"/>	
Pharma-code: N/A		<input type="checkbox"/>	
Font(s): N/A		<input type="checkbox"/>	