

NOSE CURE ALLERGI

ANTI-ØDEM NÆSESPRAY

Læs venligst denne indlægsseddel, før du begynder at bruge produktet

1. Hvad NOSECURE ALLERGI anti-ødem næsespray er og hvad den anvendes til


NOSECURE ALLERGI anti-ødem næsespray er et osmotisk virkende medicinsk udstyr med anti-ødem og phlogolitiske effekt (hæmmer udviklingen af inflammatoriske processer), beregnet til:

- reduktion af tilstoppet næse hos patienter, som lider af hypertrofi af de nasale turbinater og af specifik (allergisk rhinitis) eller uspecifik helårssnue.
- behandling af hævelse ved akut eller kronisk inflammation i næse, bihuler og adenoider.
- behandling og forebyggelse af tilbagevendende polypper i næsen efter operation.
- behandling før og efter operation i næse og bihuler.

2. Det bør du vide før du anvender NOSECURE ALLERGI anti-ødem næsespray

Anvend ikke dette produkt, hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne i produktet (anført i afsnit 6).

3. Sådan skal du bruge NOSECURE ALLERGI anti-ødem næsespray

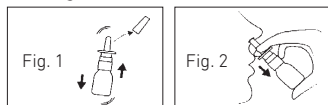

- Fjern den beskyttende hætte (se fig.1). Placer din tommelfinger på bunden af flasken og din pege- og langfinger på pumpens "flapper" og pres dem ned. Slip derefter. Gentag denne handling indtil den første dosis er udløst. Bøj hovedet let fremover og før spidsen af flasken op i næseboret og udløs en dosering uden at trække vejret ind samtidigt (se fig. 2).
- Voksne og børn: 2 pust i hvert næsebør 2 gange dagligt eller i henhold til lægens anbefaling.

4. Advarsler

- I starten af behandlingen kan der forekomme forbigående osmotisk næseflåd (løbende næse) kombineret med en kløende fornemmelse i næsen og lidt nysen. Dette skyldes produktets specifikke virkningsmekanisme.
- I tilfælde af brug før operation, skal man sikre sig, at der ikke er nogen former for overfølsomhed eller intolerance overfor produktet.
- I tilfælde af bivirkninger stop behandlingen og kontakt en læge.
- Anvend ikke dette produkt, hvis den originale emballage ikke ser ud til at være intakt, eller hvis der er tegn på forfalskning (f.eks. hvis der er sat en yderligere etiket oven på den eksisterende). Forfalskninger og beskadigelser af produktet kan påvirke sikkerheden ved brug af dette.
- Undgå kontakt med øjnene.
- Anvend ikke produktet efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.
- Anvend kun produktet til én person.
- Må ikke indtages gennem munden.
- Smid ikke flasken i naturen efter brug.

5. Sådan opbevarer du NOSECURE ALLERGI anti-ødem næsespray

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Sæt hættten omhyggeligt på forstøveren igen efter brug.
- Må ikke opbevares over 30°C

6. Yderligere information

Ingredienser: Mannitol, dikalium glycyrrhizinat, glycerol, copolymer PEG/PPG, EDTA dinatriumsalt, natrium-N-hydroxymethylglycinat, polysorbat 20, kaliumsorbit, natriumhydrat, rensset vand, naturlige smagsstoffer.

Udseende
20 ml flaske



DMG

DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA

Fabrikant:
D.M.G. Italia srl
Via Laurentina km 26,700
00071 Pomezia (RM), Italien



Distributør:
Takeda Pharma A/S



0373



Rev. 09/2019_30EG065

Oncology & External Supply Small Molecule, Artwork

File name: 30FG065 LFT Nose Cure Allergi 20 ml DNK		Proof number: 3	Name/Initials: LSJGS 6172633_0
Mærket: DNK		Revision number: 1	Date: 09.10.2020
Format: 200x150 mm		Braille:	
Variable data:		Printed colours:	
Sequence in Artwork:		Black <input checked="" type="checkbox"/>	
LOT	N/A	Variable data:	<input type="checkbox"/>
MAN	N/A	Variable data:	<input type="checkbox"/>
EXP	N/A	Variable data:	<input type="checkbox"/>
N/A	N/A	Variable data:	<input type="checkbox"/>
Code(s):		Non printed colours:	
GTIN: N/A		Die-line <input checked="" type="checkbox"/>	
Pharma-code: N/A		<input type="checkbox"/>	
		Font(s): N/A	