

EYE CURE

ØJENDRÅBER

Uden konserveringsmidler

Læs venligst denne indlægseddell, før du begynder at bruge produktet

1. Hvad EYECURE øjendråber er og hvad de anvendes til

EYECURE øjendråber er et medicinsk udstyr med phlogolittisk aktivitet (det hæmmer den inflammatoriske proces). Det anvendes til behandling af symptomer (kløe, fornemmelsen af at have noget i øjet, rødme osv.), der associeres med inflammatoriske tilstande i øjet, såsom generelt ubehag i øjnene, betændelse i øjenlågskanten og øjenbetændelse hos børn og voksne.

EYECURE øjendråber indeholder et specielt varmefølsomt stof, som er i stand til at danne en gel, når det kommer i kontakt med øjets overflade, og dermed give en langvarig fugtgivende og smørende effekt.

Designet af flasken (OSD-teknologi (Øftalmologiske Squeeze Dispenser)) et nyt dråbedispenseringssystem, der tillader produktets absolutte sterilitet uden brug af konserveringsmidler.

2. Det bør du vide, før du anvender EYECURE øjendråber

Brug ikke EYECURE øjendråber i tilfælde af kendt overfølsomhed over for nogle af ingredienserne i produktet (opført i afsnit 6).

3. Sådan skal du anvende EYECURE øjendråber

- Vask dine hænder, før du anvender produktet.
- Dryp 1-2 dråber i hvert øje 2-3 gange dagligt eller i henhold til lægelig rådgivning.
- Det er vigtigt, at dråbetælleren ikke kommer i kontakt med øjet.

4. Advarsler

- Forekomst af forkalkning af hornhinden i forbindelse med brugen af øjendråber indeholdende fosfater, er i meget sjældne tilfælde set hos patienter med alvorlige skader på øjets overflade. Kontakt din læge før anvendelse af dette produkt i tilfælde af bandkeratopati eller dybe calciumaflejringer i hornhinden.
- I tilfælde af bivirkninger, stop med at bruge EYECURE øjendråber og kontakt lægen.
- Der kan forekomme en let forbigående kløende fornemmelse kort tid efter brug.
- Må kun anvendes i øjet, må ikke indtages gennem munden.
- Sørg for at flasken er intakt inden brug.
- Produktet bør ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen. Udløbsdatoen gælder for produkter, der er opbevaret korrekt.

5. Sådan opbevarer du EYECURE øjendråber

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Smid flasken ud efter 60 dages åbning.
- Luk flasken tæt efter brug.
- Opbevares ved stuetemperatur og beskyttet mod direkte varme.

6. Yderligere informationer

Ingredienser: Enoxolon glucuronid, hyaluronsyre natriumsalt 0,10%, copolymer PEG/PPG, kaliumhydroxid, natriumfosfat monobasisk, natriumfosfat dibasisk, natriumklorid, rensat vand.

Udseende

10 ml flaske med OSD dråbetæller



Fabrikant:
ITALDEVICE Srl
Via Laurentina
km 26,700
00071 Pomezia (RM), Italien



Distributør:
Takeda Pharma A/S



1370



30FG066
Rev. 12/2016

Oncology & External Supply Small Molecule, Artwork

File name: 30FG066 LFT Eye Cure 10 ml DNK		Proof number: 2	Name/Initials: MCJSCS 6172557_0
Market: DNK	Revision number: 1	Date: 09.10.2020	
Format: 100x150 mm	Braille:	Printed colours:	
Variable data:		Black	<input checked="" type="checkbox"/>
Sequence in Artwork:	Local language:	Variable data:	<input type="checkbox"/>
LOT	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
MAN	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
EXP	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>
Code(s):		Die-line	<input type="checkbox"/>
GTIN: N/A	Pharma-code: N/A	Font(s): N/A	<input type="checkbox"/>