

Epicyn™ - Til forebyggelse af ardannelse:

Indikation: Epicyn™ leveres som hjælpestof til helingsprocessen af sår, som kun kan heles ved sekundær indsats i helingsfasen. Epicyn™ er beregnet til brug i forbindelse med nye og eksisterende hypertrofiske og keloid ar. Epicyn™ støtter fugtning under en beskyttende barriere, der dannes over for fysiske, kemiske og mikrobielle påvirkninger af arret.

Håndtering: Epicyn™ er biokompatibel til den angivne anvendelse. Fører ikke til irritation af huden og er ikke hudsensibiliserende. Der bør ikke tages særlige forholdsregler ved håndtering.

Opbevaring: Epicyn™ skal opbevares i original forseglet emballage og under normale forhold. Opbevares ved stuetemperatur og frostfrit. Epicyn™ er ikke brandfarligt. Efter anvendelse skal emballagen lukkes igen.

Stabilitet: I uåbnet stand er Epicyn™ garanteret stabil indtil udløbsdatoen. (år og måned ved udløb YYYY MM er angivet på flasken). Ved åbning bør datoen noteres i feltet "Dato åbnet" (på emballagen). Holdbarhed i åbnet tilstand er 60 dage efter åbning.

Instruktioner: Epicyn™ er klar til brug (uden det skal blandes eller fortyndes). Påfør tre gange om dagen, hvis det er muligt.

Behandling: Rens aktuelle område med Microdacyn væske, som anbefalet af lægen eller sygeplejerske. Lad området tørre. Dæk det berørte område med et tyndt lag Epicyn™ og gnid forsigtigt, indtil det er jævnt fordelt.

Advarsler og punkter at bemærke:

- Brug ikke produktet, hvis forseglingen er brudt ved modtagelsen.
- Må kun anvendes til udvendig brug, ikke til injektion. Undgå direkte kontakt med øjne og slimhinder, forbrændinger af tredje grad, og åbne sår.
- Brug ikke produktet, hvis man er overfølsom over for Polydimethylsiloxan.
- Brug ikke Epicyn™ sammen med andre produkter uden lægelig ordinerings.
- Hvis du har dybe eller alvorlige sår, eller spørgsmål vedrørende behandling, bør du konsultere din læge.
- Hvis der er tegn på infektion skal du konsultere din læge.
- Alle bivirkninger skal rapporteres til din læge.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse: Ved bortskaffelse skal der ikke tages særlige forholdsregler. Dog skal man følge de lokale regler for ubrugte eller udløbne lægemidler.

Ingredienser:

Indgrediens	Function	Epicyn Ar gel
Sodium Magnesium Lithium Fluorosilicate	Gelling agent	5,000%
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxyl	Film forming agent	4,800%
Sodium Phosphate (NaH ₂ PO ₄)	Buffer	0,200%
Sodium Sulfate (Na ₂ SO ₄)	Buffer	
Sodium Chloride (NaCl) ^a	Inert	
Frit tilgængelige klordampe indeholder		
Hypochlorous Acid (HOCl) ^a	Konservering	0,0032%
Sodium Hypochlorite (NaOCl) ^b	Konservering	0,0008%
Electrolysed Water	Bærer	89,99%
pH		5,5-7,0