

Nilocin® VORTE GEL


DK

Læs indlægsedlen grundigt inden brug

FÆtsende.

Kun til udvortes brug
Opbevares utilgængeligt for børn

Nilocin® vorte gel benyttes til topikal behandling af vorter på hænder, fødder, krop, arme og ben. Produktet kan benyttes til voksne og børn fra 4 års alderen.




VORTER
Vorter er lokale vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). Der eksisterer forskellige typer af vorter. Vorterne optræder alene eller i klynger på hænder, fødder, krop, arme og ben. Vorter er en smitsom sygdom og spredes ved at hud kommer i kontakt med virus.


NILOCIN®
Nilocin® vorte behandling er et CE mærket medicinsk udstyr. Pakningen indeholder en glasflaske med 4ml gel (tilstrækkeligt til behandling af minimum 10 vorter), samt denne indlægseddel.

Gelen indeholder en keratolytisk forbindelse som lokalt nedbruder væv og dermed elimineres vorten.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel.



- Benyt ikke Nilocin® til behandling af kønsvorter samt i ansigtsregionen.
- Undlad at bruge Nilocin®, hvis du er allergisk eller overfølsom overfor indholdsstofferne.
- Undgå kontakt med sund hud rundt om vorten.
- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, så længe behandlingen pågår.
- Undgå kontakt med smykker, beklædningsgenstande etc., idet gelen er ætsende.
- Anvend ikke på ømme eller blødende vorter, blærer samt irriteret, betændt eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Anvend ikke på vorter med hår, modermærker, pigmenteret hud, eller i tilfælde af at du er i tvivl om hudens tilstand er en vorte.
- Nilocin er ikke egnet for diabetikere og personer med dårligt kredsløb.
- **Det er bedre at påføre for lidt gel end for meget, for at undgå sår, blister, inflammationer, vævsdød, ar og kemiske forbrændinger.**
- Konsulter læge, såfremt det behandlede område bliver rødt og smertefuld eller betændt.
- Enkelt patient - flergangsbrug 
- Benyt ikke Nilocin® i kombination med andre vorte behandlingsprodukter.

TEKNISKE DATA - Produkt: Nilocin® pen til behandling af vorter **Indholdsstoffer (INCI):** Trichloroacetic acid (TCP 40%), Aqua, Glycerin, Cellulose, Cellulose Gum, Benzoic Acid, Sodium Benzoate **Indhold:** 4 ml - tilstrækkeligt til **Registrering:** Medicinsk udstyr, klasse IIa **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25 °C i original pakningen, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Låget påsættes omhyggeligt efter brug **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby **Yderligere information:** www.nilocin.dk **Kontakt:** info@unigroup.dk

- Krads ikke skorpen på vorten af, den bør falde af naturligt.
- Gravide, ammende og personer som lider af en hudsygdom, bør konsultere egen læge inden brug.
- Benyt ikke til børn under 4 år, med mindre ordineret af læge 

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I ØJNENE, SKYL STRAKS ØJNENE MED RIGELIGE MÆNGDER LUNKENT VAND OG GENTAG I 15 MINUTTER, KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE


SÅDAN BRUGES NILOCIN®
Det anbefales at blødgøre vorten i lunkent vand i minimum 5 minutter inden behandlingen. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skræbes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten. Børn bør behandles af en voksen.

- 1 Fjern låget. Tryk låget ned og drej mod uret. 
- 2 Påfør gel på vorten med applikatoren, to gange om dagen i 4 dage. Større vorter skal påføres mere end én applikation for at dække hele vorten. For børn med små vorter reduceres behandlingsplanen til én applicering om dagen. 
- 3 Låget skrues omhyggeligt på efter brug
- 4 Lad gelen tørre i 10-15 minutter
- 5 Gentag behandlingen i 4 dage. Hvis vorten ikke er væk, gentages behandlingen efter en 4 dages pause. Behandlingen kan gentages op til 4 gange

Hele vorten skal dækkes og vær forsigtig med ikke at påføre gelen på sund hud

Opstår der ubehag eller smerte stoppes appliceringen. Opstår der en svinden eller brændende fornemmelse eller er behandlingen ved et uheld appliceret på den sunde omgivende hud, skylles med koldt vand.


Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer


BIVIRKNINGER
Det er VIGTIGT at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader (se også af - snittet  ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER)

En mild snurren eller brændende fornemmelse kan i visse tilfælde fornemmes i 10-15 minutter efter applicering. Ved overeksponering kan bivirkninger opstå. Stop med brug indtil huden er fuldt restitueret.





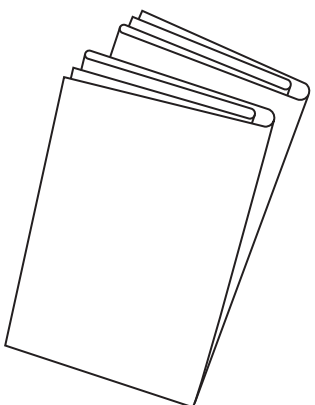


Alvorlige hændelser bør indberettes til producent og relevant myndighed.

OPBEVARING
Opbevares i den originale emballage, ved 2-25 °C, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Låget påsættes omhyggeligt efter brug. Afskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark
Nilocin® er et af unigroup ApS registreret varemærke 



UG05032020-101035-DK

Client: Unigroup ApS		Prepared by : DA	
PRODUCT DETAILS		ARTWORK SPECIFICATION	
Job:	Nilocin Wart gel DK IFU	Item:	<input checked="" type="checkbox"/> leaflet
ID no:	UG05032020-101035-DK	Material:	offset -- 60g/m ²
Pharmacode:	---	Dimensions:	148x210 mm
Date:	03.12.2020	Folded to size:	74.25 x 52.50 mm
Edition:	2	Printing:	<input checked="" type="checkbox"/> 1 side <input type="checkbox"/> Both sides
 tel.: +48 61 842 09 92 www.preston.pl		Approved by:	Date:
		Signature:	
		Colours:	
		PRINTING:	TECHNICAL DESCRIPTION:
1.  Cyan	5. --	1.  knife	5.
2.  Magenta	6. --	2.  dimension	6.
3.  Yellow	7. --	3.	7.
4.  Black	8.	4.	8.
Page 1/1			
A very thorough check of the file before sending is highly requested! It is recommended that the file is checked by minimum 2 persons. Please be advised that Preston Packaging does not take any responsibility for errors in approved/signed production files.			