



## Nilocin Vorte Gel

DK



**Kun til udvortes brug. Opbevares udenfor børns synsfelt og rækkevidde.**



**Fetisende**



**Læs indlægsedlen omhyggeligt før brug.**

### INDIKATION

Nilocin® Vorte Gel benyttes til behandling af vorter på fødderne, hænder, krop, arme og ben. Produktet kan bruges af voksne og børn fra 4-års alderen.



### VORTER

Vorter er lokale vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). De kan findes alene eller i klynger. Der findes forskellige typer vorter. De findes oftest på hænder og fødder, albuer og knæ. Vorter er en smitsom sygdom og spredes ved virusens kontakt med huden.

### NILOCIN®

Nilocin® Vorte-behandling er et CE-mærket medicinsk udstyr til topisk administration direkte på vorter. Pakken indeholder en glasflaske med 4 ml behandlingsgel (nok til at behandle 10 vorter), samt denne indlægseddel.

Gelen indeholder en keratolytisk forbindelse, som lokalt nedbryder væv og derved fjerner vorten.



### FORHOLDSREGLER

Kun til ekstern brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel.

- Brug IKKE Nilocin® i nærheden af dit ansigt, nakke, armhuler, eller kse dele
- Brug ikke Nilocin®, hvis du er overfølsom eller allergisk overfor indholdsstofferne.
- Undgå kontakt med sund hud omkring vorten ved påføring. Hvis gelen kommer i kontakt med sund hud, skylles området med sæbe og rigeligt vand.
- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, før huden er helet.
- Undgå kontakt med smykker, bklædningsgenstande, etc., idet gelen er ætsende
- Påfør ikke Nilocin® på ømme eller blødende vorter, irriteret, betændt, blæret eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Må ikke bruges på "vorter" med hårvækst, ansigtsvorter, modermærker, pigmenteret eller beskadiget hud. Hvis du er usikker på om du har en vorte, der er egnet til behandling med Nilocin® Vorte Gel, spørg din læge, apotekspersonalet eller sugeplejerske, før du starter behandlingen.
- Nilocin® er ikke egnet for diabetikere eller personer med dårlig blodcirkulation.

**• Det er bedre at påføre for lidt gel end for meget. Overpåføring kan resultere i bivirkninger såsom sår, blærer, betændelse, vævsdød (nekrose), ar og kemiske forbrændinger.**

**TEKNISK DATA - Produktnavn:** Nilocin® **Produkt:** Vorte Gel **Ingredienser (INCI):** Trichloroacetic acid (TCA 40%), Aqua, Glycerin, Cellulosum, Cellulose Gum, Benzoic Acid, Sodium Benzoate **Indhold:** 4 ml, tilstrækkelig til at behandle minimum 10 vorter **Registrering:** Nilocin® er klassificeret og registreret som Medicinsk Udstyr klasse IIa. **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25°C i den originale emballage, uden for direkte sollys og utilgængeligt for børn. **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark. [www.nilocin.com](http://www.nilocin.com), Oplysninger opdateret: 2023/12.

- Kontakt din læge, hvis det behandlede område bliver rødt, smertefuld eller betændt.

- Enkelt patient - flergangsbrug

- Må ikke anvendes i kombination med andre vortebehandlinger.
- Krads ikke skorpen på vorten, den bør falde af naturligt.
- Må ikke anvendes til børn under 4 år. Med mindre ordineret af læge.
- Hvis du er gravid, ammer eller har en hudsygdom, anbefales det at konsultere din læge inden brug.

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I KONTAKT MED ØJNENE ELLER SLIMHINDER, SKYL MED RIGELIGT VAND I 15 MINUTTER OG KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.

### SÅDAN BRUGES NILOCIN®

- 1 Fjern hættten. Skub ned og drej hættten mod uret.
- 2 Påfør gel på vorten med applikatoren 2 gange dagligt i 4 dage. Større vorter kan have brug for mere end 1 påføring for at dække hele vorten. For børn med små vorter reduceres behandlingsplanen til én påføring om dagen.
- 3 Sæt låget på flasken igen efter brug.
- 4 Lad gelen tørre i 10-15 minutter.
- 5 Gentag behandlingen i 4 dage. Hvis vorten ikke er helt forsvundet, gentages behandlingen efter 4 dages pause. Denne behandlingsplan kan gentages op til 4 gange.

Sørg for at dække hele vorten og pas på ikke at røre eller spilde på den omkringliggende hud.

Opstår der ubehag eller smerter, stoppes påføringen. Hvis det brænder, svier, eller hvis gelen påføres sund hud, skylles med sæbe og koldt vand.

### Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer.

### MULIGE BIVIRKNINGER


Det er vigtigt at bruge produktet som anviset. Påfør ikke for meget, da dette kan forårsage hudskader! (se venligst FORHOLDSREGLER ovenfor)

En let prikkende eller brændende fornemmelse kan i nogle tilfælde mærkes i 10-15 minutter. Ved overeksponering kan der opstå bivirkninger. Sæt behandlingen på pause, indtil huden er helt restitueret. Alvorlige hændelser skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed.

### OPBEVARING

Opbevares ved 2 til 25°C, og uden for direkte sollys i den originale emballage og utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark.  
Nilocin® er et registreret varemærke tilhørende Unigroup ApS.

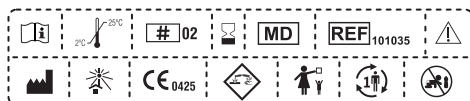

UG020230-101035



## Nilocin Vorte Gel

DK



**Kun til udvortes brug. Opbevares udenfor børns synsfelt og rækkevidde.**



**Fetisende**



**Læs indlægsedlen omhyggeligt før brug.**

### INDIKATION

Nilocin® Vorte Gel benyttes til behandling af vorter på fødderne, hænder, krop, arme og ben. Produktet kan bruges af voksne og børn fra 4-års alderen.



### VORTER

Vorter er lokale vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). De kan findes alene eller i klynger. Der findes forskellige typer vorter. De findes oftest på hænder og fødder, albuer og knæ. Vorter er en smitsom sygdom og spredes ved virusens kontakt med huden.

### NILOCIN®

Nilocin® Vorte-behandling er et CE-mærket medicinsk udstyr til topisk administration direkte på vorter. Pakken indeholder en glasflaske med 4 ml behandlingsgel (nok til at behandle 10 vorter), samt denne indlægseddel.

Gelen indeholder en keratolytisk forbindelse, som lokalt nedbryder væv og derved fjerner vorten.



### FORHOLDSREGLER

Kun til ekstern brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel.

- Brug IKKE Nilocin® i nærheden af dit ansigt, nakke, armhuler, eller kse dele
- Brug ikke Nilocin®, hvis du er overfølsom eller allergisk overfor indholdsstofferne.
- Undgå kontakt med sund hud omkring vorten ved påføring. Hvis gelen kommer i kontakt med sund hud, skylles området med sæbe og rigeligt vand.
- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, før huden er helet.
- Undgå kontakt med smykker, bklædningsgenstande, etc., idet gelen er ætsende
- Påfør ikke Nilocin® på ømme eller blødende vorter, irriteret, betændt, blæret eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Må ikke bruges på "vorter" med hårvækst, ansigtsvorter, modermærker, pigmenteret eller beskadiget hud. Hvis du er usikker på om du har en vorte, der er egnet til behandling med Nilocin® Vorte Gel, spørg din læge, apotekspersonalet eller sugeplejerske, før du starter behandlingen.
- Nilocin® er ikke egnet for diabetikere eller personer med dårlig blodcirkulation.

**• Det er bedre at påføre for lidt gel end for meget. Overpåføring kan resultere i bivirkninger såsom sår, blærer, betændelse, vævsdød (nekrose), ar og kemiske forbrændinger.**

**TEKNISK DATA - Produktnavn:** Nilocin® **Produkt:** Vorte Gel **Ingredienser (INCI):** Trichloroacetic acid (TCA 40%), Aqua, Glycerin, Cellulosum, Cellulose Gum, Benzoic Acid, Sodium Benzoate **Indhold:** 4 ml, tilstrækkelig til at behandle minimum 10 vorter **Registrering:** Nilocin® er klassificeret og registreret som Medicinsk Udstyr klasse IIa. **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25°C i den originale emballage, uden for direkte sollys og utilgængeligt for børn. **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark. [www.nilocin.com](http://www.nilocin.com), Oplysninger opdateret: 2023/12.

UG020230-101035