

REF L031-11855	REF L031-118L5	REF L031-118T5	Dansk
REF L031-118A5	REF L031-118U5	REF L031-118V5	
REF L031-118Q5			

En hurtig test for påvisning af SARS-CoV-2 nukleokapside antigener i podningsprøver fra næsehulen.

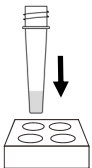
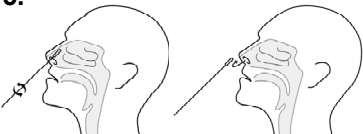
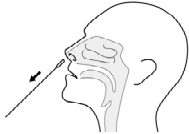
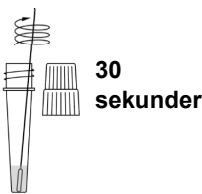
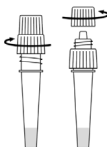
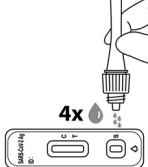
Kun til in vitro diagnostisk brug. Til selvtestning.

Læs instruktionerne omhyggeligt før du udfører testen.

KLARGØRING

- 
Vask eller sprit hænderne af. Sørg for, at de er tørre, inden du starter testen.
- 
Læs instruktionerne, før du bruger SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test-sættet.
- 
Tjek udløbsdatoen trykt på kassetens foliepose.
- 
Åbn posen. Tjek Resultatvinduet og Prøvebrønden på kassetten.

TESTPROCEDURE

- 
Skru dråbetællerhætten af ekstraktionsbufferrøret.
- 
Indsæt røret i hullet på sætkassen. (Eller placér røret i rørholderen.)
- 
Åbn pakken med vatpinde ved stangenden.
- 
Indfør vatpindens absorberende spids i ét næsebor. Skub under forsigtig rotation vatpinden mindre end 2,5 cm ind fra næseborets åbning.
- 
Roter vatpinden 5 gange mod næseborets inderside. Fjern vatpinden, og indfør den ind i det andet næsebor. Gentag trin 4.
- 
Fjern vatpinden fra næsebor.
- 
Indsæt vatpinden i røret, og hvirvl den i mindst 30 sekunder.
- 
Roter vatpinden mindst 5 gange, mens du klemmer på siden af røret.
- 
Fjern vatpinden, mens røret klemmes.
- 
Skru dråbetællerhætten på røret. Bland ved at hvirvle eller svipper i bunden af røret. Fjern den lille hætte fra dråbetællerens spids.
- 
Klem forsigtigt røret, og dispenser 4 dråber opløsning i prøvebrønden.
- 
Aflæs resultatet, når timeren når 15-30 minutter. Aflæs ikke efter 30 minutter.

Materialer leveret	Mængde (stykker)						
	1 T	2 T	3 T	5 T	7 T	20 T	25 T
Testkassetter	1	2	3	5	7	20	25
Ekstraktionsbufferrør	1	2	3	5	7	20	25
Engangspodningspind	1	2	3	5	7	20	25
Affaldspose	1	2	3	5	7	20	25
Rørholder	/	/	/	/	/	1	1
Indlægsseddel	1	1	1	1	1	1	1

Materiale kræver men ikke forudsat
Timer

INSTRUKTIONSVIDEO:

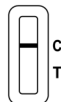
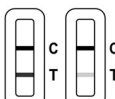
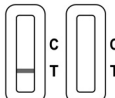


PRØVEINDSAMLING

- SELV-INDSAMLING**
- 
- INDSAMLING AF EN VOKSEN PLEJEPERSON**
- 

En nasalpodningsprøve kan selvindsamles af en enkeltperson, der er 18 år eller ældre. Børn under 18 år skal bør varetages forælder eller værge. Følg de lokale retningslinjer for prøveindsamling fra børn.

FORTOLKNING AF RESULTATER

- Negativt**
- 
- Kun kontrollinjen (C) og ingen testlinje (T) vises. Det betyder, at der ikke blev påvist SARS-CoV-2 antigen. Et negativt testresultat angiver, at du sandsynligvis ikke har COVID-19-sygdomme i øjeblikket. Fortsæt med at følge alle gældende regler og beskyttelsesforanstaltninger, når du kontakter andre. Der kan forekomme infektion, selv om testen er negativ. Hvis der er mistanke om det, gentages testen efter 1–2 dage, da coronavirus ikke kan påvises nøjagtigt i alle faser af en infektion.
- Positivt**
- 
- Både kontrollinjen (C) og (T) vises. Det betyder, at der blev påvist SARS-CoV-2 antigen. **BEMÆRK:** Derfor bør enhver svag farvetone i testlinjeområdet (T) betragtes som positiv. Et positivt testresultat betyder, at det er meget sandsynligt, at du i øjeblikket har COVID-19-sygdom. Kontakt straks din læge/praktiserende læge eller den lokale sundhedsafdeling. Følg de lokale retningslinjer for selvisolation. Der skal udføres en PCR-bekræftelsestest.
- Ugyldigt**
- 
- Kontrollinje (C) vises ikke. Utilstrækkelig prøvemængde eller forkert betjening er de mest sandsynlige årsager til et ugyldigt resultat. Gennemgå instruktionen igen, og gentag testen med en ny testkassette. Hvis testresultaterne stadig er ugyldige, skal du kontakte din læge eller et COVID-19-testcenter.

BORTSKAF DIT TESTSÆT PÅ FORSVARLIG VIS

Når testen er færdig, skal du lægge alt indholdet af det brugte testsæt i den medfølgende affaldspose. Læg affaldsposen ned i almindeligt restaffald.

