

# BREATHE RIGHT NÆSESTRIPS.

Læs denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at bruge Breathe Right® Næsestrips.  
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål.

Breathe  
Right®  
NÆSESTRIPS

## 1 Hvad er Breathe Right Næsestrips og hvad bruges de til?

**Breathe Right Næsestrips** er fleksible fjederlignende bånd som skånsomt løfter og åbner næsen, så luften bedre kan passere. Breathe Right er uden lægemiddel og klinisk bevist til straks at åbne næsen, så du lettere kan trække vejret.

**Breathe Right Næsestrips** kan bruges dag og nat for at afhjælpe tilstoppet næse pga. allergi eller forkølelse. Anvend hvis du lider af:

### • Tilstoppet næse

**Breathe Right Næsestrips** åbner næsen, så du lettere kan trække vejret ved at give midlertidig lindring af tilstoppet næse, som kan være forårsaget af forkølelse og allergi. **Breathe Right Næsestrips** kan give midlertidig lindring af symptom på tilstoppelse eller vejtrækningsbesvær grundet afvigelse i næseskillevæggen. Næsestrips bør ikke betragtes som et alternativ til en kirurgisk operation.

### • Snorken

Ved at lette vejtrækningen gennem næsen i stedet for gennem munden, kan næsestrips hjælpe til med at reducere eller endda afhjælpe snorken. Det er anbefalet at bruge næsestrips hver nat, for at opnå de bedste resultater til at lette snorken.

**Breathe Right Næsestrips** kan bruges sammen med enhver form for medicin.

## 2 Sådan skal du bruge Breathe Right Næsestrips

Brug kun hver næsestrip en gang. Kun til engangsbrug. Kan bruges dag og nat. Korrekt placering sikrer den bedste effekt. Vær forsigtig dag og nat. Korrekt placering sikrer den bedste effekt. Vær forsigtig med at placere næsestrippen for højt eller for lavt.

Størrelsen er vigtig, brug den rigtige størrelse for de bedste resultater. Standard næsestriimler passer til 75% af næsen, store næsestriimler er til voksne med større næse.

Specielt fjederlignende bånd løfter forsigtigt åbne næsepassager. Brug en klar variant til tør / følsom hud.



## 3 Advarsler og forsigtighedsregler

- Kun til udvortes brug.
- Må ikke anvendes på sår, solskoldninger eller irriteret hud.
- Hvis udslæt eller hudirritation opstår, ophør da brugen.
- Må ikke anvendes i mere end 12 timer om dagen.
- Næsestrippen er til engangsbrug, da den mister sin klæbrighed efter anvendelse.
- Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke til børn under 5 år.
- Emballagen kan indeholde naturgummilætex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
- I tilfælde af tvivl om brugen af dette produkt kontakt en sundhedsfaglig person.

## UNDGÅ BRUG

Hvis du er allergisk over for latex eller over for **Breathe Right Næsestrips**.

Søvnapnø: **Breathe Right Næsestrips** er ikke beregnet til behandling af søvnapnø. Personer med symptomer på søvnapnø bør søge læge.

Nogle kan få bivirkninger ved brugen af **Breathe Right Næsestrips**. Disse kan være reaktioner på applikationsstedet (f.eks. rødmen, irritation smerte eller afskalning, blødninger, rids og misfarvning) og overfølsomhedsreaktioner inkl. udslæt, kløe og hævelse.

Hvis et alvorligt uheld, er opstået i forbindelse med dette produkt, skal det anmeldes til producenten og Lægemiddelstyrelsen. Det er vigtigt at anmelde produktuhændelser, da dette kan hjælpe til med at identificere fejl i det medicinske udstyr, og muligvis forebygge at lignende hændelser gentages.

## 4 Opbevaring af Breathe Right Næsestrips

Opbevares ved højst 30 °C.

Opbevares i den originale pakning.

Produktet må ikke anvendes efter den sidste anvendelsesdato, der vises på emballagen.

Venligst bortskaf produktet ifølge dine lokale krav og tag altid hensyn til miljøet.

## 5 Yderligere information

Næsestrips er individuelt pakket og koldforseglet med klæbemiddel. Den koldforseglede emballage er pakket i kartoner.

⚠ Advarsel: Læs omhyggeligt indlægssedlen vedlagt i pakken inden brug af produktet.

🚫 Brug ikke et beskadiget produkt.

🕒 Engangsbrug: Næsestrips er til engangsbrug.

🌿 **LATEX** Emballagen omkring næsestrippen kan indeholde naturgummilætex.

📦 **LOT** Lot nummer: se kartonen.

🕒 Sidste anvendelsesdato vises som ÅÅÅÅ-MM

🏢 Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.

🇮🇪 **EC REP** Brandshapers Ltd., Ardavan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.

🌐 Bräuner FMCG, Birkmosevej 20D, 1. th., 6950 Ringkøbing, Danmark.

www.breatheright.com



**MD** Medicinsk udstyr.  
Dato: November 2024

Varemærker tilhører af FCB. © 2024 FCB.

# BREATHE RIGHT NESESTRIPS.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke Breathe Right® Nesestrips.  
Har du spørsmål, kontakt legen din eller spør på apoteket.

Breathe  
Right®  
NESESTRIPS

## 1 Hva er Breathe Right Nesestrips og hva brukes det til?

**Breathe Right Nesestrips** består av fleksible fjærlignende bånd som forsiktig løfter opp nesepassasjen for å forbedre luftstrømmen.

Det er klinisk bevist at medikamentfrie Breathe Right Nesestrips umiddelbart åpner nesepassasjen slik at du kan puste lettere.

**Breathe Right Nesestrips** kan brukes dag eller natt for å lindre tett nese på grunn av allergi eller forkjølelse. Brukes dersom du lider av

### • Tett nese

**Breathe Right Nesestrips** åpner nesepassasjen slik at du kan puste lettere, ved å sørge for midlertidig å lindre tett nese på grunn av forkjølelse eller allergi.

**Breathe Right Nesestrips** kan midlertidig lindre symptomer på tetthet eller pustevansker grunnet skjev nesekillevegg. Stripsene bør ikke vurderes som alternativ til kirurgisk korreksjon.

### • Snorking

**Breathe Right Nesestrips** kan hjelpe til med å redusere eller til og med eliminere snorking, ved å gi bedre pust gjennom nesene i stedet for gjennom munnen. Det anbefales å bruke stripsene hver natt for å oppnå best mulig resultat mot snorking.

**Breathe Right Nesestrips** kan brukes sammen med alle legemidler.

## 2 Hvordan bruke Breathe Right Nesestrips

Til engangsbruk – bruk hver strips kun én gang. Kastes etter bruk. Kan brukes dag eller natt.

Riktig plassering sørger for at du får maksimal effekt. Pass på at du ikke setter stripsen hverken for høyt eller for lavt.


Størrelsen er viktig, bruk riktig størrelse for best resultat. Standard nesestrimler passer til 75 % av alle neser, store nesestrimler er for voksne med større nese.

Spesielle fjærlignende bånd åpner og løfter nesepassasjen forsiktig.

Bruk klar variant for tørr / sensitiv hud.

## 3 Advarsler og forsiktighetsregler

- Kun til utvortes bruk.
- Skal ikke brukes på sår, solbrent eller irritert hud.
- Dersom det oppstår utslett eller huden blir irritert, stans bruken av produktet.
- Skal ikke brukes i mer enn 12 timer pr. dag.
- På grunn av egenskapene til produktet er stripsene kun til engangsbruk. Etter at stripsen er fjernet virker ikke limet, og stripsen vil ikke sitte fast.
- Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
- Skal ikke brukes av barn under 5 år.
- Papirposen som stripsene er pakket i kan inneholde naturlig gummlateks som kan forårsake allergi.
- Ved tvil om bruk av dette produktet, spør helsepersonell.

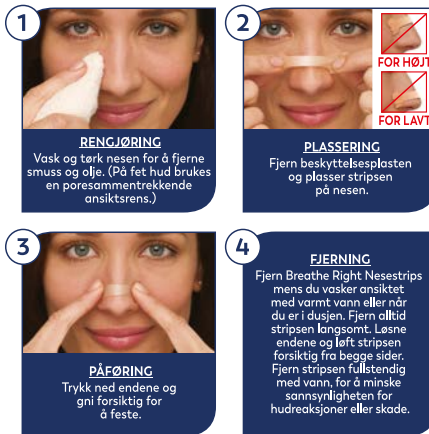

## SKAL IKKE BRUKES

Dersom du er allergisk mot lateks eller mot **Breathe Right Nesestrips**.

Søvnapné: **Breathe Right Nesestrips** er ikke beregnet til behandling av søvnapné. Personer som har symptomer på søvnapné skal ta kontakt med legen sin.

Noen kan oppleve bivirkninger når de bruker **Breathe Right Nesestrips**. Dette kan være reaksjoner på påføringsstedet (f.eks. rødhet, irritasjon, smerte, hudavskalling, blødninger, riss og misfarging) og hypersensitivetsreaksjoner inkludert utslett, kløe og hovent ansikt.

Enhver alvorlig hendelse som skjer i forbindelse med bruk av dette produktet bør rapporteres til fabrikanten og Statens legemiddelverk. Det er viktig å rapportere produkthendelser, da dette kan hjelpe å identifisere feil ved dette medisinske utstyret, og kan forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

## 4 Hvordan Breathe Right Nesestrips skal oppbevares

30 °C Oppbevares ved høyst 30 °C.  
Oppbevares i originalpakningen.

Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen som er vist på pakningen.

Avhend produktet i henhold til lokale regler for avfallssortering. Ta alltid hensyn til miljøet.

## 5 Ytterligere informasjon

Nesestripsene er pakket individuelt i papirposer forseglet med lim. De forseglede papirposene er pakket i kartonger.

- ⚠ Forsiktig - Les vedlagte pakningsvedlegg nøye før bruk.
- 🚫 Bruk ikke et skadet eller ødelagt produkt.
- 🔄 Til engangsbruk: Nesestrips er til engangsbruk.
- 📄 Papirposen stripsene ligger i kan inneholde naturlig gummlateks.
- 📦 LOT Batch nummer: se kartongen.
- 🕒 Brukes innen dato vises som ÅÅÅÅ-MM
- 🏢 Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.
- 🇪🇨 REP Brandshapers Ltd, Ardcanan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.
- 🌐 Bonaventura Sales AS, Henrik Ibsens Gate 60A, NO- 0255 Oslo, Norway.

[www.breatheright.com](http://www.breatheright.com)



**MD** Medisinsk utstyr.  
Dato: November 2024

Varemerker eid av FCB. © 2024 FCB.

101424  
31056059