

BRUGERVEJLEDNING

Remo-wax[®] ørevoksløsende øredråber

Virkning og anvendelse

Remo-wax øredråber løsner og blødgør fastsiddende ørevoks og ørevokspropper og forebygger dannelse af ørevokspropper.

Brug ikke Remo-Wax[®] hvis

- øret er betændt eller gør ondt
- der flyder sekret ud af øret
- trommehinden er beskadiget, perforeret eller er blevet punkteret (f.eks. dræn i øret)
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax.

Særlige patientgrupper

Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dryppe Remo-wax i din øregang og skylle øret som beskrevet i denne brugervejledning.

Børn

Remo-wax bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning. Følg nøje den vejledning du har fået. En øreskyllning hos børn skal helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

Brugere med høreapparat

Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at øret er blevet skyllet og vandet er løbet ud af øret.

Mulige bivirkninger

I nogle sjældne tilfælde kan der forekomme lokale allergiske reaktioner i forbindelse med anvendelse af Remo-wax. Ubehagelig fornemmelse i øregangen, hudirritationer og forbigående svimmelhed kan forekomme. Tinnitus kan være et symptom på ørevokspropper, og forbigående tinnitus kan forekomme efter rensning af øret.

Hvis øresprøjten skubbes for dybt ind i øregangen kan trommehinden beskadiges.

Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om, at Remo-wax har medført bivirkninger hos dig.

Sådan skal du bruge øredråberne og øresprøjten

Opløsning af ørevokspropper med øredråber

- Opvarm indholdet i flasken med Remo-wax til håndtemperatur (cirka 37 °C) ved at holde flasken i hånden et par minutter.
- Hold hovedet skråt mod skulderen eller læg dig ned med hovedet drejet til siden og dryp 10- 20 dråber Remo-wax ind i øret. Træk forsigtigt øreflippen op og ned nogle få gange

- med drejende bevægelse. Øregangen kan dækkes med en tot vandskyende vat fugtet med nogle få Remo-wax dråber.
- Lad Remo-wax virke i 20-60 minutter. Hvis nødvendigt kan væsken blive i øret natten over.

Efter anvendelse af Remo-wax øredråber skal øregangen skylles. Du kan bruge Remo-wax øresprøjten til skylning eller kontakt en læge eller sygeplejerske for en øreskylning. Hos børn skal en øreskylning helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

Øreskylning med øresprøjten

- Før anvendelse skal øresprøjten skylles igennem hver gang.
- Sug håndvarmt/lunkent vand op i øresprøjten.
- Før forsigtigt spidsen af øresprøjten et par millimeter ind i øregangen og skyl øret ved at trykke let og forsigtigt på øresprøjten.

Stik ikke spidsen af øresprøjten dybt ind i øregangen!

- Gentag skylningen nogle gange indtil vandet, der løber ud af øret, er helt klart.
- Skyl øresprøjten igennem og tøm den ved at trykke på den, indtil den er tom, efter hver behandling. Lad vandet dryppe ud med spidsen nedad.

Hvis én behandling ikke løsner ørevoksproppen, kan du, hvis nødvendigt, gentage inddrypningen af øredråber og øreskylning i tre på hinanden følgende dage.

OBS! Skyl øregangen efter hver behandling.

Hvis du får foretaget øreskylning hos lægen eller en hjemmesygeplejerske, så følg hans/hendes anvisninger.

Øreskylning må aldrig medføre smerte. Hvis du oplever smerte, så stop øreskylningen og kontakt din læge.

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax, så kontakt din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Indholdstoffer

Allantoin, etoxyleret lanolin, polysorbat 80, polysorbat 60, flydende sorbitol, fructosesirup, polyoxetylen stearylether, polyoxyetylen oleylether, lanolinolie, isopropylmyristat, risklidolie, phenethanol, cetylakohol, butylhydrocytoluen, sorbinsyre, benzethoniumchlorid og vand. Øresprøjte: Polyvinylchlorid (PVC).

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 °C.

Opbevar Remo-wax dråber og øresprøjte utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Pakningsstørrelser

Remo-wax øredråber 10 ml

Remo-wax øredråber 10 ml med øresprøjte

Fremstiller

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant i Danmark

Orion Pharma A/S

Telefon +45 8614 0000

medinfo@orionpharma.com

Denne brugervejledning blev senest revideret

11.09.2020



Medicinsk udstyr