

**UNIVERSALPLASTER TIL ØVRE RYG/NAKKE****Dette produkt kan bruges i tilfælde af muskel og ledsmerter i øvre ryg/nakke.**

1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påsæt plasteret på ryg/nakke på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plastrerne til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**UNIVERSALPLASTER TIL ALBUEN****Dette produkt kan bruges i tilfælde af muskel og ledsmerter samt tennisalbue.**

1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påfør plasteret på en bøjet albue på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plastrerne til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**UNIVERSALPLASTER TIL LÆNDEN****Dette produkt kan bruges i tilfælde af muskel og ledsmerter i området omkring lænden.**

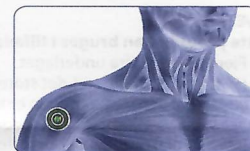
1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påfør plasteret på lændeområdet på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plastrerne til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**UNIVERSALPLASTER TIL KNÆET****Dette produkt kan bruges i tilfælde af muskel og ledsmerter i knæet.**

1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påfør plastrerne på et bøjet knæ på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plastrerne til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**UNIVERSALPLASTER TIL SKULDEREN****Dette produkt kan bruges i tilfælde af muskel og ledsmerter i skulderen.**

1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påfør plastrerne på skulderen på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plastrerne til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**UNIVERSALPLASTER TIL ANKLEN****Dette produkt kan anvendes ved muskel og ledsmerter samt forstuvninger.**

1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påfør plasteret på anklen på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plastrerne til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**STORT UNIVERSAL PLASTER****Dette produkt kan bruges i tilfælde af rygsmerter, iskiasnesmerter, muskeloverbelastning (skulder, albue, knæ, læg, osv.).**

1. Fjern plasteret fra underlaget
  2. Påfør plastrerne på det smertefulde område på tør, ren hud uden hår
  3. Vent i ca. to minutter for forbedret vedhæftning af plasteret til huden
  4. Efterlad plasteret på det berørte område i 5 dage
  5. Fortsæt behandlingen, indtil symptomerne forbedres
- Plasteret forbliver funktionelt, når det er vådt (f.eks. ved brusebad).

**ADVARSEL:**

De er ikke-sterile produkter og indeholder ikke stoffer.

Plastrerne må ikke placeres over åbne sår eller brudt / irriteret hud, da de kan forårsage infektion.

I tilfælde af specifikke kredsløb (især mikro-kredsløb) eller muskulære tilstande, må du ikke bruge produktet uden først at have konsulteret din læge, da det kan være ineffektivt og / eller føre til en forværring af din patologiske tilstand.

Brug ikke plasteret, hvis der opdages tegn på fejl.

Lokal overfølsomhed kan forekomme på anvendelsesstedet for plasteret, hvilket kan resultere i kløe, rødme, hvilket undertiden også kan resultere i vabler (blærer).

Hvis kløe / forbrænding forekommer efter påføring af plasteret, anbefales det, at man straks fjerner plasteret straks.

Hvis brugeren er et barn eller en gravid kvinde, tilrådes det at konsultere en læge, inden produktet bruges, for at undgå eventuelle uønskede bivirkninger.

Brug ikke det samme plaster i mere end 5 dage. I tilfælde af kontinuerlig påføring (selv i samme pakning) skal du udskifte produktet med en ny, da det kan føre til en rødlig hudtilstand.

Brug ikke produktet efter udløbsdatoen, da det kan miste dets effektivitet.

Produktets effektivitet er ikke garanteret i tilfælde af genbrug. I tilfælde af en alvorlig ulykke skal brugeren rapportere hændelsen direkte til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren befinder sig.

**OPBEVARING:**

Opbevares mellem + 5 ° C og + 30 ° C.

Emballagen giver også den nødvendige beskyttelse for at undgå beskadigelse af produktet under håndtering.

Bortskaffelse i miljøet er forbudt. Bortskaf plasteret i usorteret affald. For mere detaljeret information bedes du kontakte dit lokale renovationselskab.

Dette produkt er ikke et termisk plaster, så det opvarmes ikke af sig selv for at opnå den tilsigtede effekt. På grund af effekten på lokal mikrocirkulation kan der dog i nogle tilfælde mærkes en let varme i applikationsområdet.

**SYMBOLS**

Se vejledninger til brug

Opbevares tørt

Partinummer

Temperaturområde

Medicinsk udstyr

Katalogidentifikationskode

Holdes væk fra sollys

Engangsprodukt, må ikke genbruges

Dette angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges

[Fabrikant]  
**D.Fenstec srl**  
 Viale Verona 74, 36077,  
 Altavilla Vicentina, Italia  
 Tel. +39 0444 17 50 103

Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget

Rev. 3 den 26/10/2020

