

apotekets

GRAVIDITESTEST TIDLIG TEST


Læs denne brugsanvisning, inden du foretager testen.

Test fra
4 dage
før din udeblevne
menstruation¹

Hvis du tester tidligt,
så brug den første
morgenurin. Ellers
test på hvilket
tidspunkt af dagen.

Undlad at drikke
meget væske
inden du tester.

Hold aldrig
testpennen med
den absorberende
spids pegende opad.

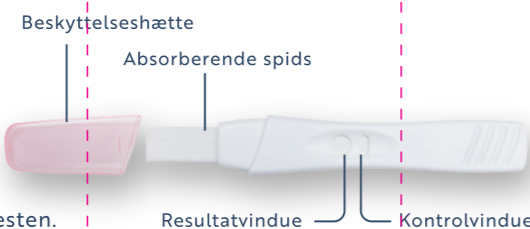

OM TESTEN

Apotekets Graviditetstest Tidlig Test finder hCG (humant choriongonadotropin), et hormon som stiger i de tidlige stadier af graviditeten. Følsomheden for testen er 10mIU/mL.

Over 99% nøjagtig når den anvendes fra dagen for forventet menstruation.

1 UDFØR TESTEN

Tag testen ud af folieposen, tag beskyttelseshætten af og udfør testen med det samme. Test enten i:



urinstrålen i kun
10 sekunder




en opsamlet urinprøve
i kun **20 sekunder**

Sæt beskyttelseshætten på igen og læg testen på en vandret flade med resultatvinduet opad.

2 VENT 5 MINUTTER*

før du aflæser resultatet.

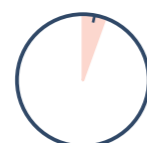

*Et 'gravid' resultat kan vise sig efter 1 minut, men du bør vente i hele 5 minutter for at bekræfte et 'ikke gravid' resultat.

3 AFLÆS DIT RESULTAT

En pink streg skal være synlig i kontrolvinduet. Aflæs **ikke** resultatet efter 10 minutter.



Gravid
To streger skal være synlige



Se spørgsmål 2

Ikke gravid
Ingen streg i resultatvinduet



Se spørgsmål 3

TESTFEJL



Hvis der **ikke** er en pink streg i kontrolvinduet indenfor 10 minutter, så har testen ikke virket.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du får en testfejl, må du tage en ny test og være omhyggelig med at følge brugsanvisningen.

Version 012023

Vend for flere detaljer >

SPØRGSMÅL OG SVAR

1. Hvornår kan jeg teste?

Testen kan bruges op til 4 dage før din udeblevne menstruation, hvilket er 3 dage før din menstruation forventes. Se skemaet herunder, det viser resultater fra kliniske undersøgelser af urinprøver fra den tidlige graviditet med Apotekets Tidlig Graviditetstest.

Antal dage før udeblevne menstruation.	-1	-2	-3	-4
% af gravide kvinder som fik et gravid resultat.	>99%	>99%	99%	85%

2. Min test viser 'Gravid'. Hvad skal jeg gøre?

Hvis dit resultat er 'Gravid' bør du kontakte din læge som kan vejlede dig om det videre forløb.

3. Min test viser 'Ikke gravid'. Hvad skal jeg gøre?

Det er muligt at du ikke er gravid, eller at dit graviditetshormonniveau endnu ikke er så højt, at det kan måles. Test igen tre dage senere med en ny test. Hvis denne test viser 'Ikke gravid' og din menstruation fortsat er udeblevet så kontakt din læge.

4. Hvad nu hvis jeg er usikker på mit resultat?

For at resultatet er 'Gravid', skal der være en pink streg i kontrolvinduet og en pink streg i resultatvinduet indenfor 10 minutter efter, du har udført testen. En lys pink streg i resultatvinduet er stadig et gravid resultat. Se spørgsmål 2. For at resultatet er 'Ikke gravid' skal der være en

- Til selvtest derhjemme.
- Kun til *in vitro* diagnosticering.
- Opbevares mellem 4-30°C.
- Hvis opbevaret i køleskab så vent med at teste til efter 30 min ved stuetemperatur.
- Ikke til indvendig brug.
- Hold udenfor børns rækkevidde.
- Må ikke genbruges.
- Må ikke bruges, hvis foliepakningen er skadet.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Kasseres sammen med husholdningsaffald

pink streg i kontrolvinduet og **ingen** pink streg i resultatvinduet indenfor 10 minutter efter, du har udført testen. Se spørgsmål 3.

5. Kan medicin eller medicinske tilstande påvirke testen?

Hvis du tager medicin bør du læse indlægssedlen fra producenten inden du tager en test. Hvis du får et uventet resultat bør du kontakte din læge. Medicin der indeholder hCG kan påvirke resultatet.

Anden fertilitetsmedicin (f.eks. clomifencitrat), smertestillende medicin og hormonal prævention (f.eks. p-piller) **burde ikke** påvirke resultatet.

Har du været gravid for nyligt (også selvom graviditeten ikke er fuldført), graviditet udenfor livmoderen, cyster på æggestokken, overgangsalder og visse meget sjældne sygdomme kan påvirke resultatet.

6. Jeg har tidligere testet og fået et 'Gravid' resultat, men nu har jeg fået et 'Ikke gravid' resultat.

Hvis du har fået et 'Gravid' resultat, er det muligt, at du senere finder ud af, at du ikke er gravid på grund af et naturligt tab af graviditeten, som kan ske i de første tidlige stadier. Det er desværre ikke ualmindeligt og kan påvirke 1 ud af 4 graviditeter. De fleste kvinder vil få en helt normal graviditet efterfølgende.

7. Er der noget jeg skal gøre hvis jeg planlægger at blive gravid?

Sundhedsmyndighederne anbefaler: en sund kost, tilskud af folsyre eller vitaminer beregnet til kvinder der planlægger graviditet, undgå alkohol og undgå rygning. Kontakt din læge for vejledning om at opretholde en sund graviditet.

IVD	Medicinsk udstyr til <i>in vitro</i> diagnosticering	Se instruktioner for anvendelse
LOT	Batchnummer	Opbevares mellem 4-30°C
Udløbsdato	Udløbsdato	Må ikke genbruges
Fabrikant	Fabrikant	Opbevares tørt
EC/REP	Autoriseret EU repræsentant	Beskyttes mod direkte sollys

Hubei MEIBAO Biotechnology Co., Ltd
No. 5 Hongfu Road
Shayang Economic Development Zone
448200 Jingmen City, P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg, Germany

Distributør
Apotekernes A.m.b.a.
Mileparken 20E, 2740 Skovlunde
apotekets.dk

CE
0123

apotekets

Job number: 226243

Client: Apotekernes A.m.b.a
Brand: Test

SKU: Graviditetstest Tidlig 3 stk-

Format: 190 x 160 mm

Country: Denmark

Substrate: -

Printing method: n/a

Cutter version: n/a

Colours:

	Cyan
	Magenta
	Yellow
	Black
	Pantone 2378 C

IMPORTANT.

Black (key) printing plate to be substituted with Pantone 2378C.