

## Mepore® Film & Pad

Absorberende klæbende filmbandage

### Produktbeskrivelse

Mepore Film & Pad er en steril, transparent, selvklæbende, absorberende og brusetæt filmbandage med bakteriebarriere.

Mepore Film & Pad består af:

- en absorberende sårpude med et integreret, ikke-klæbende sårkontaktlag.
- en brusetæt, transparent polyuretanfilm belagt med et opløsningsmiddelbaseret polyakrylatklæb. Klæbeområdet er dækket af en trykt beskyttelsesfilm.
- en appliceringsramme og flige af silikonebelagt papir.

Bandagens materialeindhold: Akrylatklæb, polyuretanfilm, viskose og polyester nonwoven

### Anvendelsesområde

Mepore Film & Pad er beregnet til brug på let til moderat væskende sår som f.eks. kirurgiske sår, snitsår og hudafskrabninger.

### Forholdsregler

Anvend ikke Mepore Film & Pad på patienter med kendt overfølsomhed over for akrylatklæb eller andre materialer/bestanddele, der indgår i produktet.

Vær ekstra forsigtig ved applicering på skrøbelig hud. Anvendelse på skrøbelig hud kan forårsage hudirritation.

Stræk ikke bandagen under applicering. Det kan medføre blærer, hvis den strækkes.

I tilfælde af tegn på infektion, f.eks. feber, eller hvis såret eller det omkringliggende hudområde bliver rødt, varmt eller hævet, kontaktes sundhedspersonalet med henblik på passende behandling.

Må ikke genbruges. Hvis produktet bruges flere gange, kan dets effektivitet blive nedsat, og der kan forekomme krydskontaminering.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget eller har været åbnet før anvendelse. Må ikke steriliseres igen.

da

## Brugervejledning

Mepore Film & Pad kan bruges af ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.

1. Rens såret i henhold til de kliniske retningslinjer. Tør den omkringliggende hud grundigt. For at sikre klæbeevnen må der ikke anvendes fugtighedscreme på huden, som bandagen dækker.
2. Fjern den trykte beskyttelsesfilm, og applicer bandagen med den klæbende side mod huden uden at strække bandagen. Sørg for, at den absorberende pude dækker såret.
3. Fjern papirrammerne, og træk de to hvide flige af. Tryk let på klæbekanten for at sikre en tilstrækkelig hæftning på huden.
4. Tag fat i kanten ved aftagning, og træk forsigtigt filmen tæt hen over huden i hårenes grøretning.

For at forhindre friktion, der kan forvolde skader på huden, skal det omhyggeligt sikres, at Mepore Film & Pad ikke strækkes under applicering. Når den lægges på over led, skal den omhyggeligt lægges på således, at den ikke hæmmer leddets bøjelighed. Efter nogle kirurgiske indgreb kan der opstå kraftig hævelse. I disse tilfælde vil det være bedre at bruge en mere fleksibel bandage for at minimere spændingen i huden.

Mepore Film & Pad bør skiftes, før den er helt mættet, ved tegn på lækage eller i overensstemmelse med klinisk praksis.

Bortskaffelse skal ske i henhold til lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepore Film & Pad skal rapporteres til Mölnlycke Health Care og til dine lokale, kompetente myndigheder.

Mepore® er et registreret varemærke tilhørende Mölnlycke Health Care AB

da