



SÅDAN BRUGES GIFTSUGER®

ILLUSTRATIONER FOR ANVENDELSE

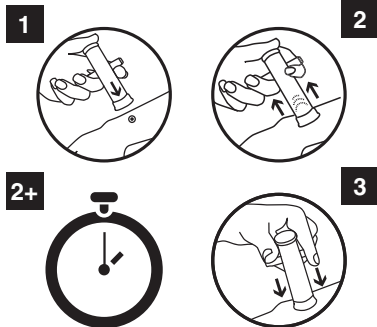

4

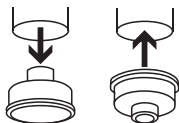

VENDBART MUNDSTYKKE

BRUG FOR MERE  
INFORMATION?



CE

LOT: hvid 240102, sort 240104, pink 240105  
PRODUKTIONSDATO: 01.2024

BRUGERVEJLEDNING

giftsuger®

Fjerner straks al ubehag · Klinisk testet



INGEN KEMIKALIER - GENANVENDELIG

## DANSK

### HVORDAN BRUGER JEG GIFTSUGER®

#### BRUGERVEJLEDNING

#### ANVENDELSESFORMÅL

GIFTSUGER® er et sugeværktøj beregnet til øjeblikkeligt at lindre symptomer som kløe, hævelse og smerter fra insektbid og stik.

Når du fjerner irriterationen, holder din krop op med at producere den reaktion, som forårsager symptomer som kløe og hævelse. For at opnå det bedste resultat benyt Giftsuger® hurtigst muligt, helst indenfor 24 timer.

#### HVORFOR KAN JEG IKKE SE GIFTEN, JEG SUGER UD?

Myg efterlader en meget lille mængde gift, som ikke kan ses med det blotte øje. Du vil stadig opleve at sugeværktøjet virker. Med andre insekter som myrer, bier, hvepse osv. vil du se mere udstødt gift.

#### KUN TIL FØRSTEHJÆLP

I tilfælde af en allergisk reaktion eller alvorligt stik/bid, søg omgående lægehjælp.

#### KAN JEG ANVENDE GIFTSUGER® PÅ BØRN?

Ja. GIFTSUGER® indeholder ingen kemikalier eller cremer, og er derfor sikker for alle.

Børn eller folk med sensitiv hud har brug for et mindre sug, grundet deres tyndere hud.

GIFTSUGER® kan efterlade midlertidige mærker på huden. GIFTSUGER® kan bruges af alle over 3 år.

Mindre børn bør kun anvende GIFTSUGER® under opsyn af voksne.

Kvælningsfare: Indeholder mindre dele.

#### HVORFOR OPNÅR JEG IKKE ET GODT SUG?

Test GIFTSUGER® på din håndflade for at tjekke at suget virker efter hensigten.

Hvis GIFTSUGER® benyttes på kropshår, fugt området før du benytter sugeværktøjet.

Stop med at suge, hvis du oplever smerte.

#### STEP 1

Pres tværpinden i bund, placér GIFTSUGER® på insektbid eller stik. Skub håndtagene ned. Placer sugeværktøjet over insektstikket.

#### STEP 2

Træk forsigtigt tværpinden opad indtil du mærker et sug.

#### STEP 2+

Sug i 10-20 sekunder.

#### STEP 3

Skub tværpinden nedad for at frigive suget.

#### GENTAG STEP 1-3 EFTER BEHOV

#### STEP 4 VENDBART MUNDSTYKKE

Vend mundstykket for at kunne suge på mindre områder, såsom fingre eller tæer.

#### FOR BØRN ELLER SENSITIV HUD

Træk tværpinden halvvejs op eller mindre.

Hold suget i 5-10 sekunder. Børn eller områder med sensitiv hud kræver mindre sug for at fjerne irriterationen grundet den tyndere hud.

#### FJERNELSE AF SPLINTER

Suget kan muligvis bringe splinter til hudens overflade til nem fjernelse.

#### SKRAB BRODDEN UD

Benyt siden af tværpinden til at skrabe brodden ud fra bien efter et stik.

#### RENGØRING

Vask det aftagelige mundstykke med sæbevand eller en vådserviet mellem og efter brug.

#### ADVARSEL! PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES AF

Personer med nedsat evne til at størkne blod såsom patienter med hæmofili eller i antikoagulerende behandling - Personer med kendt vaskulitis såsom Schönlein Henochs purpura eller personer med skrobelige kapillærer såsom Ehlers-Danlos syndrom - Personer med bullos hud sygdom som pemfigoïder. Må ikke anvendes over inficeret, sårdannet hud eller hud med betydelig eksem.

#### LEGAL PRODUCENT

Bug Bite Thing Europe Aps - DK-2970 Hørsholm  
Alvorlige hændelser skal indrapporteres direkte til den legale producent af dette medicinske udstyr og den relevante myndighed: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  
www.dkma.dk

#### DESIGNET OG PRODUCERET I DANMARK