


apotekets

**NÆSESPRAY**  
**SALTVAND NEUTRAL ISOTONISK**

20 ml

 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du begynder at bruge Apotekets Næsespray Saltvand Neutral Isotonisk. Behold den, du skal muligvis læse den igen.

Apotekets Næsespray Saltvand Neutral Isotonisk renser blidt næsen, nedsætter slimproduktionen under rhinitis, fugter tør næseslimhinde og beskytter den mod udtørring. Takket være sit høje indhold af mineraler hjælper havand med at opretholde den fysiologiske, rensende funktion af næseslimhinden.

Apotekets Næsespray Saltvand Neutral Isotonisk er beregnet til daglig næsehygiejne og til at genoprette naturlig fugt i næseslimhinden.

- renser blidt næsen
- til daglig næsehygiejne
- fjerner tør næseslimskorpe
- fugter tør næseslimhinde og beskytter den mod udtørring
- lindrer symptomerne på tilstoppet næse
- regenererer næseslimhinden

**INGREDIENSER:**

Renset vand, havand, benzalkoniumchlorid.


**BRUGSANVISNING:**

- 1 pust i hvert næsebor flere gange dagligt efter behov. Velegnet til voksne, børn fra 2 år, gravide og ammende kvinder.
- Et produkt bør kun bruges af én person.
- Tag applikatoren af efter hver påføring, vask den og lad den tørre, og sæt den på igen.

**Advarsler:**

- Anvend ikke Apotekets Næsespray Saltvand Neutral Isotonisk, hvis du er allergisk over for indholdsstofferne.
- Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.
- Tving ikke applikatoren dybt ind i næseboret.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke anvendes efter den angivne udløbsdato.
- Rådfør dig med læge eller apotek hvis du anvender andre lægemidler til næsen.
- Hvis du får næsesprøgen i øjet, skal du skylle dit øje godt med drikkevand.

- Opbevares mellem +5°C og +25°C.
- Enhver alvorlig, uønsket hændelse, der er opstået i forbindelse med brugen, skal rapporteres til Fabrikanten og Lægemiddelstyrelsen.

	Læs instruktionerne
	Batchnummer
	Udløbsdato
	Beskyt mod direkte sollys
	Opbevares ved en temperatur fra +5°C til +25°C
	Foruren ikke miljøet – bortskaf brugt emballage i passende beholder
	Fabrikant

**Medicinsk udstyr**

 Fabrikant:  
Dr. Müller Pharma s.r.o.  
U Mostku 182,  
503 41 Hradec Králové,  
Czech Republic.



Produceret for:  
MedPro Health ApS  
Gyldenlandsvej 21, 1,  
2920 Charlottenlund

Distributør:  
Apotekernes A.m.b.a.  
Mileparken 20E,  
2740 Skovlunde.  
apotekets.dk

Folderopdateringsversion:  
2021-10-12;

REV.002

0619



4190



4190

0619

14/3-24 Kon Julemi