

# Brugsanvisning ClearLite masker

Læs brugsanvisningen i sin helhed, også advarsler og forsigtighedsregler, før produktet tages i brug. Hvis advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner ikke følges, kan det medføre alvorlig patientskade eller dødsfald. Alvorlige hændelser skal rapporteres i henhold til lokale regler.

**ADVARSEL:** EN ADVARSEL-meddelelse giver vigtige informationer om en potentielt farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

**FORSIGTIG:** EN FORSIGTIG-meddelelse giver vigtige oplysninger om en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

## **Anæstesi ansigtsmaske:**

Til levering af anæstesi gasser og ilt til en patient.

### **Indikationer**

Anæstesi masker skal placeres, så de skaber en lufttæt forsegling omkring patientens mund og næse, og tilsluttes respirations udstyr. De kan anvendes til at inducere anæstesi for patienter i alle aldre og kan også anvendes under manuel genoplivning og ventilation.

### **Kontraindikationer**

Patienter med unormal ansigts anatomi eller ansigts skader.

### **Anvendelse af produktet:**

Produktet er beregnet til engangsbrug med en række anæstesirespirationssæt og forskelligt åndedræts- og anæstesiudstyr, som kan anvendes i akutte og ikke-akutte miljøer under opsyn af korrekt kvalificeret medicinsk personale.

Anæstesi ansigtsmaskerne leveres i mange forskellige udgaver og størrelser, som opfylder en række kliniske behov og giver brugeren valg. Man skal altid gøre sig fortrolig med produktet inden brug.

Til brug i akutte og ikke-akutte omgivelser under opsyn af tilstrækkeligt kvalificeret medicinsk personale.

Anæstesi ansigtsmaskerne er sikkert til brug med atmosfæriske gasser: N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub> og CO<sub>2</sub>; anæstesi gasser: isofluran, sevofluran, desfluran og andre sammenlignelige flygtige stoffer.

### **Patientkategori**

Produktserien er egnet til brug på alle patient grupper, herunder voksne, pædiatriske og nyfødte.

### **Tjek før brug**

1. Før brug skal det kontrolleres, at alle systemkomponenter ikke er blokerede eller indeholder fremmedlegemer.
  2. Konnekt/afmonter maskens koniske konnektions på respirations-og anæstesi udstyrets koniske konnektions med en tryk og drej bevægelse, for en sikker tilslutning.
  3. Sørg for, at der vælges en maske i en passende størrelse ud fra patientens størrelse og vægt.
  4. Når den er placeret, skal du sikre, at der er opnået en lufttæt forsegling, som muliggør levering af den ordinerede gas og manuel ventilation.
  5. Overvej eventuelle påvirkning, som den indvendige volumen af masken kan have på effekten af den ordinerede ventilation.
- Klinikeren bør vurdere dette på individuel patientbasis.

### **Kontrol under anvendelse**

1. Overvåg masken under brug, og udskift den, hvis der opstår visuel kontaminering.

### **Forsigtig**

1. Masken må kun anvendes under opsyn af korrekt uddannet medicinsk personale.
2. Masken skal bruges med udstyr med 22 mm han konnekt M/15mm F, som er i overensstemmelse med ISO 5356.
3. For at undgå kontaminering skal produktet forblive i indpakningen, indtil det skal bruges. Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget. FORTSÆTTER PÅ BAGSIDEN

**VEND**

4. Produkterne er konstrueret, valideret og fremstillet til engangsbrug.
5. Produktet må ikke genanvendes, rengøres eller steriliseres.

**FOR USA: Rx ONLY:** Kun Rx: Lovgivningen foreskriver, at dette udstyr kun kan købes af, eller efter anmodning af, en læge.

#### Advarsel

1. Produkt til engangsbrug. Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan dette udgøre en trussel mod patientsikkerheden i form af krydsinfektion, udstyrsfejl og beskadigelse. Rengøring kan medføre fejl i udstyret.
2. Se den individuelle produktmærkning for tilstedeværelse eller fravær af phthalater.
3. Anæstesi ansigtsmasken er ikke egnet til brug med brændbare anæstesi gasser.

#### Opbevaringsforhold

Opbevares uden direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den angivne holdbarhedsperiode.

#### Bortskaffelse

Efter brug skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal regler for infektionskontrol og bortskaffelse af affald.



**INTERSURGICAL**  
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK T:+44 (0)118 9656 300 [info@intersurgical.com](mailto:info@intersurgical.com) [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)